



Notice de montage et d'utilisation du fauteuil COCOON



7 avenue Bernard Pieds - 10110 BAR-SUR-SEINE - FRANCE
Tél. +33(0)3 25 29 40 00 - Fax : +33(0)3 25 29 12 12
Web: www.innov-sa.com - Email: innovsa@innovsa.com



(version 1 - juillet 2018)

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE UTILISATION

I- NOTICE D'UTILISATION

Avant d'effectuer un cycle (monté et surtout descendre) veuillez vérifier que rien (personne, animaux, objets...) ne puissent être coincés sous la mécanique en mouvement.

Conditions de stockage

Le 'COCOON' doit être stocké dans un local sec et tempéré en respectant le sens HAUT/BAS du carton.

Condition d'utilisation

Ne pas faire fonctionner cet appareil sans avoir au préalable :

- été formé à un essai pratique avec le revendeur ou son installateur,
- Lu et compris ce manuel.

Veiller à laisser une distance suffisante (environ 60 cm) derrière le fauteuil pour éviter qu'il ne vienne en contact avec le mur lorsqu'il est en position 'Relax'. Vérifier systématiquement que rien ne puisse être bloqué ou être dissimulé sous la mécanique avant chaque cycle d'utilisation. La mécanique du fauteuil pourrait provoquer de réelles blessures, soyez très vigilant avec les enfants en bas âge ou les animaux de compagnie.

S'assurer que l'emplacement du fauteuil soit une surface plane et sans déclivité pour valider la bonne stabilité du fauteuil au sol afin que votre fauteuil ne puisse pas glisser.

Ne pas placer le fauteuil à proximité d'une source de chaleur importante.

Brancher le câble alimentation sur un réseau électrique conforme aux normes en vigueur et en correspondance avec la tension du boîtier d'alimentation 230 V.

En cas de risque d'orages il est recommandé de ne pas utiliser le fauteuil.

Le fauteuil releveur ne doit pas se déplacer lors de son utilisation.

Nous vous conseillons de faire un cycle à vide afin de vous familiariser avec le fauteuil.

L'utilisateur doit interdire l'utilisation de ce fauteuil par les enfants.

Le repose-jambes n'est pas un siège supplémentaire.

Avant de déplacer le fauteuil : débrancher le câble d'alimentation.

En cas de tassement de votre couette. Veuillez svp détacher votre couette et la tapoter afin qu'elle retrouve son gonflant d'origine.

N'utiliser que les pièces et accessoires d'origine distribués par INNOV' SA, permettant de garantir la sécurité et de maintenir la conformité du produit.

Il est interdit de modifier le fauteuil, au quel cas la garantie ne sera plus valable.

La mauvaise utilisation du fauteuil annulera également les conditions de garantie.

Ne pas exposer le produit en pleine lumière car cela peut entraîner la décoloration partielle des revêtements.

Ne pas démonter les deux roulettes arrières.

Présentation d'usage

L'usage du fauteuil 'COCOON' n'est pas destiné à des personnes désorientées et pour les utilisateurs nécessitant, l'aide et la vigilance d'une tierce personne sont impératives.

Limite de poids

Ce fauteuil releveur ne peut pas être utilisé par des personnes pesant plus de 160 kg et 220 kg pour le COCOON XXL.

2 – MONTAGE

Sortir le fauteuil de son carton d'emballage.

Emboîter le dossier sur la base en suivant les 2 rails de coulissement métalliques, en fixant au parfait enclenchement des 2 parties, jusqu'au 'CLIC'.

Brancher le transformateur au câble électrique du vérin.

Brancher le fil électrique sur le transformateur à l'autre extrémité. Vérifier que toutes les connexions électriques soient bien mises en place.

Brancher le câble d'alimentation sur un réseau électrique conforme aux normes en vigueur et en correspondance avec la tension d'alimentation 220 V.

Montage Porte-revue :

- Ouvrir l'accoudoir,
- Insérer le porte-revue dans l'accotoir en faisant attention à ne pas gêner la fermeture de l'accoudoir (cf. photo ci-dessous).



*Placer votre porte-revue
au centre de l'accotoir
afin de ne pas boucher
l'encoche située à l'avant*



Montage Tablette :

- Mettre le fauteuil 'COCOON' en position releveur,
- Insérer le support métallique de la tablette dans l'ouverture prévue à cet effet (cf. photo ci-dessous),
- Poser le plateau sur ce support.

Si vous souhaitez changer la tablette de côté, ôter le bouchon noir obstruant l'ouverture et installer votre support de tablette.



*Ouverture pour
installation du
support de tablette*



Utilisation de la télécommande

Télécommande sécurisée et réversible

- Chute de celle-ci impossible grâce à son placement sous le coussin d'accoudoir.
- Fonction 'Stop & Start' : Arrêt automatique en position 'Assis'.
- Appuyer à nouveau sur le même bouton pour passer en position 'Releveur'.



Pour le COCOON 1 moteur et XXL

Télécommande deux boutons

Bouton VERT : Inclinaison arrière du fauteuil avec élévation du repose jambes

Bouton BLANC : Remise du fauteuil en position assise avec abaissement du repose-jambes puis après une deuxième pression sur le bouton passage en position releveur. Une double pression sur le bouton BLANC permet une levée automatique du fauteuil. Si vous voulez la stopper à tout moment, appuyer sur l'un des deux boutons.



Pour le COCOON 2 moteurs

Télécommande quatre boutons

Bouton BLEU : Elévation du repose-jambes

Bouton JAUNE : Abaissement du repose-jambes

Bouton VERT : Inclinaison arrière du fauteuil avec élévation du repose jambes

Bouton BLANC : Remise du fauteuil en position assise avec abaissement du repose-jambes puis après une deuxième pression sur le bouton passage en position releveur.

Les deux télécommandes sont verrouillables :

- Appuyer 10 secondes sur les deux boutons (Blanc et Vert)

La télécommande est verrouillée

- Appuyer à nouveau 10 secondes sur les deux boutons (Blanc et Vert) :

La télécommande est déverrouillée

TRES IMPORTANT

Lors du branchement de votre fauteuil sur le secteur,
NE PAS APPUYER sur les boutons de la télécommande.


Si toutefois, une coupure de courant ou autre, mettrait votre télécommande en mode « sécurité » (bloquée), veuillez réinitialiser la télécommande en effectuant un cycle complet d'inclinaison du fauteuil : de l'avant relevé jusqu'à l'inclinaison arrière complète ou débrancher votre fauteuil durant 60 secondes.

Vérifier systématiquement que rien ne puisse être bloqué ou être dissimulé sous la mécanique avant chaque cycle d'utilisation. La mécanique du fauteuil pourrait provoquer de réelles blessures, soyez très vigilant avec les enfants en bas âge ou les animaux de compagnie.

Composition du COCOON

Votre COCOON est composé des éléments ci-dessous :

- 1 – Un dossier
- 2 – Une couette de dossier amovible/lavable
- 3 – Une assise
- 4 – Une couette assise / repose-jambes amovible / lavable
- 5 – Un repose-jambes
- 6 – Deux accoudoirs escamotables / amovibles
- 7 – Coussin de confort réducteur d'assise
- 8 – Deux accotoirs
- 9 – Télécommande

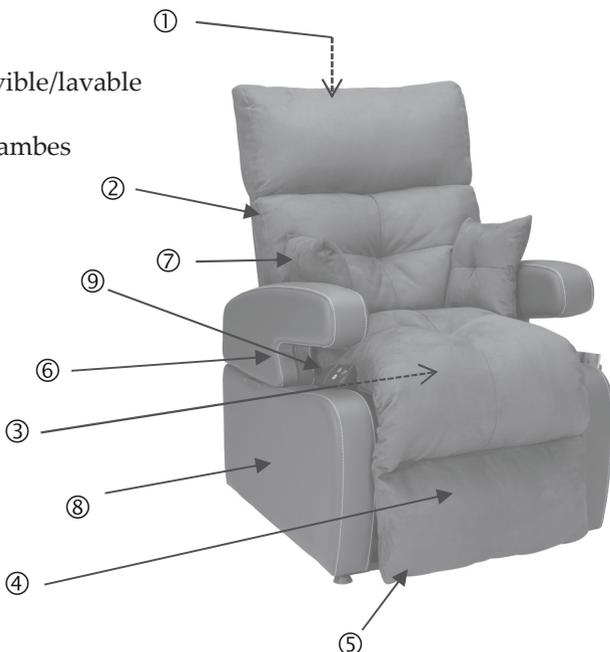

Accessoires :


Il est possible d'avoir les accessoires suivants en option :

- Tablette (réversible G/D)



- Porte-revues (réversible G/D)

- Kit d'accès soulève-patient (sauf modèle XXL)

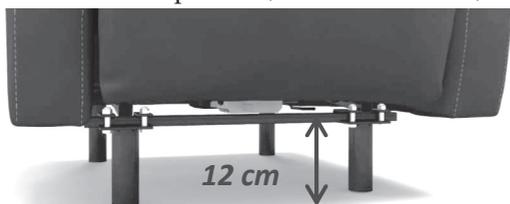

- Kit mobilité (sauf modèle XXL)

Changement des modules de couettes pour lavage ou remplacement.

Couette dossier :

- Enlever le velcro du rabat de la housse situé sur le dos du dossier
- Descendre les 2 zip droit et gauche de la couette

Couette assise / repose-jambes:

Enlever les velcros situés au fond, à droite et à gauche de l'assise.

Tous les modules peuvent être lavés en machine à 30° C.

Nous vous conseillons de placer ces couettes lors de leur lavage, dans un filet à linge ou une taie d'oreiller, afin de préserver leur aspect d'origine.

Changement de dossier:

Il est possible de modifier la profondeur d'assise de votre fauteuil en remplaçant le dossier par un autre.

- Tirer sur le « CLIP » puis sortir le dossier de sa base en suivant les 2 rails de coulissement métalliques,
- Emboîter le nouveau dossier sur la base en suivant les 2 rails de coulissement métalliques, en fixant au parfait enclenchement des 2 parties jusqu'au « CLIC ».

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids maxi utilisateur	160 kg	CE
Revêtements	PVC/PU : Réglisse, Pistache, Framboise, Citron conforme aux normes 1021-2 - Rapport d'essai n° 367160735 Polyester (velours) : Marron, Gris perle et Gris chiné conforme aux normes 1021-2 – Rapport d'essai n° 18.04333.01 & n° 18.03363.01 PU : Chocolat, Taupe conforme aux normes M2 – Rapport d'essai n° 2002-45	
Garniture des couettes	Fibre creuse siliconée	

PROTOCOLE DE NETTOYAGE **POUR LES REVETEMENTS DU 'COCOON' :**

- Tous les détergents, solvants et détachants du commerce, ne figurant pas dans le NF collectivités, sont à **PROSCRIRE IMPERATIVEMENT** ;
- Les tâches d'encre de stylos à bille, demandent un nettoyage immédiat afin d'éviter la migration dans le tissu enduit et devenir ainsi définitives.

Garanties

- Vérin électrique : 5 ans
- Mécanique : 2 ans avec possibilité d'extension de garantie de 3 ans supplémentaires.
- Fauteuil répondant aux normes CEM/EMF (Marquage CE) EN 55014-1 EN55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 62233 Rapport Essai COFRAC



***Venez découvrir le fauteuil Cocoon
sur notre site www.innov-sa.com***