

# MANUEL D'INSTRUCTIONS



## ROLLATOR NEO SUPPORT Réf 826242

Ce manuel présente les instructions de la version à poignées classiques. La version Néo Support à appuis anté-brachiaux est identique. Les parties spécifiques sont décrites en fin du manuel.

**Pour votre sécurité, merci de lire ce manuel d'instruction avant toute utilisation du rollator.**

*(Vers. Mai 2019)*

## **ROLLATOR NEO SUPPORT**

Le Rollator Néo Support est conçu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur avec un cadre en aluminium léger et des roues de diamètre 20 cm pour un fonctionnement facile sur les surfaces lisses. Les poignées moulées avec freins à toucher souple sont idéales pour les personnes ayant une force ou une mobilité limitée. La hauteur de la poignée peut facilement être réglée, avec une dimension allant de 80cm à 93cm.

Ce produit est vendu avec son sac amovible qui peut être utilisé avec ou sans bandoulière.

Il peut également avoir un porte canne optionnel.

Grâce à son mécanisme compact, le rollator néo support peut se transporter et se ranger très facilement.

### **SOMMAIRE**

<b><u>Généralités et Précautions</u></b>	<b><u>page 3</u></b>
<b><u>Installation</u></b>	<b><u>page 4-5</u></b>
<b><u>Fonctionnement</u></b>	<b><u>page 5</u></b>
<b><u>Transport et rangement</u></b>	<b><u>page 6</u></b>
<b><u>Sécurité et entretien</u></b>	<b><u>page 8</u></b>
<b><u>Nettoyage</u></b>	<b><u>page 9</u></b>
<b><u>Données techniques</u></b>	<b><u>page 10</u></b>
<b><u>Garanties</u></b>	<b><u>page 10</u></b>

*(Vers. Mai 2019)*

## GENERALITES

### Contenu de la boîte et inspection :

Retirez soigneusement tous les composants de la boîte et vérifiez les articles dans la liste ci-dessous. Tout composant endommagé ou manquant doit être signalé à votre revendeur ou fabricant agréé. Avant toute utilisation, retirez tout emballage en plastique et vérifiez que le rollator ne présente aucun dommage en accordant une attention particulière aux roues, aux poignées au châssis au siège, au dossier et vérifiez les vis ou écrous manquants ou desserrés.

### Précautions particulières de sécurité - Vérifications préalables

- Assurez-vous que le Rollator est bien déplié et verrouillé avant l'utilisation.
- Contrôler les freins avant utilisation.
- Assurez-vous que toutes les pièces soient bien verrouillées et que les pièces amovibles soient en bon état de fonctionnement.

### Précautions particulières de sécurité - Pendant l'utilisation

- Toujours s'installer sur l'assise lorsque le Rollator est immobile et freins bloqués.
- Le rollator est une aide à la marche. Ce n'est pas un fauteuil roulant. Il n'a pas été conçu pour transporter une personne assise dessus. Un tel usage risque d'endommager les roues et la structure même du rollator. Celui-ci pourrait en être fragilisé et ne plus répondre à ses caractéristiques mécaniques lors des futurs usages.
- N'utilisez pas le rollator pour marcher en arrière.
- Veillez à faire attention lors de la montée des trottoirs ou lorsque vous empruntez des surfaces inclinées, inégales ou glissantes. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque important de chute ou de blessure.
- N'effectuez aucun réglage sur le rollator pendant qu'il est en cours d'utilisation.
- Faire preuve de prudence en cas de charge importante dans le panier (charge max 5Kg)
- Toutes les roues doivent toujours être en contact avec le sol.
- Lorsque le rollator est en position stationnaire, les freins doivent rester verrouillés.
- Ne dépassez pas la limite maximale de poids de 136Kg.
- N'utilisez pas le rollator dans un escalier ou sur un escalator.
- N'essayez pas de pousser le rollator lorsque quelqu'un est assis dans le siège.
- N'utilisez pas le siège pour transporter des objets.
- Ne pas utiliser le siège sans le dossier.
- Ne pas s'asseoir sur le siège lorsque le rollator est dans une pente.
- Utilisez uniquement les accessoires et les pièces fournies par le fabricant.
- Les charges ne doivent être transportées que dans le panier. N'accrocher pas des objets lourds au rollator car cela pourrait affecter sa stabilité.

### **Le carton comprend les éléments suivants :**

- 1 rollator
- 1 sacoche
- 1 bandoulière




*(Vers. Mai 2019)*

## INSTALLATION

### Déplier le Rollator

Retirer le revêtement protecteur des quatre roues.  
Retirer le carton entre les roues arrière et les loquets de frein.  
Placez le déambulateur sur une surface stable.  
Déplier en écartant le cadre tout en poussant vers le bas en vous assurant que chaque attache se verrouille correctement.

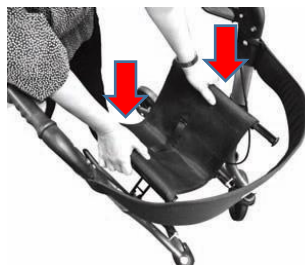

### Régler la hauteur des poignées

Réglez la hauteur des poignées en appuyant sur le bouton de réglage et en faisant glisser le tube vers le haut ou vers le bas. La hauteur s'adaptera un trou par un trou.  
Assurez-vous que les deux poignées soient réglées à la même hauteur.



### **Hauteur de poignée idéale**

Une série de trous sont placés tous les 2.5 le long du tube de poignée. Ils permettent d'ajuster la hauteur de poignée en fonction de l'utilisateur. La hauteur idéale de la poignée est réglée lorsque le haut de la poignée est aligné avec le poignet de l'utilisateur.



*(Vers. Mai 2019)*

## INSTALLATION suite

### Attacher la sacoche

Fixez les boucles latérales du sac dans les poignées du rollator.



### Vérifier le freinage

Vérifiez que les câbles de frein sont en marche à l'extérieur du cadre et ajustez les guide-câbles pour stocker les câbles soigneusement contre le cadre.


Assurez-vous que les freins fonctionnent correctement avant d'utiliser le rollator.

## FONCTIONNEMENT

### Utilisation du déambulateur

Lors de l'utilisation du rollator pour se déplacer, il est recommandé de placer les deux mains fermement sur les poignées, avec les doigts enroulés autour des leviers de frein afin que le marcheur puisse s'arrêter immédiatement en cas d'urgence.

La technique de marche idéale est de pousser le marcheur vers l'avant à une longueur de bras confortable.

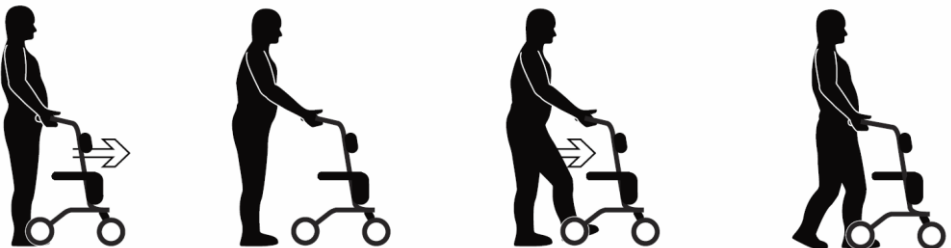

*(Vers. Mai 2019)*

### Utilisation des freins

Pour arrêter le rollator, serrer délicatement les 2 leviers de frein jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement.

### Verrouillage des freins (fonction frein de stationnement)

Lors de l'utilisation du rollator comme siège d'appoint, les freins doivent être verrouillés.

Pour bloquer les freins, appuyez sur les leviers de frein jusqu'à ce qu'ils cliquent. Toujours vérifier que le verrouillage des freins est activé avant de s'asseoir sur le siège.

Pour débloquer le frein, tirez sur le levier du frein jusqu'à ce que le verrouillage se débraye. Ne relâchez jamais le verrouillage du frein en position assise sur le siège.



Freins en marche



Freins de stationnement en marche

### Utilisation en siège d'appoint

Avant d'utiliser le rollator comme siège d'appoint assurez-vous qu'il soit stationné sur une surface plane et sécuritaire. Avant de vous asseoir, verrouillez les **deux leviers de frein** afin d'éviter toute blessure éventuelle.

## TRANSPORT ET RANGEMENT

### Enlever la sacoche

Pour enlever la sacoche, détacher les boucles latérales.



(Vers. Mai 2019)

### Plier le rollator

Pour replier le rollator, tirez fermement sur la sangle située sur le siège. Cela désengagera les accolades latérales et effondrer le cadre. Poussez le cadre ensemble pour un pli compact.



### **En version Néo Support à appui Anté-brachiaux**



Après avoir déplié le rollator, attachez la ceinture avant l'utilisation. Assurez-vous que la ceinture est tendue et serrée.

Lorsque que vous devez plier le rollator, vous devez desserrer la ceinture.

*(Vers. Mai 2019)*

## SECURITE ET ENTRETIEN

### **Précautions générales de sécurité**

N'utilisez pas le rollator pour transporter une personne assise.

Une évaluation des risques doit toujours être effectuée pour s'assurer que le produit fonctionne correctement.

>> Avant utilisation, l'utilisateur doit lire ces instructions. Assurez-vous que tous les Composants soient correctement et solidement installés.

>> Assurez-vous que l'utilisateur dispose d'une force suffisante pour manœuvrer et contrôler le rollator et les freins.

>> Avant de vous asseoir, assurez-vous que les freins sont fermement verrouillés.

Ne pas relâcher les freins tant que l'utilisateur n'est pas debout.

>> Ne pas dépasser la charge maximale.

>> Évitez de ranger le rollator dans des pièces exposées au soleil ou très chaudes car cela peut causer des blessures à la peau.

>> Ne placez pas plus de 4,5 kg dans la sacoche.

>> Lorsque vous êtes assis, n'essayez pas d'atteindre des objets en vous penchant vers l'avant. Ne vous penchez pas en arrière car cela peut faire basculer le rollator.

>> Utiliser uniquement sur des sentiers ou des allées. Ne pas utiliser sur les routes, les rues ou les autoroutes.

>> N'utilisez pas le déambulateur sur une pente supérieure à 9 degrés, ou sur une pente mouillée, glacée ou enneigée.

>> Soyez prudent lorsque vous traversez les bordures ou les obstacles car cela pourrait faire basculer le rollator ce qui pourrait causer des lésions corporelles ou des dommages au déambulateur.

### **Maintenance régulière**

Une inspection par un professionnel est recommandée au moins une fois par an.

Tout service ou réparation, en particulier des freins, doit être effectuée par un professionnel. Toute réparation non autorisée peut annuler votre garantie.

>> Vérifiez régulièrement le rollator en accordant une attention particulière au fonctionnement des freins et des roues. Si les roues du rollator sont endommagées de quelque façon que ce soit, arrêtez l'utilisation immédiatement et contactez votre le revendeur agréé ou le fabricant.

>> Vérifier que les poignées ne soient pas tordues.

>> Vérifier que les leviers de frein soient solides et s'ils sont lâches ils doivent être remplacés avant utilisation.

>> Vérifier l'efficacité du système de freinage. Si vous remarquez une sensation de freinage inconnue ou de toute anomalie, cesser d'utiliser le rollator immédiatement et contactez votre le revendeur agréé ou le fabricant.

>> Vérifier que toutes les vis et les écrous soient solidement installés.

## NETTOYAGE

Attention ! N'utilisez pas de nettoyeurs haute pression, de nettoyeurs à vapeur ou de produits chimiques corrosifs pour le nettoyage.

*(Vers. Mai 2019)*



<p><b>CADRE</b>  Essuyez le cadre du rollator avec un chiffon humide.  Pour une saleté plus tenace, utiliser une solution détergente douce jusqu'à 40 ° C. Bien sécher avant utilisation pour éviter la corrosion.  Nettoyez les roues à l'aide d'une brosse humide avec des poils en plastique (n'utilisez pas de brosse métallique ou vous risquez d'endommager le revêtement caoutchouté ou peint).</p>	<p><b>SACOCHE ET ASSISE</b>  Nettoyer régulièrement les matériaux de rembourrage avec une solution détergente douce jusqu'à 40 ° C, ou laver à l'alcool désinfectants si nécessaire.  Bien sécher avant utilisation.</p>
--	--

## DONNEES TECHNIQUES

Couleur	Métal gris
Poids	6.6 kg
Hauteur poignées	108.5 > 121 cm
Largeur x Profondeur hors tout	61.5 cm x 70 cm
Assise : Hauteur x Largeur x Profondeur	54 cm x 46 cm x 25 cm
Largeur une fois replié	28 cm
Roues	Diamètre 20 cm
Cadre	Aluminium
Charge maximale	136 kg

## GARANTIE

### **Garantie**

Dans le cadre de nos conditions générales de vente, nous garantissons notre rollator durant 1 an. La garantie ne pourra être exercée en cas d'utilisation inadaptée, mauvais entretien, ou en cas de modification apportée au rollator.

L'échange ou le remplacement des composants doit toujours être réalisé par un revendeur agréé. Le non-respect du manuel d'instructions entraînera aussi une exclusion de la garantie.

### **Changement de propriétaire**

Le rollator peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du rollator, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le rollator devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

Fabriqué en PRC – Importé par ADYS : 330, allée des Hêtres 69760 Limonest France

*(Vers. Mai 2019)*

**IDENTITES** – ZA Pôle 49, Boulevard de la Chanterie – 49124 St Barthélémy d'Anjou  
Tél. 02 41 96 18 48 – [www.identites.eu](http://www.identites.eu)