




**POUSSETTE TROTTER
824002**

Manuel de l'utilisateur

Caractéristiques



1. Blocage des roues
2. Roues arrières
3. Roues avant
4. Mécanisme de pliage
5. Barre de poussée
6. Repose-pieds
7. Harnais 5 points
8. Lanière velcro de fermeture

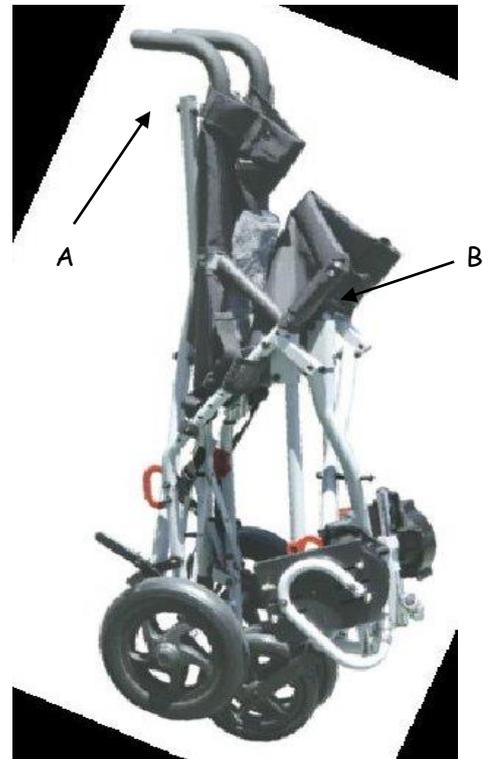

Dépliage

1. Détachez la lanière velcro de fermeture
2. Placez la poussette en position debout, une main sur la barre de poussée (A) et avec l'autre, poussez sur l'assise (B) vers le bas
3. Appuyez sur l'assise jusqu'à la mettre à plat
4. Appuyez avec le pied sur la barre de verrouillage jusqu'à ce qu'elle soit droite (Fig. 2)

Instructions de montage

Note :

Avant d'asseoir un enfant dans la poussette, bien s'assurer qu'elle est bien sécurisée et que les freins de blocage des roues sont mis



Fig. 2

Blocage des roues (Fig. 3)

1. Afin de bloquer les roues, abaissez simultanément le levier (A) des 2 roues sur les pneus.
2. Pour enlever le blocage, poussez les leviers vers l'avant avec le pied.



Fig. 3

Repose-pieds

1. Au plus bas, les repose-pieds devront être positionnés au moins à 5 cm au-dessus du sol.
2. Ne pas faire porter de poids sur le repose-pieds
3. Ne jamais soulever la poussette par les repose-pieds.



Fig. 4

Pliage (Fig. 3)

1. Afin de bloquer les roues, abaissez simultanément le levier (A) des 2 roues sur les pneus.
2. Pour enlever le blocage, poussez les leviers vers l'avant avec le pied.
3. Faites pivoter les repose-pieds vers l'extérieur
4. Soulever le centre de l'assise doucement
5. Tenez avec la main une des barres de poussée (C) en tirant l'assise vers vous
6. Attachez la lanière de verrouillage et cliquez-la.

Réglage de la profondeur du siège

1. Déterminez la profondeur souhaitée.
2. Pour modifier la profondeur, détachez la lanière Velcro® qui solidarise la partie dossier de la partie assise. (Fig. 4A)
3. Allégez la tension du tissu en pliant partiellement la poussette.
4. Appuyer sur le bouton poussoir situé sur le côté de l'assise (Fig. 5A) et faites glisser l'assise jusqu'au trou désiré (8, 9 ou 10) jusqu'à ce que le bouton poussoir ne se replace en position de blocage. Voir le tableau de mesures.
5. Répétez l'opération de l'autre côté de l'assise.
6. Ré-attachez la partie assise à la partie dossier.

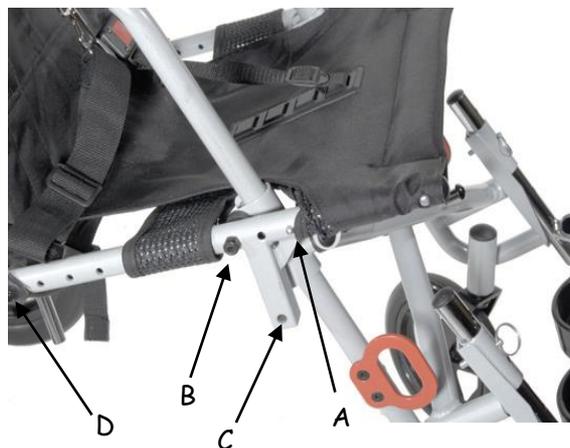


Fig. 5

Tableau de mesures

		Modèle 30 cm	Modèle 35 cm	Modèle 40 cm	Modèle 45 cm
		Profondeur assise (trou 8/9/10)			
Assise 15°	Angle dossier 85°	14,5/15,5/16,5	16,0/17,0/18,0	16,5/17,5/18,5	17,5/18,5/19,5
Assise 15°	Angle dossier 90°	13,5/14,5/15,5	15,0/16,0/17,0	15,5/16,5/17,5	16,5/17,5/18,5
Assise 15°	Angle dossier 95°	12,5/13,5/14,5	14,0/15,0/16,0	14,5/15,5/16,5	15,5/16,5/17,5
Assise 22°	Angle dossier 85°	12,5/13,5/14,5	14,0/15,0/16,0	14,5/15,5/16,5	15,5/16,5/17,5
Assise 22°	Angle dossier 90°	11,5/12,5/13,5	13,0/14,0/15,0	13,5/14,5/15,5	15,0/16,0/17,0
Assise 22°	Angle dossier 95°	10,5/11,5/12,5	12,0/13,0/14,0	13,0/14,0/15,0	14,0/15,0/16,0
	Largeur poussette	23	25	27	29
	Hauteur dossier	22,2	21,3	23,6	23,4

Fig. 6



Fig. 7

Réglage du harnais en H

1. Installez l'utilisateur dans la poussette et positionnez correctement les épaules.
2. Attachez la boucle pelvienne dans la position adéquate.
3. Connectez les 2 ceintures latérales à la boucle pelvienne.
4. Régler les sangles d'épaule grâce à l'outil Fig. 6A.
5. Pour régler la hauteur du point d'attache du harnais, dévissez les écrous derrière le dossier et ré-insérez la vis (Fig. 7). Revissez les écrous.


Réglage des repose-pieds

Régler et enlever les repose-pieds :

1. Retirez la goupille de verrouillage (Fig 8A).
2. Faites coulisser le tube vers le haut ou le bas pour trouver la hauteur souhaitée.
3. Alignez les trous et remplacez la goupille en place.



Fig. 8

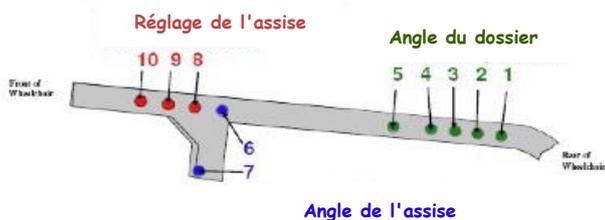

Réglage de l'angle du dossier et de l'assise

Angle de l'assise :

1. Localisez l'emplacement du réglage d'angle (Fig. 5B).

2. Dévissez et enlevez les écrous des deux côtés du siège. Choisissez l'emplacement des écrous en position Fig. 5B ou Fig. 5C.

Reportez-vous au tableau de mesures.

3. Revissez fermement les écrous.

Attention : la modification de l'angle de l'assise modifie l'angle du dossier

Angle du dossier :

1. Pour régler l'angle du dossier en fonction de l'assise, consultez le tableau de mesures.

2. Dévissez et enlevez les écrous (Fig. 4A et Fig. 5D) des deux côtés du siège et replacez-les à la position désirée dans le rail.

3. Revissez fermement les écrous.

Attention : la modification de l'angle du dossier modifie la profondeur de l'assise

Réglage de l'amplitude des repose-pieds :

1. Enlevez les repose-pieds en retirant les goupilles (Fig. 8A).
2. Enlevez les 2 vis des pattes de coulissements de chaque côté (Fig. 9A).
3. Installez la patte de coulissement côté haut ou côté bas.
3. Remplacez les 2 vis de chaque côté.



Fig. 9

Réglage de la profondeur des repose-pieds :

1. Dévissez les deux fixations sur le plateau des repose-pieds (Fig. 12A).
2. Faites glisser le plateau dans la position désirée.
3. Revissez les deux fixations.



Fig. 12

Modification de la hauteur par inversion des plateaux :

1. Enlevez les repose-pieds en retirant les goupilles (Fig. 8A).
2. Enlevez la vis et retirez la partie peinte (Fig. 10A).
3. Inversez cette partie dans l'autre sens (Fig. 11).
3. Remplacez la vis de serrage (Fig. 10A).

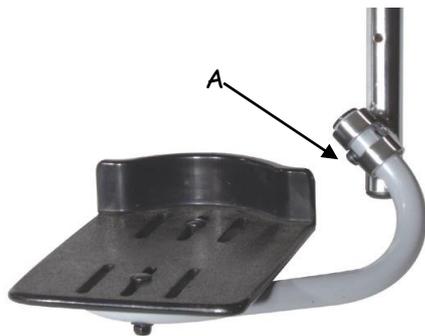


Fig. 10



Fig. 11

Réglage en profondeur de la boucle pelvienne

1. Déterminez la profondeur appropriée à l'utilisateur.
2. Enlevez la sangle de la boucle (Fig. 13A).
3. Insérez la boucle dans l'espace souhaité.
4. Ré-insérez la sangle dans la boucle.

Fig. 13

