

# NOTICE D'UTILISATION

## RAMPES ALUMINIUM

S'applique pour les rampes IDENTITES ci-après :

		
<p>Paires de Rampes télescopiques Ergo + 825042 - 825043</p>	<p>Paires de Rampes Télescopiques Ergo 825040 – 825041 - 825051</p>	<p>Paires de Rampes Extra Large 825001 – 825002 - 825003</p>

		
<p>Rampe Ergo Easy Pliable 825049</p>	<p>Rampes Valises pliables ergo 825044 – 825045 – 825046 – 825047 - 825048</p>	<p>Rampes Ergo Easy Renforcées 825017 - 825018</p>

		
<p>Plan Incliné Réglable 825081</p>		

Avant installation, s'assurer que les surfaces d'appui sont plates, suffisamment grandes, stables et non glissantes.

Lors de l'installation, s'assurer que les extrémités de la rampe appuient sur toutes leurs surfaces et qu'aucun objet ne vienne perturber l'appui de la rampe.

La rampe d'accès doit présenter une pente inférieure ou égale à 5 %.



**Pente maxi = 5%, soit 5 cm de hauteur par longueur de 1m.**

**Ex: une rampe de 1,80 m permet le passage d'une hauteur maxi de 9 cm**

*Dans les espaces publics, il est toléré une pente supérieure à 5 % : 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 mètres ou 12 % sur une longueur inférieure à 0.50 mètre.*

Les rampes valises et/ou pliables doivent toujours être utilisées dépliées.

Les rampes télescopiques peuvent s'utiliser partiellement déployées. S'assurer du bon verrouillage après l'installation et à chaque utilisation.

Ne jamais dépasser la charge maximum supportée par la rampe : 300 kg (pour les paires de rampes : 150 kg par rampe)

Vérifier le bon état de la rampe avant chaque mise en place.