

Manuel d'utilisation

Objet : Appareil de pressothérapie 6 cellules

Modèle : PREMIUM 6



Document No.: UM-Q80B0 (Dec.20,2018_Rev.9)

Table des matières

1. Informations générales.....	3
1.1 Caractéristiques techniques	3
1.2 Classification	3
1.3 Population de patients visée	3
1.4 Partie du corps pouvant être traité ou type de tissu pouvant entrer en contact avec l'appareil :..	3
1.5 Utilisateur prévu.....	4
1.6 Environnement utilisateur	4
1.7 Fonctions principales.....	4
1.8 Domaines d'application	5
2. Précautions	5
Indications.....	5
3. Descriptif du produit	9
3.1 Caractéristiques techniques	9
3.2 Composition.....	9
4. Mise en marche.....	10
4.1 Branchement au secteur	10
4.2 Branchement / installation des bottes et tubulures	11
5. Utilisation.....	11
5.1 Explication	11
5.2 Mise en route	12
6. Information générale	16
7. Fin d'utilisation	17
8. Maintenance.....	17
9. Disfonctionnements possibles et actions à mener :.....	18
10. Etiquetage	20
10.1 Identification	20
10.2 Type BF Applied Part	20
GARANTIE	21

1. Informations générales

1.1 Caractéristiques techniques

Désignation	Appareil de pressothérapie 6 cellules
Modèle	PREMIUM 6
Marque	Winelec®
Dimensions	44 X 33 X 18 (cm)
Voltage	220-230V~, 50/60Hz
Consommation	120VA
Réglage minuterie	0-99 minutes
Pression maximale	235mmHg±20%
Poids unité centrale	7.5 kg

1.2 Classification

Classification	
Type de protection contre les chocs électriques	Classe II a
Degré de protection contre les chocs électriques	Type BF appliqué 
Degré de protection contre la pénétration d'eau	IP21
Degré de sécurité appliqué en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux	Equipement non adapté
Mode de fonctionnement	Non continu (temps d'activation: 99 min, temps d'arrêt: 10 min)

1.3 Population de patients visée

- a) Age: 18 ans et plus
- b) Poids : 40 kg et plus
- c) Etat de santé : interdit aux personnes mentionnées dans les contre-indications de ce manuel
- d) Type d'utilisateurs :
 - UTILISATEUR AUTORISE : alerte et mentalement compétent

1.4 Partie du corps pouvant être traité ou type de tissu pouvant entrer en contact avec l'appareil :

- a) Partie du corps : jambe, bras ou taille
- b) Type de tissu : peau

1.5 Utilisateur prévu

a) Niveau d'instruction requis :

- qualification médicale (infirmier, médecin, kinésithérapeute...)

c) Compétence linguistique :

- français lu et compris couramment (langue de ce manuel)

d) Troubles tolérés :

- léger trouble de la vision corrigée au log MAR 0,2 (6/10 ou 20/32)
- audition altérée de 40% entraînant 60% d'audition normale entre 500 Hz et 2 kHz

1.6 Environnement utilisateur

a) Environnement

- en milieu médical et en intérieur uniquement
- se référer aux conditions environnementales de la partie « mise en garde »

b) Fréquence d'utilisation

- 30 min max. par séance sans excéder 3 séances par jour.

c) Mobilité :

- appareil portable

1.7 Fonctions principales

Actions utilisateur	Principales fonctions
Connecter / déconnecter les accessoires	Connecter les accessoires à l'unité principale avant utilisation
	Déconnecter les accessoires après utilisation
Enfiler ou enlever les accessoires	Avant utilisation
	Après utilisation
Eteindre ou allumer l'appareil	Allumer l'appareil
	Eteindre l'appareil
Régler l'appareil	Sélectionner le mode (A1, A2, B, C1, C2, C3, D1, D2, E1, ou E2), l'intervalle (0~60 seconds), le temps de compression (0~15 seconds), le temps de traitement (0~99 minutes), et la pression (0~200mmHg: A1, A2, B, E1, ou E2; 0~130mmHg: C1, C2, C3, D1, ou D2) incluant la réinitialisation, et la sauvegarde.
Comprendre les données écran	Lire & comprendre l'affichage

Manipuler l'appareil	Utiliser le bouton Marche/arrêt en standby et en marche.
Arrêt d'urgence	Activer l'arrêt d'urgence en cas d'inconfort lors du traitement.
Bouton de réinitialisation	Revenir aux paramètres d'usines (mode A1)
Bouton de sauvegarde	Sauvegarder les paramètres en cours
Nettoyage	Nettoyer l'unité centrale et les accessoires
Déplacement	Déplacer l'unité centrale
Stockage	Stocker l'appareil inutilisé

1.8 Domaines d'application

L'utilisation de l'appareil est prévue pour des professionnels, dans le traitement des pathologies suivantes :

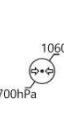
- ① Lymphœdème primaire
- ② Œdème à la suite d'un choc ou d'une blessure
- ③ Œdème suite à une immobilisation
- ④ Insuffisance veineuse
- ⑤ Lymphœdème

Premium 6 est un compresseur d'air visant à drainer et à stimuler la circulation des fluides et prévenir l'apparition de caillots.

2. Précautions

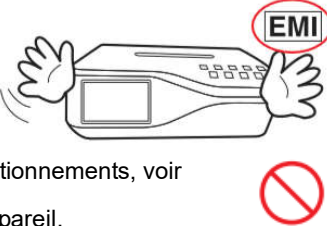
Les mises en garde symbolisées ci-dessous ont pour but de prévenir tout dommage physique et matériel et de garantir la sécurité de l'utilisateur.

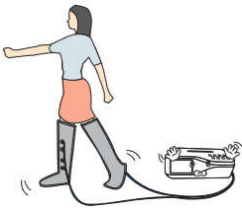
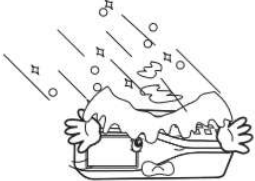
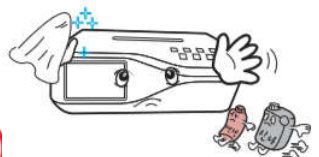
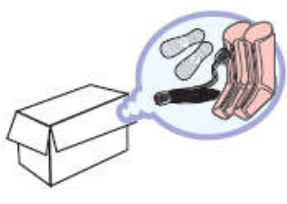
Indications

	Fabricant		Numéro de série		Avertissement
	Date de fabrication		Lire les instructions		Instructions
	Température ambiante		Humidité ambiante		Pression atmosphérique ambiante
	Interdiction de s'asseoir		Interdiction générale		Garder au sec
	Interdiction de marcher		Ne pas démonter		Type BF

	Autorisé dans la Communauté Européenne		Débrancher le cordon d'alimentation		2 niveaux d'isolation (Class II)
	Soumis aux normes MDD 93/42/EEC		Signe d'obligation		Signe d'avertissement
	Ne pas jeter d'équipements électroniques (y compris les accessoires marqués avec ce symbole)				

	L'irritation cutanée de la partie en contact (avec les accessoires) a été évaluée par des tests de biocompatibilité conformément à la norme ISO 10993. Une exposition de longue durée, supérieure à 24 heures, n'a cependant pas été évaluée.
	Bien vérifier les antécédents d'allergie du patient concernant le matériau en nylon des bottes, manchon, ceinture. Si le patient est allergique, consulter un spécialiste.
	AVERTISSEMENT : pour éviter tout risque de choc électrique, cet équipement ne doit être connecté qu'à un réseau d'alimentation avec terre de protection.
	Contre-indications Ne pas utiliser dans les cas pathologiques suivants : • Implant médical électronique (cœur artificiel) • Œdème pulmonaire, maladie cardiaque, cancer, pathologies veineuses ou circulatoires, hypertension artérielle ou en présence de température. • Maladies de peau, brûlure cutanée, dermatite, escarre, plaie purulente, tumeur maligne,...etc. • Post chirurgie cutanée (ex. greffe de peau) • Pathologie circulatoire telle que durcissement artériel, angine de poitrine, infarctus, etc.... • Présence présumée de caillots sanguins • Malformations extrêmes • Après une opération des varices • En récupération post-opératoire, chez les femmes enceintes et les enfants • En cas de douleur après l'utilisation.

Les femmes enceintes ou en période menstruelle doivent consulter un médecin avant utilisation. Ne jamais utiliser en même temps que d'autres appareils médicaux tels que appareils de survie artificielle, ou électrocardiographes. Ne pas utiliser en cas d'hypertension ou de problèmes circulatoires. 	Ne pas utiliser en cas d'inflammation, d'infection, de douleurs d'origine ou d'écoulements sanguins (interne ou externe) dans la région traitée. 
Ne pas poser d'objet lourd sur le câble d'alimentation, et ne pas le passer sous le pied d'une table ou d'une chaise ou tout autre meuble. 	Ne jamais mettre l'appareil au contact de l'eau : c'est un appareil électrique. 
Toujours avoir les mains bien sèches lors du branchement et débranchement de l'appareil (risque de décharge électrique, de court-circuit ou d'incendie). 	Vérifier le voltage requis avant utilisation de l'appareil. 
Toujours porter une tenue adaptée pour éviter le contact direct des bottes et accessoires avec la peau. 	En cas de douleurs pendant l'utilisation, stopper immédiatement le traitement. 
Ne jamais faire tomber l'appareil et éviter toute sorte de vibration ou de choc. 	pas utiliser à d'autres fins que le massage. Garder hors de portée des nourrissons et des enfants. 
Ne pas utiliser dans une pièce avec des ondes magnétiques. Ces ondes pourraient causer des dysfonctionnements, voir même une panne de votre appareil. 	Ne jamais placer les accessoires à proximité d'objets contondants tels que des aiguilles ou des ciseaux ou de sources de chaleur telles qu'un four. 
Ne pas exposer à l'eau et plus généralement à l'humidité. 	Si l'appareil montre un/des dysfonctionnement(s), ne pas essayer d'ouvrir, réparer, ou de démonter l'unité centrale. (risque d'incendie, de décharge électrique, ou de blessure pour l'utilisateur.) 

Ne jamais se déplacer lorsque vous portez les bottes.  	Les séances avec cet appareil ne doivent jamais excéder 30 minutes. Commencer par 5 minutes puis augmenter progressivement la durée en fonction de votre forme physique. Une utilisation intensive et prolongée pourrait avoir des effets contraires et néfastes.  
Si l'appareil n'a pas été utilisé depuis longtemps et/ou s'il est utilisé à température froide, il peut montrer des signes de dysfonctionnement.  	Garder le produit hors de portée des rayons du soleil ou de toute émission de chaleur (chauffage, cuisinière, cheminée)  
Lorsque vous nettoyez l'appareil, ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents.  	Ne pas jeter sur la voie publique ou avec les déchets ménagers  
Utiliser une prise exclusive d'alimentation. Ne pas utiliser de multiprises au risque de choc électrique, d'incendie et même de blessures.  	Ne pas plier ni tordre les tubulures et le câble d'alimentation.  
Ne pas stocker à très basse température en hiver  	Ne pas laver les bottes/manchon/ceinture en machine. Ne pas les immerger dans l'eau non plus. Essuyer doucement avec chiffon humide. Si nécessaire, employer un produit de nettoyage doux. (non détergent).  
Ranger et stocker l'appareil et ses accessoires dans son carton d'origine s'il ne doit pas servir pendant une période prolongée.  	L'utilisation d'autres accessoires que ceux fournis par le fabricant peut causer des dysfonctionnements. 

3. Descriptif du produit

3.1 Caractéristiques techniques

Cet appareil a deux sorties d'air (A et B) et un accessoire peut être branché dans chaque sortie, soit deux accessoires simultanément.

Si vous n'utilisez qu'un seul accessoire, vous devez bloquer la 2ème sortie d'air avec un « STOP AIR JACK » comme sur la photo ci-dessous :



3.2 Composition

Unité centrale et câble d'alimentation



Unité centrale



Câble alimentation

Accessoires standard



Bouton arrêt
d'urgence



Tubulure double



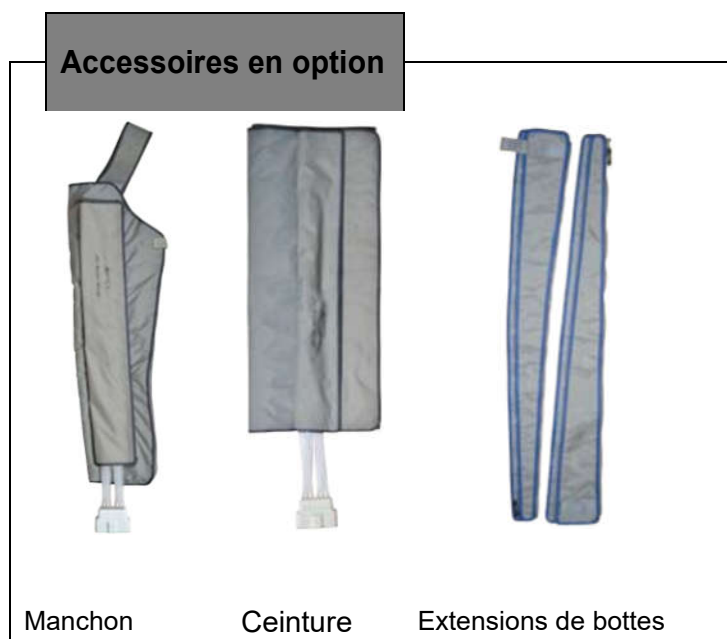
Tubulure simple



Semelles

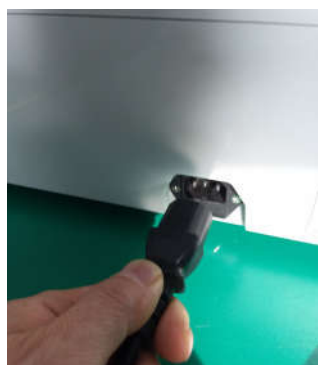


STOP AIR JACK



4. Mise en marche

4.1 Branchement au secteur



L'appareil est livré réglé en usine pour la tension secteur appropriée du pays dans lequel il est expédié. La tension secteur est indiquée sur l'étiquette apposée sous l'appareil.

L'appareil est équipé d'un câble d'alimentation : une extrémité pour la connexion sur le côté droit de l'appareil, l'autre extrémité pour la connexion à la prise murale, conforme à la puissance nominale indiquée.

	Le câble d'alimentation est amovible : se branche et se débranche de l'appareil (unité centrale)
	L'utilisation d'un autre câble d'alimentation que celui fourni par le fabricant peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
	Temps nécessaire au dispositif pour passer de la température de stockage minimale à 20 ° C: 1 heure
	Temps nécessaire au dispositif pour passer de la température de stockage maximale à 20 ° C: 1 heure

4.2 Branchement / installation des bottes et tubulures

- ❶ Sélectionner les accessoires désirés (bottes, manchon, ceinture).
- ❷ Enfiler l'accessoire lorsqu'il est correctement connecté à sa tubulure.
- ❸ Brancher la tubulure à l'accessoire puis brancher la tubulure à l'unité centrale.
 - Utiliser les bottes sur des jambes dépliées uniquement.
 - La ceinture peut être utilisée sur le fessier et les hanches, jamais au niveau du thorax.
- ❹ Brancher ensuite l'accessoire à l'appareil.



Branchement unité centrale



Branchement à la tubulure



L'utilisation d'autres accessoires et tubulures que ceux fournis et recommandés par le fabricant peut entraîner un dysfonctionnement de votre appareil.

5. Utilisation

5.1 Explication



No.	Bouton	Explication
1	MODE	Sélectionner un Mode. A ₁ ,A ₂ -B-C ₁ ,C ₂ ,C ₃ -D ₁ ,D ₂ - E ₁ ,E ₂
2	INTERVAL	Après chaque cycle, il est possible de choisir un temps de repos. Sélectionner un temps de repos (0 ~ 60 secondes).
3	PRESSURE TIME	Sélectionner un temps de pression. (0 ~ 15 secondes).

4	TIME	15 minutes est le temps paramétré par défaut. Vous pouvez l'ajuster de 0 à 99 minutes.
5	PRESSURE	La valeur de la pression est de (1) 0~200 mmHg : A1,A2,B,E1,E2 (2) 0~130 mmHg : C1,C2,C3,D1,D2 - Elle peut être ajustée sur chaque cellule - Elle peut être ajustée par échelons de 10 mmHg
6	START / STOP	Ce bouton permet d'allumer et éteindre l'appareil.
7	MENU	Activer une fonction comme sur l'image ci-dessus. Il permet de naviguer entre les différentes fonctions.
8	MOVE	-Modifier les paramètres de chaque cellule, PRESSURE (niveau de pression) ou PRESSURE TIME (durée de pression). -Quand vous utilisez le bouton MOVE, le numéro de chaque cellule s'affiche à l'écran INTERVAL
9	SET	Est utilisé pour ajuster la valeur de chaque fonction
10	SAVE	Sauvegarder un paramètre, comme sur l'image ci-dessus. Rester le doigt appuyé sur SAVE pendant 5 secondes.
11	RESET	Réinitialiser les paramètres. Rester le doigt appuyé sur RESET pendant 5 secondes.

5.2 Mise en route

Fonctions

① 10 Programmes

L'appareil propose 10 types (MODE) de compression différents.

(A1, A2, B, C1, C2, C3, D1, D2, E1, E2).

L'utilisateur peut sélectionner le programme adapté au patient.

② La pression / shuntage

Pour shunter l'une des cellules, il suffit de paramétrer la pression de cette cellule sur 0mmHg.

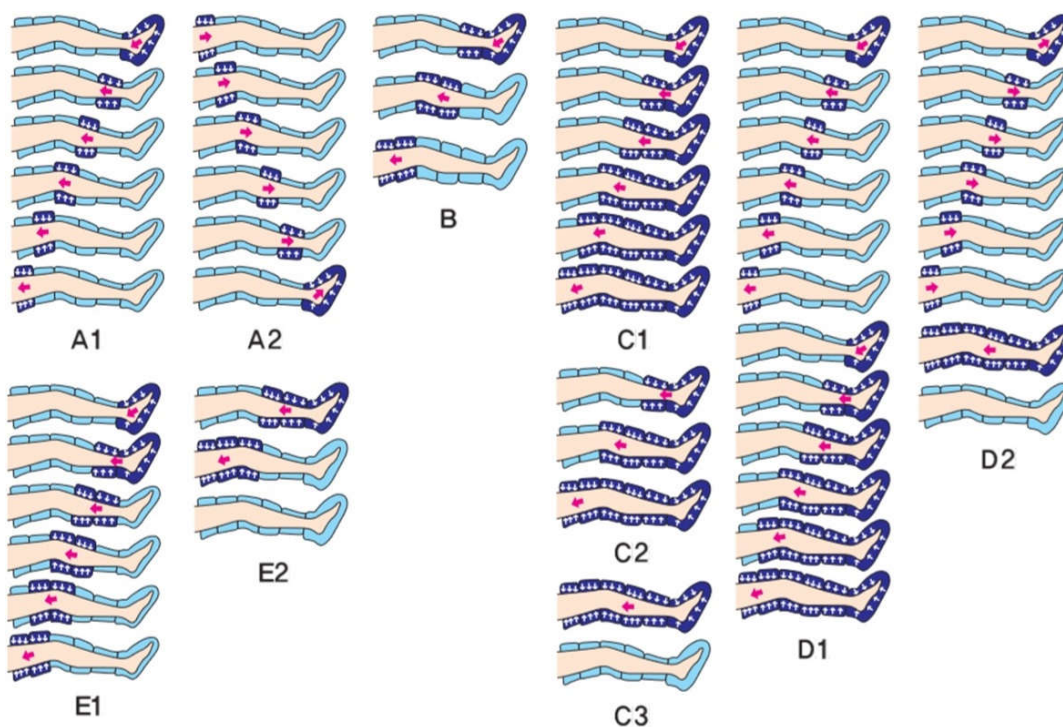
③ Pression personnalisée par cellule

La pression de chaque cellule peut être fixée individuellement entre 0 et 200mmHg ou 0 et 130mmHg en fonction du programme sélectionné.

④ Arrêt d'urgence

En cas d'inconfort, presser le bouton d'arrêt d'urgence.

Mode



Sélectionner le MODE

A l'allumage, le mode (A1) est sélectionné par défaut. Pour en changer :

- ❶ Appuyer sur le bouton MENU
- ❷ Aller sur le menu MODE
- ❸ Appuyer sur le bouton SET (flèche du haut ou flèche du bas) pour paramétrer sélectionner MODE.
- ❹ A l'arrêt des clignotements, le mode est sélectionné.
- ❺ Changer les autres fonctions en utilisant le bouton MENU après avoir paramétré le MODE.

Paramétrer l'INTERVAL (0~60 secondes)

- ❶ A l'aide du bouton MENU sélectionner INTERVAL sur l'écran
- ❷ Une fois que INTERVAL clignote à l'écran, vous pouvez augmenter ou diminuer le temps de repos en utilisant les touches SET UP et SET DOWN
- ❸ Appuyer sur le bouton SET (flèche du haut ou flèche du bas) pour paramétrer sélectionner "Interval time".
- ❹ Le temps est paramétré à l'arrêt du clignotement.
- ❺ Changer les autres fonctions en utilisant le bouton MENU après avoir paramétré l'INTERVAL.

Paramétrer le PRESSURE TIME (0~15 secondes) de 6 cellules à la fois

- ❶ Appuyer sur le bouton MENU
- ❷ Aller sur le curseur PRESSURE TIME en utilisant le bouton MENU (Toutes les cellules clignotent en même temps)
- ❸ Appuyer sur le bouton SET (flèche du haut ou flèche du bas) pour paramétrer sélectionner "PRESSURE TIME".
- ❹ A l'arrêt du clignotement, le PRESSURE TIME est paramétré.
- ❺ Changer les autres fonctions en utilisant le bouton MENU après avoir paramétré PRESSURE TIME.

Paramétrer le PRESSURE TIME (0~15 secondes) de chaque cellule séparément selon le mode choisit.

- ❶ Appuyer sur le bouton MENU
- ❷ Aller sur le curseur PRESSURE TIME en utilisant le bouton MENU : toutes les cellules clignotent en même temps
- ❸ Appuyer sur le bouton MOVE (flèche du haut ou flèche du bas) pour sélectionner une cellule (le numéro de cellule est affiché dans Interval)
- ❹ Appuyer sur le bouton SET (haut ou bas) pour valider le PRESSURE TIME.
- ❺ Si la lettre voulue clignote, cela signifie que le PRESSURE TIME a été validé correctement
- ❻ Passer aux autres fonctions grâce au bouton MENU

Paramétrer le TIME (0~ 99 Minutes)

- ❶ Appuyer sur le bouton MENU
- ❷ Aller sur le curseur TIME en utilisant le bouton MENU
- ❸ Appuyer sur le bouton SET (flèche du haut ou flèche du bas) pour paramétrer l'OPERATING TIME
- ❹ Si la lettre clignote, l'OPERATING TIME est paramétré.
- ❺ Changer les autres fonctions en utilisant le bouton MENU après avoir paramétré l'OPERATING TIME.

Paramétrer le PRESSURE de 6 cellules en même temps

- ❶ Appuyer sur le bouton MENU
- ❷ Aller sur le curseur PRESSURE en utilisant le bouton MENU (Toutes les cellules clignotent en même temps)
- ❸ Appuyer sur le bouton SET (flèche du haut ou flèche du bas) pour paramétrer PRESSURE
- ❹ Si la lettre clignote, PRESSURE est paramétré.
- ❺ Changer les autres fonctions en utilisant le bouton MENU après avoir paramétré PRESSURE

*Si l'utilisateur veut shunter une cellule, il peut le faire en réglant la pression de cette cellule à 0.

*** Pression maximale de chaque mode - 1) 0~200 mmHg: A1, A2, B, E1, E2 - 2) 0~130 mmHg: C1, C2, C3, D1, D2

Paramétrer le **PRESSURE** de chaque cellule

- ❶ Appuyer sur le bouton MENU
 - ❷ Aller sur le curseur **PRESSURE** en utilisant le bouton MENU
- Toutes les cellules clignotent en même temps
- ❸ Appuyer sur le bouton MOVE (flèche du haut ou flèche du bas) pour paramétrer la cellule sélectionnée
 - ❹ Le numéro de chaque cellule est visible dans **INTERVAL**
 - ❺ Appuyer sur le bouton SET (flèche du haut ou flèche du bas) pour paramétrer **PRESSURE**
 - ❻ Si la lettre clignote, **PRESSURE** est paramétré.
 - ❼ Changer les autres fonctions en utilisant le bouton MENU après avoir paramétré **PRESSURE**.
- *Si l'utilisateur veut shunter une cellule, il peut le faire en réglant la pression de cette cellule à 0.

*** Pression maximale de chaque mode

- 1) 0~200 mmHg: A1, A2, B, E1, E2
- 2) 0~130 mmHg: C1, C2, C3, D1, D2

Paramétrer le **RESET**

Cette fonction permet de revenir aux programmes initiaux du compresseur. Paramètres usine.

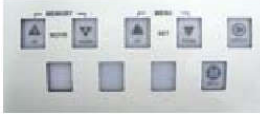
- ❶ Appuyer sur le bouton RESET (flèche du haut ou flèche du bas) pendant 5 secondes. Touche Down avec le triangle pointe en bas ayant en son milieu la lettre R.
- ❷ "A1" mode est visible dans la fenêtre LCD.

Utiliser **SAVE**

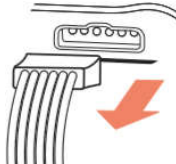
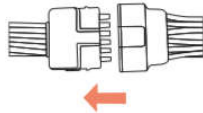
Cette fonction permet d'enregistrer les modifications d'un programme préétabli.

- ❶ Avant d'utiliser la fonction **SAVE**, paramétrer les valeurs.
 - ❷ Après le clignotement, la fonction **SAVE** fonctionne.
- ❶ Si vous attendez 10 secondes, le curseur arrêtera de clignoter.
 - ❷ Si vous appuyer sur le bouton Menu pendant 3 secondes, le clignotement du curseur s'arrêtera.
- Appuyer sur **START** pour un faire mettre l'appareil en route ou appuyer sur **STOP**, la sauvegarde sera prise en compte.

6. Information générale

① Brancher l'appareil à la prise de courant. - Vérifier la tension avant toute utilisation.	
② Allumer l'appareil. - Appuyer sur le bouton « ON ». Le voyant vert s'allume.	
③ Réglages du menu Pour utiliser une valeur de réglage, appuyer sur (Démarrer) le bouton Start. Si vous voulez changer la valeur de réglage, vous pouvez régler une valeur de réglage à l'aide de MENU, MOVE, SET. Après avoir réglé la valeur de la fonction, appuyer simplement sur le bouton Start. Pour enregistrer une valeur de réglage, appuyer simplement sur le bouton SAVE, 5 secondes après que le curseur arrête de clignoter. Appuyer sur une touche MENU, 3 secondes, le curseur est fixé.	
④ Régler le mode à utiliser. Le mode A1 est un mode de réglage initial d'usine.	
⑤ Interrupteur d'urgence Pour ne pas endommager l'appareil et/ou en cas d'urgence, vous disposez d'un interrupteur d'arrêt d'urgence. Si un problème survient en cours de séance, appuyer simplement sur l'interrupteur : l'appareil s'éteint immédiatement.	
⑥ Appuyer sur le bouton " Start / Stop" à la fin du traitement : l'appareil s'arrête automatiquement.	

7. Fin d'utilisation

Une fois l'opération terminée, éteindre en appuyant sur le bouton ON/OFF, puis débrancher la prise du secteur	
 Débrancher la tubulure de l'unité centrale Ce faisant, bien tirer sur la prise et non sur le tuyau	
Déconnecter ensuite la tubulure de l'accessoire.	
Pour un rangement de stockage, remettre soigneusement toujours votre appareil et ses accessoires dans leur emballage d'origine.	

8. Maintenance

	Ce dispositif ne doit jamais être modifié sans l'autorisation expresse du fabricant ou distributeur agréé.
	En cas d'intervention sur l'appareil, une inspection et des tests appropriés doivent être effectués pour garantir une utilisation sûre et continue.
	Mise à disposition possible sur demande de schémas de circuits, de composants, de descriptions ou autres informations en support à votre SERVICE TECHNIQUE uniquement selon une liste de pièces qui sont désignées comme réparables par vos services.
	Pour vérifier ou remplacer les fusibles, contacter le distributeur ou le fabricant.
	Les bottes, manchons, ceintures ne doivent pas être réparées.
	Ne pas placer les accessoires près d'objets tranchants tels que des lames, des aiguilles, des ciseaux, etc.
	Garder l'appareil dans un endroit sec, sans eau ni humidité
	Ne pas laver les bottes, ceintures, manchons en machine et ne jamais les plonger dans l'eau.

	Ne pas stocker l'appareil à une température trop basse en hiver. [Cela peut l'endommager.]
	Pour un rangement à longue durée, placer l'appareil et ses accessoires dans leur carton d'emballage.
	Pour stocker l'appareil pour une période prolongée, le ranger dans son emballage d'origine.
	Nettoyage Lors du nettoyage, essuyer l'unité centrale avec un chiffon sec, sans aucune substance chimique ou détergent. Ces produits peuvent provoquer des dommages externes, tels que décoloration et / ou abrasion. Les bottes peuvent être délicatement essuyées avec une serviette ou un chiffon humide. Si nécessaire, un détergent doux peut être utilisé.
	Conditions environnementales 1 En utilisation - Température : de + 5 ° C à + 40 ° C; - Humidité relative : de 15% à 90%, sans condensation, sans pression partielle de vapeur d'eau supérieure à 50hPa; - Pression atmosphérique : de 700hPa à 1060hPa. - Usage à domicile ainsi que professionnel et en intérieur uniquement 2 Transport / Stockage - -25 ° C à + 5 ° C, - +5 ° C à + 35 ° C à une humidité relative jusqu'à 90%, sans condensation ; -> 35 ° C à 70 ° C à une pression de vapeur d'eau jusqu'à 50hPa

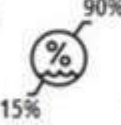
9. Disfonctionnements possibles et actions à mener :

Problème	Action à mener
L'appareil ne démarre pas	• Vérifier si l'appareil est branché au secteur • Appuyer sur le bouton marche • Vérifier qu'il n'y a pas de problème sur le câble (vérifier le voltage électrique). • Vérifiez que le minuteur est réglé sur le temps souhaité
Un bruit de fuite d'air	• Vérifier l'état des tubulures et des accessoires branchés. • Vérifier que la tubulure est branchée à l'appareil. • Vérifier que la tubulure ne soit pas pliée ou obstruée

L'air ne circule pas dans les accessoires ou absence de pression	•Vérifier que la tubulure est branchée à l'appareil. •Vérifier que la tubulure ne soit pas pliée ou obstruée par un objet. •Vérifier chaque branchement de connecteur de tubulure sur l'accessoire en utilisation (ils doivent être enclenchés avec un bruit sec)
L'air continue de pénétrer dans les bottes et un bruit de fuite d'air est émis	•Localiser la fuite d'air sur les bottes, manchon ou ceinture. S'il n'y a pas de fuite, couper l'alimentation, puis remettre sous tension et vérifier que cela fonctionne correctement. (les accessoires et leurs connecteurs sont des produits d'usure.)
La pression est trop forte ou gêne le patient	•Réduire la pression à l'aide du bouton de réglage. •Couper l'alimentation puis débrancher la tubulure de l'appareil pour dégonfler l'accessoire.

10. Etiquetage

10.1 Identification

 1984	Compressible Limb and Circulation Therapy System		
	Modèle	PREMIUM 6	
Tension d'alimentation	220-230~	Fréquence	50/60Hz
Consommation	120VA	Pression maximale	200mmHg +/-20%
 			
    			
     			
 Wonjin Mulsan Co., Ltd. Incheon, Korea			
 CMC Medical Devices & Drugs S.L. C/Horacio Lengo N 18, CP 29006, Málaga, Spain			

Le numéro de série est affiché sous l'unité centrale et sur le carton d'emballage.

10.2 Type BF Applied Part



Le type BF de l'appareil est affiché près de la sortie d'air de l'unité centrale

GARANTIE

Désignation	Appareil de pressothérapie 6 cellules	Modèle	PREMIUM 6
Date d'achat		N° de série	
Distributeur		Durée de garantie	Unité centrale : 2 ans Accessoires (produits d'usure) : 3 mois
Le cycle de vie estimé de l'appareil est de 6 ANS basé sur la durée de vie du compresseur qui est la plus courte.			

Service après-vente

Wonjin Mulsan Co., Ltd., est fabricant de ce produit dans le respect d'un processus strict de gestion de la qualité et d'inspection.

Services facturés

Sera facturée, y compris en période de garantie, toute réparation due à la négligence ou à la mauvaise manipulation de l'utilisateur (si aucun défaut de qualité n'est détecté). Notamment dans les cas suivants :

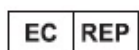
- ※ Utilisation dans de mauvaises conditions de capacité électrique (puissance/ voltage).
- ※ Chute de l'appareil
- ※ Utilisation d'accessoires et périphériques non recommandés ou fournis par le fabricant / distributeur
- ※ Intervention sur l'appareil par un tiers non autorisé / agréé
- ※ Utilisation de l'appareil dans un environnement proscrit par ce manuel (en extérieur, à proximité d'une source de chaleur, ou à basse température ...)
- ※ E cas de non-respect des consignes d'utilisation du présent manuel (manuel à lire attentivement et à conserver.)

Autres cas :

- ※ En cas de catastrophes naturelles (incendie, tempêtes, inondations, tonnerre, foudre, tremblement de terre, etc.....)
- ※ En cas de mauvais état des accessoires qui sont de produits d'usure voués à être remplacés si endommagés
- ※ Si l'utilisateur a mal branché ou mal installé son appareil
- ※ Si des anomalies de fonctionnement n'ont pas été signalées par l'utilisateur



Distributeur :
SAS SISSEL France
44220 COUERON
www.sisselpro.fr



CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo N18, CP29006, Malaga,
Espagne



Wonjin
Incheon, Korea