



## Enfile-bas de contention Easy




### Enfile-bas de contention Easy

*Easy compression stocking aid  
Pone medias de compresión Easy*




#### Enfile-bas adapté aux bas ou chaussettes de contention jusqu'à la classe 4

*Designed for compression socks and stockings  
Pone medias adaptado a los medias o calcetines*

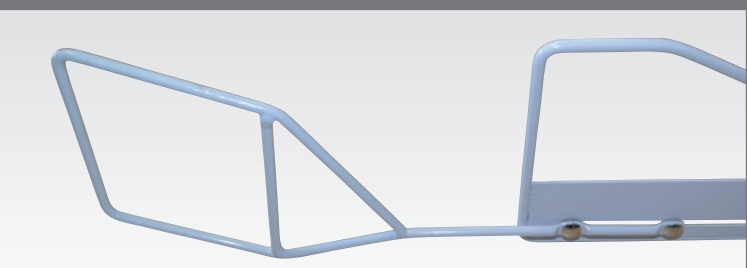

2 poignées coulissantes utiles pour enfile le bas sur toute la jambe, rétractables pour un rangement plus facile  
*2 sliding handles useful for pulling stocking and retractable for easy storage*  
2 asas deslizantes para ponerse las medias, retractiles por un mejor almacenamiento

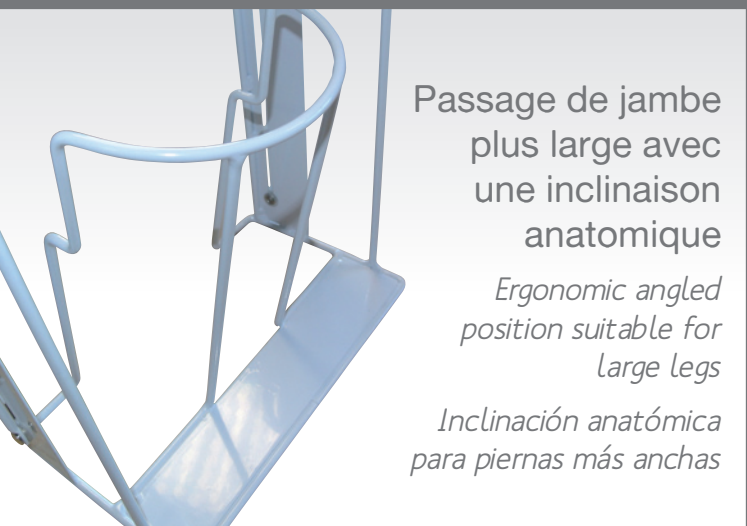


Passage de jambe plus large avec une inclinaison anatomique  
*Ergonomic angled position suitable for large legs*  
Inclinación anatómica para piernas más anchas



Renfort utile pour maintenir des bas de classe 4  
*Sturdy frame for compression stocking*  
Refuerzo útil para mantener medias de compresión



3 7 6 0 2 2 3 8 3 1 3 2 0

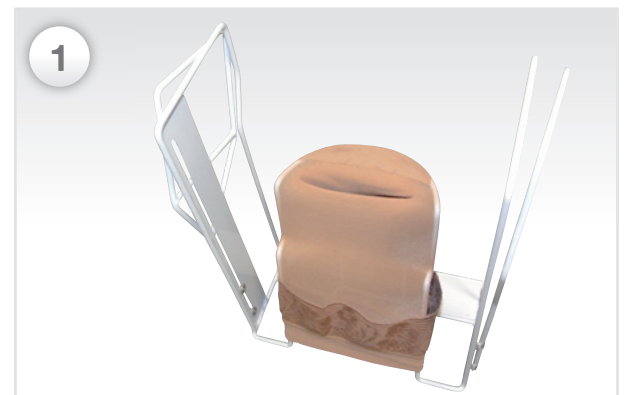

1 Enfiler préalablement le bas sur l'enfile-bas Easy



2 Glisser le pied à l'intérieur



3 Tirer l'enfile-bas Easy vers le haut en utilisant les poignées



4 Placer le reste du bas sur le haut de la jambe



### Enfile-bas de contention Easy



Enfile-bas adapté aux bas ou chaussettes de contention jusqu'à la classe 4