



FRANÇAIS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR

L'utilisateur visé doit être un professionnel de la santé agréé, le patient, le soignant du patient ou un membre de la famille apportant une assistance.
L'utilisateur doit être capable de lire, de comprendre et être physiquement capable d'exécuter toutes les instructions, mises en garde et précautions fournies dans les consignes d'utilisation.

UTILISATION/INDICATIONS

- Soutien et compression après une blessure au coude et une arthrose légère du coude
- Stimulation proprioceptive et neuromusculaire par compression (pour un meilleur équilibre et pour faciliter les mouvements)
- Prévention des blessures
- Entorses ou foulures du coude
- Épicondylite médiale ou latérale (p. Ex. tennis elbow, golf elbow)
- Tendinopathies

Caractéristiques de performance :

Procure une légère compression du membre ou du segment corporel grâce à une construction élastique.

Conçu pour restreindre le mouvement grâce à une conception élastique ou semi-rigide.
Protection légère d'un membre ou d'un segment du corps pour les soins aigus et prophylactiques

CONTRE-INDICATIONS

- Si vous souffrez de maladies / blessures cutanées dans la partie concernée du corps, le produit ne doit être ajusté et porté qu'après avoir consulté un professionnel de la santé.
- Toute allergie connue au matériau du dispositif médical.
- Maladies artérielles périphériques
- Troubles de la circulation sanguine dans la jambe (par exemple, en cas de diabète sucré).
- Altération du drainage lymphatique ou gonflement des tissus mous d'origine inconnue.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Le produit est destiné à un usage unique par patient.

Le produit est conçu pour être porté directement sur la peau.

Le produit ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes et doit être retiré pendant les périodes de repos.

Ne pas appliquer de lotions ou de pommades sur la partie du corps concernée pendant l'utilisation du dispositif.

En cas de douleur, de gonflement, de changement au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un médecin.

Manipulez avec soin : évitez d'attacher la fermeture du crochet de la sangle sur la partie tricotée, car elle peut endommager l'apparence du produit lorsque la sangle est retirée.

Note: Contactez le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave résultant de l'utilisation de ce dispositif.

INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE EN PLACE

1) Pour faciliter la mise en place du support, rabattez la partie supérieure du support vers l'extérieur.

2) Saisissez le support près des coussins et tirez-le sur le coude.

3) Ajustez le support si nécessaire.

Assurez-vous que le trou du coussin latéral (extérieur) est placé sur l'épicondyle latéral (proéminence osseuse sur le côté extérieur du coude) et que le coussin médial (intérieur) est placé sur l'épicondyle médial (proéminence osseuse sur le côté intérieur du coude).

4) Remettez la partie supérieure du support dans sa position d'origine.

5) Pour une compression supplémentaire, fixez le crochet de la sangle amovible à la boucle du support. Serrez la sangle autour de l'avant-bras en vous assurant qu'elle ne comprime pas le bras. La sangle doit être desserrée ou retirée immédiatement en cas de picotement, décoloration, gonflement ou engourdissement.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Lavable en machine en cycle délicat (max 40 ° C) avec un détergent doux.

Les parties auto-agrippantes doivent être fermées pour le lavage afin d'éviter tout dommage.

Ne pas utiliser d'eau de javel. Rincer soigneusement. Séchage à l'air libre. Ne pas sécher en machine. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

COMPOSITION

Élasthane, Polyamide, Coton, Polyester, Polyoléfine, Mousse SBR, Polyuréthane, Polyuréthane thermoplastique, Élastomère, Polypropylène



NON FABRIQUÉ AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

GARANTIE DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires pour les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de six mois à compter de la date de vente. Dans la mesure où les termes de cette garantie sont incompatibles avec les réglementations locales, les dispositions de ces réglementations locales s'appliqueront.

AVIS - BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

DJO France SAS
3, rue de Bether
64990 Mouguerre
FRANCE

DJO, LLC
1430 Decision Street
Visa CA 92081-8553
USA
www.DJOGlobal.com

MDS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany



DONJOY®

DonJoy CondiLax™

