



FRANÇAIS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR

L'utilisateur visé doit être un professionnel de la santé agréé, le patient, le soignant du patient ou un membre de la famille apportant une assistance.

L'utilisateur doit être capable de lire, de comprendre et être physiquement capable d'exécuter toutes les instructions, mises en garde et précautions fournies dans les consignes d'utilisation.

UTILISATION/INDICATIONS

- Soutien et compression après une blessure à la cheville aiguë et chronique et une arthrose légère de la cheville et du pied
- Stimulation proprioceptive et neuromusculaire par compression (pour un meilleur équilibre et pour faciliter les mouvements)
- Prévention des blessures
- Entorses et foulures de cheville légères (grade I)
- Légère instabilité de la cheville

Procure une forte compression (20 à 36 mmHg, norme française ASQUAL) du membre ou du segment corporel grâce à une conception élastique.

Conçue pour restreindre le mouvement grâce à une conception élastique et semi-rigide.

Assure une protection légère à un membre ou une partie du corps pour des soins aigus et prophylactiques.

CONTRE-INDICATIONS

- Si vous souffrez de maladies / blessures cutanées dans la partie concernée du corps, le produit ne doit être ajusté et porté qu'après avoir consulté un professionnel de la santé.
- Toute allergie connue au matériau du dispositif médical.
- Maladies artérielles périphériques
- Troubles de la circulation sanguine dans la jambe (par exemple, en cas de diabète sucré).
- Altération du drainage lymphatique ou gonflement des tissus mous d'origine inconnue.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Le produit est destiné à un usage unique par patient.

Chaque première utilisation doit être faite de préférence sous la surveillance d'un professionnel de la santé.

Le produit est conçu pour être porté directement sur la peau.

Le produit ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes et doit être retiré pendant les longues périodes de repos.

Ne pas appliquer de lotions ou de pommades sur la partie du corps concernée pendant l'utilisation du dispositif.

En cas de douleur, de gonflement, de changement au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un médecin.

Manipulez avec soin : évitez d'attacher la fermeture du crochet de la sangle sur la partie tricotée, car elle peut endommager l'apparence du produit lorsque la sangle est retirée.

Note: Contactez le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave résultant de l'utilisation de ce dispositif.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- 1) Enfilez le support de cheville comme une chaussette.
- 2) Ajustez le support si nécessaire.
Le talon doit être correctement installé dans le support et les coussinets doivent être situés derrière les malléoles.
- 3) Fixez le crochet circulaire de la sangle au cercle de velours correspondant sur le support de la cheville (zone du cou de pied).
Lorsque vous fixez le crochet circulaire, placez la sangle du côté opposé au ligament blessé. (c'est-à-dire vers le côté extérieur du pied pour les blessures du ligament médial ou « interne ») ou vers le côté intérieur du pied pour les blessures du ligament latéral ou « externe »)
- 4) Passez la sangle sous le pied, puis enroulez la sangle sur le cou-de-pied.
- 5) Enveloppez à nouveau le pied.
- 6) Amenez la sangle en diagonale sur le dessus du pied et en arrière autour de la cheville.
- 7) Entourez la cheville si nécessaire.
- 8) Fixez la languette auto-agrippante (avec le logo DonJoy) à la sangle.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Lavable en machine (max 40°C) avec un détergent doux.

Les parties auto-agrippantes doivent être fermées pour le lavage.

Ne pas utiliser d'eau de javel. Rincer soigneusement. Séchage à l'air libre. Ne pas sécher en machine. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

COMPOSITION

Élasthanne, Polyamide, Coton, Polyester, Polyoléfine, Mousse SBR, Polyuréthane, Polyuréthane thermoplastique, Élastomère, Polypropylène



NON FABRIQUÉ AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

GARANTIE DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires pour les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de six mois à compter de la date de vente.

Dans la mesure où les termes de cette garantie sont incompatibles avec les réglementations locales, les dispositions de ces réglementations locales s'appliqueront.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

DJO France SAS
3, rue de Belthar
64990 Mouguerre
FRANCE

DJO LLC
1430 Decision Street
Vista CA 92081-8553
USA
www.DJOGlobal.com

MDSG GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany



DONJOY®

DonJoy StrapiLax™

Ankle/Cheville

