


1

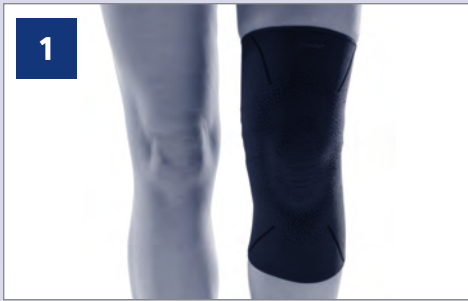

FRANÇAIS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR

- L'utilisateur visé doit être un professionnel de la santé agréé, le patient, le soignant du patient ou un membre de la famille apportant une assistance.
- L'utilisateur doit être capable de lire, de comprendre et être physiquement capable d'exécuter toutes les instructions, mises en garde et précautions fournies dans les consignes d'utilisation.

UTILISATION/INDICATIONS

- Soutien et compression après lésion aiguë ou chronique du genou et arthrose légère du genou
 - Stimulation proprioceptive et neuromusculaire par compression (pour un meilleur équilibre et pour faciliter les mouvements)
 - Prévention des blessures
- Procure une forte compression (20 à 36 mmHg, norme française ASQUAL) du membre ou du segment corporel grâce à une conception élastique.
Conçue pour restreindre le mouvement grâce à une conception élastique et semi-rigide.
Assure une protection légère à un membre ou une partie du corps pour des soins aigus et prophylactiques

CONTRE-INDICATIONS

- Si vous souffrez de maladies / blessures cutanées dans la partie concernée du corps, le produit ne doit être ajusté et porté qu'après avoir consulté un professionnel de la santé.
- Toute allergie connue au matériau du dispositif médical.
- Maladies artérielles périphériques
- Troubles de la circulation sanguine dans la jambe (par exemple, en cas de diabète sucré).
- Altération du drainage lymphatique ou gonflement des tissus mous d'origine inconnue.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Le produit est destiné à un usage unique par patient.
- Le produit est conçu pour être porté directement sur la peau.
- Le produit ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes et doit être retiré lors des périodes de repos.
- Ne pas appliquer de lotions ou de pommades sur la partie du corps concernée pendant l'utilisation du dispositif.
- En cas de douleur, de gonflement, de changement au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un médecin.

Note: Contactez le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave résultant de l'utilisation de ce dispositif.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- 1) Saisir les bords de la genouillère au niveau de l'ouverture la plus large.
- 2) Tirer la genouillère vers le haut au-dessus du genou comme indiqué sur la photo.
- 3) Ajuster la genouillère si nécessaire.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Lavable en machine (max 40°C) avec un détergent doux.
Ne pas utiliser d'eau de javel. Rincer soigneusement. Séchage à l'air libre en machine. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

COMPOSITION

Elasthane, Polyamide, Polyester, Polyoléfine



FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOL NATUREL

GARANTIE DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou l'unité et de ses accessoires pour les défauts de fabrication pendant une période de six mois à compter de la date de vente. Dans la mesure où les termes de cette garantie sont incompatibles avec les réglementations locales, les termes de ces réglementations locales s'appliqueront.


AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE A UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COUVERTURE, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE COMFORT, DJO, LLC NE GARANTIT PAS LA DURÉE DE VIE DE CE PRODUIT. DJO, LLC NE GARANTIT PAS LA DURÉE DE VIE DE CE PRODUIT. DJO, LLC NE GARANTIT PAS LA DURÉE DE VIE DE CE PRODUIT.

DJO France SAS
64990 Mougères
FRANCE

DJO LLC
1430 Decision Street
Suite CA 92081-8553
USA



MDSG GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany

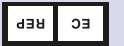

DONJOY®

DonJoy FortiLax™
Knee/Genou