



FRANÇAIS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR

L'utilisateur visé doit être un professionnel de la santé agréé, le patient, le soignant du patient ou un membre de la famille apportant une assistance.

L'utilisateur doit être capable de lire, de comprendre et être physiquement capable d'exécuter toutes les instructions, mises en garde et précautions fournies dans les consignes d'utilisation.

UTILISATION/INDICATIONS

- Soutien et compression après une blessure aiguë et chronique au genou et une arthrose légère du genou
- Stimulation proprioceptive et neuromusculaire par compression (pour un meilleur équilibre et pour faciliter les mouvements)
- Prévention des blessures
- Douleur fémoro-patellaire
- Légère instabilité du genou

Procure une forte compression (20 à 36 mmHg, norme française ASQUAL) du membre ou du segment corporel grâce à une conception élastique.

Conçue pour restreindre le mouvement grâce à une conception élastique et semi-rigide.

Assure une protection légère à un membre ou une partie du corps pour des soins aigus et prophylactiques.

CONTRE-INDICATIONS

- Si vous souffrez de maladies / blessures cutanées dans la partie concernée du corps, le produit ne doit être ajusté et porté qu'après avoir consulté un professionnel de la santé.
- Toute allergie connue au matériau du dispositif médical.
- Maladies artérielles périphériques
- Troubles de la circulation sanguine dans la jambe (par exemple, en cas de diabète sucré).
- Altération du drainage lymphatique ou gonflement des tissus mous d'origine inconnue.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Le produit est destiné à un usage unique par patient.

Le produit est conçu pour être porté directement sur la peau.

Le produit ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes et doit être retiré pendant les longues périodes de repos.

Ne pas appliquer de lotions ou de pommades sur la partie du corps concernée pendant l'utilisation du dispositif.

En cas de douleur, de gonflement, de changement au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un médecin.

Note: Contactez le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave résultant de l'utilisation de ce dispositif.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

1) Saisissez les bords du support au niveau de la plus grande ouverture.

2) Tirez le support de genou sur le genou.

3) Ajustez le support si nécessaire.

Assurez-vous que le coussin circulaire entoure la rotule.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Lavable en machine (max 40°C) avec un détergent doux.

Ne pas utiliser d'eau de javel. Rincer soigneusement. Séchage à l'air libre. Ne pas sécher en machine. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

COMPOSITION

Élasthanne, Polyamide, Coton, Polyester, Polyoléfine, Mousse SBR, Polyuréthane, Élastomère, Acier, Silicone



NON FABRIQUÉ AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

GARANTIE DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires pour les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de six mois à compter de la date de vente.


Dans la mesure où les termes de cette garantie sont incompatibles avec les réglementations locales, les dispositions de ces réglementations locales s'appliqueront.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

DJO France SAS
3, rue de Bethar
64990 Mougères
FRANCE

DJO, LLC
1430 Decision Street
Vista CA 92081-8553
USA
www.djoglobal.com

MDS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany

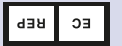

DONJOY®

DonJoy RotuLax™

