



FRANÇAIS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR

L'utilisateur visé doit être un professionnel de la santé agréé, le patient, le soignant du patient ou un membre de la famille apportant une assistance.
L'utilisateur doit être capable de lire, de comprendre et être physiquement capable d'exécuter toutes les instructions, mises en garde et précautions fournies dans les consignes d'utilisation.

UTILISATION/INDICATIONS

- Soutien et compression après une blessure aiguë et chronique au genou et une arthrose légère du genou
 - Stimulation proprioceptive et neuromusculaire par compression (pour un meilleur équilibre et pour faciliter les mouvements)
 - Prévention des blessures
 - Entorses ligamentaires légères (médiales et latérales)
 - Légère instabilité du genou
- Procure une forte compression (20 à 36 mmHg, norme française ASQUAL) du membre ou du segment corporel grâce à une conception élastique.
Conçue pour restreindre le mouvement grâce à une conception élastique et semi-rigide.
Assure une protection légère à un membre ou une partie du corps pour des soins aigus et prophylactiques.

CONTRE-INDICATIONS

- Si vous souffrez de maladies / blessures cutanées dans la partie concernée du corps, le produit ne doit être ajusté et porté qu'après avoir consulté un professionnel de la santé.
- Toute allergie connue au matériau du dispositif médical.
- Maladies artérielles périphériques
- Troubles de la circulation sanguine dans la jambe (par exemple, en cas de diabète sucré).
- Altération du drainage lymphatique ou gonflement des tissus mous d'origine inconnue.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Le produit est destiné à un usage unique par patient.
Chaque première utilisation doit être faite de préférence sous la surveillance d'un professionnel de la santé.
Le produit est conçu pour être porté directement sur la peau.
Le produit ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes et doit être retiré pendant les longues périodes de repos.
Ne pas appliquer de lotions ou de pommades sur la partie du corps concernée pendant l'utilisation du dispositif.
En cas de douleur, de gonflement, de changement au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un médecin.
Manipulez avec soin : évitez d'attacher la fermeture du crochet de la sangle sur la partie tricotée, car elle peut endommager l'apparence du produit lorsque la sangle est retirée.
Note: Contactez le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave résultant de l'utilisation de ce dispositif.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- 1) Saisissez les bords du support au niveau de la plus grande ouverture.
- 2) Tirez le support de genou sur le genou.
- 3) Ajustez le support si nécessaire.
Assurez-vous que le coussin circulaire entoure la rotule.
- 4) Fixez le crochet circulaire de la sangle au cercle de velours correspondant sur le support de genou. Lorsque vous fixez le crochet circulaire, placez la sangle du côté opposé au ligament blessé (c'est-à-dire vers le côté extérieur du genou pour les blessures du ligament médial ou « interne » ou vers le côté intérieur du genou pour les blessures du ligament latéral ou « externe »).
- 5) Enroulez la sangle autour de la jambe.
- 6) Tirez la sangle derrière le genou et la cuisse.
- 7) Enroulez-la autour de la cuisse.
- 8) Tirez la sangle sur le ligament blessé et enroulez-la autour de la jambe (sous le genou).
- 9) Tirez à nouveau la sangle sur le ligament blessé.
- 10) Fixez ensuite la languette auto-agrippante (avec le logo DonJoy) à la sangle elle-même sur la cuisse.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Lavable en machine (max 40°C) avec un détergent doux.
Les parties auto-agrippantes doivent être fermées pour le lavage.
Ne pas utiliser d'eau de javel. Rincer soigneusement. Séchage à l'air libre. Ne pas sécher en machine. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

COMPOSITION

Élasthanne, Polyamide, Coton, Polyester, Polyoléfine, Mousse SBR, Polyuréthane, Polyuréthane thermoplastique, Élastomère, Polypropylène, Acier, Silicone



NON FABRIQUÉ AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

GARANTIE DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires pour les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de six mois à compter de la date de vente.
Dans la mesure où les termes de cette garantie sont incompatibles avec les réglementations locales, les dispositions de ces réglementations locales s'appliqueront.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.



DONJOY®

DonJoy StrapiLax™

Knee/Genou

