



FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION / INDICATIONS

- Contention et compression en cas de déficience ou distention de la paroi abdominale (usage post-opératoire, hernies simples, post-partum).

CONTRE-INDICATIONS

- Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Ce produit est destiné à l'usage d'un seul patient uniquement. En cas de douleur, de gonflement, de changements au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Positionner la ceinture abdominale autour de la taille.
La partie en tissu élastique non strié peut être positionnée :
 - Soit centrée sur l'abdomen
 - Soit à l'emplacement requis pour une ouverture (passage de sonde, cathéter...)
- Tout en maintenant la ceinture en position, tirer sur la patte de fermeture auto-agrippante et la fixer sur la ceinture, à l'endroit le mieux adapté pour la fermeture.
- Ajuster la position de la patte de fermeture auto-agrippante pour obtenir le serrage approprié.

Note : Il est possible d'effectuer une découpe / ouverture dans la partie en tissu élastique non strié (le tissu ne s'effiloche pas) afin d'insérer une sonde ou un cathéter. Le reste de la ceinture (tissu élastique strié) n'est pas découpable.

PATTE HYPOGASTRIQUE AMOVIBLE

Pour un maintien supplémentaire de l'abdomen, utiliser la patte hypogastrique amovible.

Fixer la patte hypogastrique sur la partie médiane de la ceinture abdominale grâce à la partie auto-agrippante.

Tirer sur les 2 extrémités de la patte hypogastrique simultanément, jusqu'au niveau de confort et de maintien souhaités, puis les fixer à la ceinture abdominale grâce aux parties auto-agrippantes.

ENTRETIEN

Laver à l'eau tiède à l'aide d'un détergent doux. Ne pas utiliser d'agent blanchissant. Rincer abondamment. Sécher à l'air libre. Ne pas sécher au sèche linge. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

COMPOSITION

Polyamide, Polyester, PVC, Elasthane, Acier



SANS LATEX

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.