



FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION/INDICATIONS : Instabilités moyennes du LCA, LCM ou LCL.

CONTRE-INDICATIONS : Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS : En cas de douleur, de gonflement, de désensibilisation ou de toute autre réaction inhabituelle lors de l'utilisation de ce produit, consulter immédiatement un médecin.

INFORMATIONS CONCERNANT L'UTILISATION :

- 1) Tout en s'asseyant sur le bord de la chaise, passer la jambe dans l'orthèse. Plier le genou à 45°, placer l'orthèse comme illustré à la Figure 1, centrer l'articulation à environ 2,54 cm au-dessus de la rotule et légèrement au-delà de la ligne médiane de la jambe. S'assurer que l'orthèse ne tourne pas autour de la jambe (Fig. 1).
- 2) Fixer d'abord la sangle inférieure du mollet (sangle n° 1), puis la sangle supérieure de la cuisse (sangle n° 2).
- 3) Garder l'orthèse du genou courbée à 45°, pousser les deux condyles (articulations) vers l'arrière de la jambe (Fig. 2).
- 4) Maintien de la position des articulations : fixer la sangle supérieure de la cuisse (sangle n° 3), puis la sangle supérieure du mollet (sangle n° 4) à l'arrière de la jambe.
- 5) Tirer les articulations légèrement vers l'avant avant d'attacher la sangle avant du tibia (sangle n° 4). Ne pas tirer sur les articulations au-delà de la ligne médiane de la jambe (Fig. 3).
- 6) Attacher la sangle supérieure du mollet (sangle n° 5). Veiller à ne pas serrer excessivement la sangle afin de ne pas empêcher le sang de circuler.
- 7) Lorsque toutes les sangles sont attachées, l'articulation de l'orthèse doit être centrée juste au-dessus de la rotule et légèrement derrière la ligne médiane de la jambe. Pour éviter que l'orthèse ne bouge en cours d'activité, il est recommandé de plier le genou plusieurs fois ou de marcher pendant quelques minutes puis de resserrer les sangles comme indiqué aux étapes 2 à 6 (Fig. 4).

INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE DE L'ARTICULATION :

L'orthèse est équipée de butées d'extension réglées à 10°. Pour changer les butées installées, retirer la vis (Fig. 5) puis les butées. Insérer les nouvelles butées, aligner les trous sur la plaque de l'articulation de l'orthèse puis réinsérer la vis. À l'aide d'un tournevis cruciforme, s'assurer que les vis sont insérées dans le renforcement et serrer complètement. Les butées internes et externes doivent être de même degré (Fig. 6).

Butées d'extension : 0°, 10°, 20°, 30° et 40°.

Butées de flexion : 0°, 45°, 60°, 75° et 90° (aucune butée de flexion n'est installée à la livraison).

UTILISATION ET ENTRETIEN :

- Si un resserrage est nécessaire en cours d'activité, resserrer toutes les attaches en suivant les étapes indiquées dans les instructions d'utilisation.
- Les attaches et les tampons peuvent être coupés pour s'adapter aux variations individuelles de la circonférence du membre.
- L'orthèse peut être utilisée dans de l'eau douce ou salée. Après une utilisation dans l'eau, essorer complètement, rincer avec de l'eau propre et fraîche puis faire sécher à l'air libre.
- Laver à la main les doublures et les tampons de condyle dans de l'eau froide en utilisant un détergent doux. **SÉCHER LES DOUBLURES ET LES TAMPONS UNIQUEMENT À L'AIR LIBRE ET NON EN MACHINE.**
- Le mécanisme de l'articulation ne nécessite que peu d'entretien dans le cadre d'une utilisation normale. Cependant, un lubrifiant sec tel que du Teflon™ pulvérisé peut être appliqué sur le mécanisme interne de l'articulation. Un lubrifiant sec est recommandé suite à une utilisation dans l'eau.
- Inspecter régulièrement les vis des articulations pour vérifier qu'elles sont bien serrées et les resserrer si nécessaire.

Toujours consulter un médecin ou un thérapeute avant de modifier l'orthèse.

GARANTIE : DJO, LLC répare ou remplace tout ou partie du produit ou de ses accessoires pour tout vice de fabrication ou de main-d'œuvre pendant une durée de six mois à compter de la date d'achat.

**Réservé à un usage sur un seul patient
PRODUIT DÉLIVRÉ SOUS ORDONNANCE**

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, CE DISPOSITIF NE CONSTITUE QU'UN ÉLÉMENT DU PROGRAMME DE TRAITEMENT GLOBAL ADMINISTRÉ PAR UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ. IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

AVERTISSEMENT : LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE (ÉTATS-UNIS) EXIGE QUE CET APPAREIL SOIT VENDU UNIQUEMENT PAR OU SUR L'ORDRE D'UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ AUTORISÉ.