



# FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

## UTILISATION / INDICATIONS

- Entorses légères à modérées de la cheville.
- Instabilités chroniques de la cheville.

## CONTRE-INDICATIONS

- Aucune

## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Ce produit est destiné à l'usage d'un seul patient uniquement. En cas de douleur, de gonflement, de changements au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.

## INSTRUCTIONS D'APPLICATION

1. Placez les protections en Mousse à Mémoire à l'intérieur des coques bilatérales rigides.
2. Ajustez la longueur de la sangle passant sous le talon.
3. Positionnez les coques et les protections en Mousse à Mémoire le long de la cheville, en vérifiant que les malléoles soient bien protégées.
4. Ajustez l'attelle pour assurer un bon maintien, puis fermez l'attelle à l'aide des sangles de fermeture auto-agrippantes.

## ENTRETIEN

Laver à l'eau tiède à l'aide d'un détergent doux. Ne pas utiliser d'agent blanchissant. Rincer abondamment. Sécher à l'air libre. Ne pas sécher au sèche linge. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

## COMPOSITION

38% polypropylène - 37% polyamide - 25% micro polyester



**FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL**

## RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

**GARANTIE** DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.