



**AIRCAST**<sup>®</sup>

# FRANÇAIS

**AVANT D'UTILISER CE DISPOSITIF, LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES DANS LEUR INTÉGRALITÉ. UNE APPLICATION ADÉQUATE EST ESSENTIELLE AU BON USAGE DU PRODUIT.**

**UTILISATION/INDICATIONS:** Support et protection de la cheville.

*Remarque : Pour assurer un confort et un support maximum, porter une chaussette absorbante et une chaussure de sport à lacets lors du port de la chevillère.*

**CONTRE-INDICATIONS:** Aucune

**AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS:** En cas de douleur, gonflements, modifications des sensations ou toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin.

**CONSEILS D'APPLICATION:**

- 1). Desserrer la sangle et la retirer de la boucle noire en plastique, ouvrir les rabats supérieurs, puis ouvrir la chevillère. Glisser le pied dans la partie supérieure de la chevillère. Tirer les stabilisateurs de la chevillère vers le haut, puis les ajuster le long de la cheville.
- 2). Enrouler les rabats autour du haut de la cheville et les attacher. Introduire l'extrémité de la sangle dans la boucle noire.
- 3). Plier le genou jusqu'à ce qu'il se trouve au-dessus des orteils. Serrer la sangle fermement et accrocher son extrémité sur la sangle.

**INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE:** Laver à la main à l'eau savonneuse tiède et rincer soigneusement. **SÉCHER À L'AIR LIBRE.**

*Remarque: Si le produit est mal rincé, les résidus de savon peuvent causer des irritations et endommager le matériau.*

**GARANTIE:** DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou une partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

**POUR USAGE SUR UN SEUL PATIENT UNIQUEMENT.  
SANS LATEX**

AVIS : LA FABRICATION DE CE PRODUIT A FAIT L'OBJET DE TOUS LES EFFORTS POSSIBLES ET DES TECHNOLOGIES LES PLUS AVANCÉES AFIN D'ASSURER UNE COMPATIBILITÉ, UNE ROBUSTESSE, UNE DURABILITÉ ET UN CONFORT DE PLUS HAUT NIVEAU. CE PRODUIT NE CONSTITUE QU'UN DES ÉLÉMENTS DU TRAITEMENT PRESCRIT PAR UN MÉDECIN. IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENDRA TOUTE BLESSURE.