

LIRE ATTENTIVEMENT L'INTÉGRALITÉ DES PRÉSENTES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION DU PRODUIT. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION / INDICATIONS :

L'attelle de marche ELITE offre un maintien à coussins d'air comprimé pour les fractures stables du pied et/ou de la cheville, les entorses aiguës de la cheville et un usage postopératoire. Efficace pour la guérison des fractures et le traitement des œdèmes (gonflement).

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

Ne pas gonfler excessivement les coussins d'air. Un gonflage incorrect des coussins d'air peut causer une irritation cutanée importante, particulièrement chez les patients souffrant d'une neuropathie diabétique (une maladie des nerfs périphériques chez les diabétiques). Examiner fréquemment la peau pour déceler la présence de « points chauds » et d'irritation. En cas de changements au niveau de la peau ou d'inconfort, diminuer la compression des coussins d'air. Ne pas utiliser ce dispositif en cas d'insensibilité postopératoire ou due à une maladie des nerfs ou de la peau.

Faire preuve de prudence lors de déplacements sur des surfaces glissantes ou mouillées pour éviter toute blessure.

MODE D'EMPLOI :

1) PRÉPARER L'ATTELLE

- Défaire les sangles, retirer le panneau avant et ouvrir le couvercle des orteils et les rabats du pied.

2) METTRE L'ATTELLE EN PLACE

- Enfiler d'abord le chausson inclus avec l'attelle.
- En position assise, placer le pied dans l'attelle en faisant reposer le talon contre le dos de celle-ci. Enrouler les rabats du pied autour de celui-ci et le couvercle des orteils autour de ces derniers (Fig. A).
- *Remettre le panneau avant en place :* Positionner le panneau avant de façon à ce que le logo Aircast se trouve au-dessus des orteils et que le panneau du pied soit à l'intérieur de l'attelle. La partie supérieure du panneau doit être attachée hors de l'attelle (Fig. B).
- Attacher les sangles de bas en haut (Fig. C). Serrer jusqu'à ce que l'attelle soit bien ajustée sans causer d'inconfort.

3) AJUSTER LA COMPRESSION DES COUSSINS D'AIR

Les coussins d'air de l'attelle ELITE sont initialement dégonflés

- Gonfler en premier ceux qui se trouvent en contact avec la blessure. Faire tourner le BOUTON DE SÉLECTION qui se trouve sur le côté droit de l'attelle jusqu'à atteindre le chiffre approprié (Fig. D). Le chiffre 1 gonfle le coussin situé sur le côté droit, le chiffre 2 gonfle le coussin situé sur le côté gauche, et le chiffre 3 gonfle le coussin arrière. La position verrouillée (Lock) devrait être utilisée une fois tous les coussins gonflés. Cela empêchera un dégonflage accidentel.
- Pour gonfler le coussin, placer le doigt sur le petit trou au-dessus du **gros** gonfleur situé sur le côté droit supérieur de l'attelle (Fig. E). Gonfler jusqu'à ce que le coussin soit bien ajusté.
- Pour gonfler l'autre coussin, faire tourner le BOUTON DE SÉLECTION pour atteindre le chiffre approprié, puis appuyer plusieurs fois sur le gros gonfleur. Gonfler jusqu'à ce que le coussin soit bien ajusté. Une fois tous les coussins gonflés, faire tourner le BOUTON DE SÉLECTION jusqu'à la position verrouillée (Lock).
- En cas de gonflage excessif, dégonfler les coussins d'air.

4) DÉGONFLER LES COUSSINS D'AIR

- Pour dégonfler les coussins d'air, faire tourner le BOUTON DE SÉLECTION qui se trouve sur le côté droit de l'attelle jusqu'à atteindre le chiffre pour le coussin approprié (Fig. D).
- Appuyer sur le **petit** bouton de déverrouillage situé sur la partie supérieure droite de l'attelle et maintenir la pression (Fig. F).
- Dégonfler jusqu'à atteindre la pression désirée.

REMARQUE : Dégonfler les coussins d'air **avant de retirer l'attelle** pour qu'elle s'ajuste correctement lors d'une nouvelle mise en place.

REMARQUE : Une pression supérieure offre plus de support lors de la marche ; une pression inférieure est plus confortable en position assise ou inclinée. La pression peut aussi être ajustée en serrant ou desserrant les sangles.

REMARQUE : L'attelle peut être ajustée avec une scie à plâtre ou des ciseaux afin de s'adapter aux mollets plus larges.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

LE REVÊTEMENT EN MOUSSE PEUT ÊTRE LAVÉ À LA MAIN À L'EAU TIÈDE (30 °C), AVEC UN DÉTERGENT DOUX, ET SÉCHÉ À L'AIR. NE PAS PLACER DANS UN SÈCHE-LINGE OU UTILISER UNE AUTRE SOURCE DE CHALEUR POUR LE SÉCHAGE.

HAUTE ALTITUDE :

À HAUTE ALTITUDE, LES COUSSINS D'AIR SE DILATENT AU-DELÀ DE LEUR NIVEAU OPTIMAL. AJUSTER LA PRESSION DES COUSSINS D'AIR EN SERRANT OU DESSERRANT LES SANGLES.

GARANTIE :

DJO Global, LLC réparera ou remplacera tout ou partie du produit et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une durée de six mois à compter de la date de vente.

FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ UNE SEULE FOIS POUR UN SEUL PATIENT

MATÉRIAUX DES COMPOSANTS

Coquille : POLYPROPYLENE

Panneau avant : POLYÉTHYLENE HAUTE DENSITÉ

Sangles : NYLON

Coussins d'air alignés (antérieur et postérieur) : POLYURÉTHANNE et POLYESTER

Gonfleurs : TPU (POLYURÉTHANNE THERMOPLASTIQUE)

Chausson : NYLON/POLYURÉTHANNE/POLYESTER (EXTÉRIEUR EN MOUSSE, INTÉRIEUR EN TISSU À MAILLES)

Bordure : POLYESTER

Semelle extérieure / semelle intérieure : EVA / CAOUTCHOUC

Bouton de sélection : NYLON

Chausson (Elite) : ACRYLIQUE/COTON