



FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES DANS LEUR INTÉGRALITÉ AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION / INDICATIONS : L'orthèse de marche MINITRAX est efficace pour le traitement des blessures de la partie antérieure, la partie centrale et la partie postérieure du pied ; les fractures du pied ; les blessures et les procédures affectant les tissus mous, les tendons ou les ligaments ; les soins de courte durée ou postopératoires (c'est-à-dire l'ablation d'oignons, l'ostéotomie, le retrait d'un os à proximité d'une articulation endommagée, etc.) ; et les entorses de la cheville. Efficace pour la guérison des fractures.

CONTRE-INDICATIONS : Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS : En cas de douleur, de gonflement, de modification de la sensation ou de toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation de ce produit, consulter immédiatement un médecin. Ne pas utiliser ce produit sur des patients incapables de communiquer une gêne physique. Comme avec tous les autres dispositifs d'immobilisation des membres inférieurs, tels que les plâtres ou les orthèses, les patients insensibles (c'est-à-dire les patients en phase postopératoire ou souffrant de neuropathies, etc.) doivent être étroitement surveillés pour le traitement de « points chauds », d'irritations cutanées ou de blessures. Faire preuve de prudence lors de déplacements sur des surfaces glissantes ou mouillées pour éviter toute blessure.

INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE EN PLACE :

Une gaine en coton ou pour plâtre améliore le confort – NON INCLUSE

- 1) PRÉPARER L'ORTHÈSE
 - Desserrer les sangles et ouvrir le chausson.
- 2) METTRE L'ORTHÈSE EN PLACE
 - En position assise, placer le pied dans l'orthèse (Fig. A).
 - Positionner le talon dans la partie arrière de l'orthèse. Enrouler le chausson autour du pied puis de la cheville (Fig. B).
 - Attacher les sangles de bas en haut (Fig. C). Serrer jusqu'à ce que l'attelle soit bien ajustée sans causer d'inconfort.
- 3) RETIRER L'ORTHÈSE
 - Pour retirer l'orthèse, détacher les sangles, ouvrir le chausson et sortir le pied.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : Le chausson en mousse peut être lavé à la main à l'eau tiède (30 °C), avec un détergent doux, et séché à l'air libre. Ne pas placer dans un sèche-linge ni utiliser une autre source de chaleur pour le séchage.

MATÉRIAUX DES COMPOSANTS :

Coquille : NYLON

Sangles : NYLON TISSÉ

Chausson : NYLON/POLYURÉTHANNE/POLYESTER (EXTÉRIEUR EN MOUSSE, INTÉRIEUR EN TISSU À MAILLES)

Bordure : POLYESTER

Semelle extérieure / semelle intérieure :

EVA / CAOUTCHOUC

GARANTIE : DJO, LLC réparera ou remplacera l'ensemble ou une partie du produit ainsi que ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une durée de six mois à compter de la date de vente.

DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ SUR UN SEUL PATIENT.

SANS LATEX

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.