



**LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.**

**UTILISATION/INDICATIONS :** Transpositions du nerf cubital • Fractures stables de la tête du radius • Luxations du coude • Immobilisation post-opératoire après réfection de tendon

**GARANTIE :** Ce produit doit être utilisé sous la supervision d'un professionnel de la santé; il n'est pas destiné à une utilisation non supervisée par n'importe qui. En cas de douleur, d'enflure, d'altération de la sensation ou de toute autre réaction anormale lors de l'utilisation de ce produit, se mettre en rapport immédiatement avec le professionnel de la santé concerné.

LES CHEVILLÈRES EN NÉOPRÈNE NE DOIVENT PAS ÊTRE PORTÉES PAR DES PERSONNES SUJETTES À LA DERMATITE OU ALLERGIQUES AUX SOUS-PRODUITS DU NÉOPRÈNE.

### **INSTRUCTIONS D'UTILISATION :**

1. Utiliser l'outil fourni pour desserrer les vis situées dans les barres de charnière rainurées, afin que les coquilles puissent glisser librement sur la barre (fig. 1).
2. Placer le bras dans l'orthèse, en positionnant la charnière au niveau de l'épicondyle, puis glisser les coquilles sur la barre de charnière pour s'adapter à la longueur du bras. Serrer les vis pour fixer les coquilles sur la barre de charnière (fig. 2).
3. Pour reculer la charnière, utilisez l'outil auxiliaire/l'accessoire fourni et enlevez retirez les vis dans les barres d'articulation charnières à fentes, puis placez les barres d'articulation charnières dans les trous de coquille antérieurs. Ensuite, remplacez et serrez les vis de façon à faire tenir bien fixer les coquilles sur l'ensemble barre charnière.
4. Enrouler la bande autour de l'avant-bras et l'attacher, puis attacher les sangles du haut du bras (fig. 3).
5. Écharpe de contention. Passer une extrémité de l'écharpe sur les sangles de biceps à un angle faible et la fixer. Passer l'écharpe sur le cou et sous le support d'avant-bras. Replier la sangle sur elle-même sur le côté non affecté et la fixer.

### **RÉGLAGE DE LA CHARNIÈRE :**

6. Positions de réglage : Les broches de réglage sont placées à intervalles de 30 degrés (fig. 4).

**AVERTISSEMENT :** Afin d'éviter d'endommager les renforts articulés et de se blesser, les deux réglages de la flexion doivent être les mêmes.

7. Pour effectuer le réglage de l'amplitude articulaire, utiliser une clé hexagonale pour enlever les manchons filetés. Les mettre à l'endroit désiré et les resserrer (fig. 5).

**UTILISATION ET ENTRETIEN :** Laver à la main à l'eau chaude (30 °C) avec un savon doux. Sécher à l'air libre.

**GARANTIE :** DJO, LLC se chargeront de réparer ou de remplacer tout ou partie de l'appareillage et ses accessoires en cas de vice de matériau ou vice de fabrication, pendant une période de six mois à compter de la date de vente. Si les conditions de cette garantie sont incompatibles avec la réglementation locale, les dispositions des réglementations locales s'appliquent.

**COMPOSITION DES MATÉRIAUX :** Néoprène, nylon, aluminium, plastique, lycra, mousse, acier et zinc

**SUR ORDONNANCE UNIQUEMENT**

**RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT**

AVIS: BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENDRA TOUT PRÉJUDICE CORPOREL.

AVERTISSEMENT: LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE (ÉTATS-UNIS) EXIGE QUE CET APPAREIL SOIT VENDU UNIQUEMENT PAR OU SUR L'ORDRE D'UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ AUTORISÉ.