



FRANÇAIS

AVANT D'UTILISER CE DISPOSITIF, LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES DANS LEUR INTÉGRALITÉ. UNE APPLICATION ADÉQUATE EST ESSENTIELLE AU BON USAGE DU PRODUIT.

PROFIL DE L'UTILISATEUR

L'utilisateur doit être capable de lire et comprendre les instructions, les avertissements et les mises en garde.

UTILISATION/INDICATIONS

- Déficiences ou paralysie des muscles releveurs de pied, dues à des lésions neurologiques.
- Permet de compenser les déficits des muscles releveurs de pied, ou, dans certains cas, des muscles fibulaires. Permet de maintenir le pied à angle droit, de prévenir le déséquilibre latéral, sans contraindre les mouvements. Permet d'améliorer la capacité de marche.
- Facilité d'application et possibilité de mise en place d'une seule main (en cas d'hémiplégie par exemple).

CONTRE-INDICATIONS

Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- En cas de douleur, gonflements, modifications des sensations ou toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin.
- Nous recommandons qu'un professionnel de santé supervise la première application.
- Si l'attelle est portée directement sur la peau, la peau ne doit pas être humide et ne doit pas présenter de plaies, ni de traces de pommade, lotion, gel ou de résidus gras similaires.
- L'orthèse peut être portée avec tous types de chaussures. Il est cependant parfois nécessaire de faire appel à un cordonnier pour adapter les chaussures.

COMPOSANTS

(A) Une guêtre, avec une mousse de protection postérieure et 2 baleines souples postérieures.

(B) Une sangle élastique, équipée d'un crochet métallique en son milieu.

NB - Lors de la manipulation du dispositif, prendre soin de diriger le crochet métallique vers le bas, afin d'éviter tout risque de blessure.

(C) Un système d'accroche (pièce plastique & rivet) livré en 3 exemplaires, pour adapter les chaussures sans œillets, ni lacets ou au lacage trop court (en deçà des métatarses).

(D) Un manchon de pied (pour utilisation pied nu uniquement)

(E) Un filet de transport et/ou de lavage

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

1) Ouvrir et enfiler la guêtre telle une chaussette.

2) Positionner la guêtre autour de la cheville, au dessus des malléoles. Bien serrer la guêtre et la fermer à l'aide des fermetures auto-agrippantes. Pousser la guêtre vers le bas et vérifier qu'elle ne glisse pas. Les 2 boucles de verrouillage doivent être centrées à l'arrière, vers le haut du mollet.

3-A) - UTILISATION AVEC CHAUSSURE

- Choisir un point d'ancrage sur la chaussure (lacets, boucle, œillet), généralement situé à la base du 1er métatarse (base du gros orteil)

- Pour les chaussures à lacets: se chausser normalement, bien serrer les lacets, puis fixer le crochet de la sangle élastique sur plusieurs brins de lacets. Si besoin d'une correction latérale, fixer le crochet de la sangle élastique sur un œillet de la chaussure.

NB - Ne pas fixer le crochet de la sangle élastique sur un seul brin de lacet, car l'ancrage risque d'être trop fragile et de diminuer l'effet correcteur.

3-B) - ADAPTATION DE CHAUSSURES SANS POINT D'ANCRAGE

- S'il n'y a aucun point d'ancrage (lacets, boucle, œillet), faire adapter la pièce plastique et le rivet sur la chaussure par un cordonnier, afin d'assurer une mise en place correcte et durable.

- Sur avis d'un professionnel de santé, choisir la position du point d'ancrage sur la chaussure. Faire fixer la pièce plastique en passant le rivet prévu à cet effet au travers d'un des trous. Fixer ensuite le crochet de la sangle élastique au travers de l'autre trou.

3-C) UTILISATION PIEDS NUS

- Enrouler et fixer le manchon de pied autour de l'avant-pied (à la base des métatarses). Le point d'ancrage (boucle textile) doit être centré au-dessus de l'avant-pied, au niveau de la base du gros orteil. Si besoin d'une correction latérale, le point d'ancrage (boucle textile) peut être décalé latéralement. Fixer le crochet de la sangle élastique au point d'ancrage (boucle textile).

4) Ouvrir les boucles à 90°. Le pied en flexion dorsale (pointant vers le haut), régler la tension des 2 brins de la sangle élastique selon la tension voulue. S'assurer de bien fermer les boucles de verrouillage.

- Il est possible de couper les excédents de sangle élastique au-delà de 4 ou 5 cm.

5) Pour enlever le dispositif, il suffit de retirer le crochet de son point d'ancrage et de retirer la guêtre telle une chaussette.

Ne pas desserrer les boucles de verrouillage afin de garder la même tension lors de la prochaine utilisation.

NB - Si vous constatez que le crochet sort de son point d'ancrage en flexion dorsale, tourner le crochet vers la gauche et le fixer dans l'autre sens, pointé vers le haut.

ENTRETIEN

Laver à l'eau tiède à l'aide d'un détergent doux. Ne pas utiliser d'agent blanchissant. Rincer abondamment. Sécher à l'air libre. Ne pas sécher au sèche linge. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

L'attelle peut-être lavée dans son filet de transport. Il n'est pas nécessaire de détacher la sangle élastique de la guêtre.

COMPOSITION

Manchons : Elasthomère, polyamide, polyester, élasthanne, polyuréthane, gomme

Crochet et boucles : Polyformaldéhyde, acier



MISE EN GARDE : CE PRODUIT CONTIENT DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES RÉACTIONS ALLERGIQUES.

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT.

GARANTIE DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.