



1



2



3



4

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

INDICATIONS : Soutien et protection du pied et du plâtre durant la marche.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION :

- A) Glisser la chaussure ou la sandale par dessus le plâtre.
- B) Fixer les bandes velcro pour un soutien confortable.

UTILISATION ET ENTRETIEN : Nettoyer avec un tissu humide. Sécher complètement avant l'utilisation suivante. Les sandales pour plâtre peuvent être nettoyées à la main avec un détergent doux et de l'eau tiède puis séchées à l'air libre. La semelle peut être nettoyée avec un chiffon humide.

GARANTIE : DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie du produit et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVERTISSEMENT : En cas de douleur, de gonflement, d'altération des sensations ou de toute réaction inhabituelle pendant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un professionnel de la santé.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.