

Playmaker XPert

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.


SLEEVE



WRAP



OK

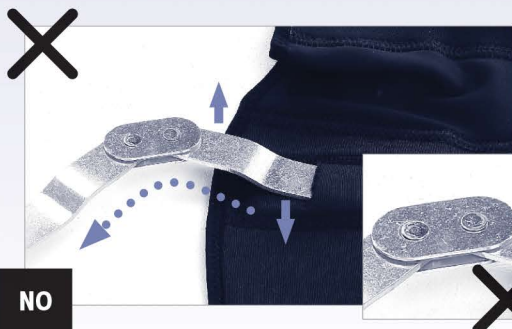

NO

PROFIL DE L'UTILISATEUR :

- Le dispositif s'adresse à un médecin autorisé, le patient, l'aide-soignant ou un membre de la famille qui prodigue les soins au patient.
- L'utilisateur doit être capable de : lire, comprendre et être physiquement apte à respecter toutes les consignes, les avertissements et les précautions qui figurent dans le mode d'emploi.

UTILISATION/INDICATIONS

- Légères entorses du ligament latéral interne/externe
- Légère arthrite
- Légères instabilités générales
- Ménissectomie post-arthroscopique (Version tubulaire)

CONTRE-INDICATIONS :

Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Nous recommandons qu'un professionnel de santé supervise la première application.
- En cas de douleur, gonflements, modifications des sensations ou toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin.
- Si l'attelle est portée directement sur la peau, la peau ne doit pas être humide et ne doit pas présenter de plaies, ni de traces de pommade, lotion, gel ou de résidus gras similaires.
- DJO, LLC, déconseille l'utilisation simultanée (sur les deux jambes) d'orthèses fonctionnelles du genou au cours d'activités physiques telles que le ski, car les orthèses risquent de s'accrocher et d'entraîner une perte de contrôle et un préjudice corporel. Il est également déconseillé de porter les orthèses fonctionnelles du genou par-dessus les vêtements.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Ouvrir et desserrer les sangles de cuisse et de mollet.

1.

- Pour la version tubulaire, enfiler la genouillère sur la jambe.
- Pour la version enveloppante, envelopper simplement la genouillère autour de la jambe et refermer le tissu sur la partie avant.

2. Placer la genouillère de sorte que les articulations soient parallèles l'une par rapport à l'autre et de manière à aligner le haut de l'ouverture rotulienne avec le haut de la rotule.

3. Fixer les sangles de cuisse et de mollet.

4. Articulations polycentriques amovibles

ENTRETIEN

Laver à l'eau tiède à l'aide d'un détergent doux. Ne pas utiliser d'agent blanchissant. Rincer abondamment. Sécher à l'air libre. Ne pas sécher au sèche linge. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

COMPOSITION

Polyéthersulfone, Nylon, Spandex, Elastane, Polyamide, Polyuréthane, Coton, Polyester, Plastique (Acétal & PVC), Caoutchouc Synthétique (SBR/CR), Aluminium



FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT.

GARANTIE DJO, LLC répare ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.