

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Conduite déconseillée.

ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 40°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,
- Nettoyage professionnel à sec modéré.



Conserver le produit à température ambiante.



Dispositif médical de classe I

Fabricant et/ou distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

NOT_BandageImmobilisationEpaule_150529_V3



BANDAGE
D'IMMOBILISATION
D'ÉPAULE



CONTENU/DESCRIPTION

Un bandage d'immobilisation d'épaule :

- Tissu épais (10mm) et hypoallergénique,
- Sangle scapulo-humérale pour une immobilisation totale du bras,
- Fermeture velcro® en tissu,
- 1 code couleur par taille.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

Immobilisation en post-opératoire et après traumatisme de l'épaule et du coude.

COMPOSITION

- Extérieur : 100% polyester.
- Intérieur : 100% polyuréthane.
- Sans latex ni phtalate.

TAILLANT

TAILLE	MESURE POITRINE + BRAS (cm)
Pédiatrique	< 65 cm
Enfant / 2	65 - 90
3	90 - 105
4	105 - 120
5	120 - 135
6	> 135

MISE EN PLACE

A (figure 1)

Placer l'avant bras dans le manchon et passer les sangles par dessus les épaules.

B

- Croiser les sangles dans le dos (figure 2).
- Passer chaque sangle sous le manchon et les fixer à l'aide des velcro® (figure 3).

C (figure 4)

Finir l'immobilisation en enveloppant le bras à l'aide de la sangle d'immobilisation humérale en passant sous l'aisselle du bras valide.

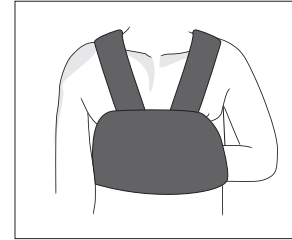


Figure 1

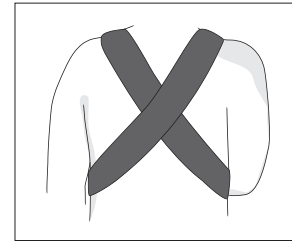


Figure 2



Figure 3



Figure 4



CONSULTEZ
LA **VIDÉO**
DE MISE EN PLACE