



FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION / INDICATIONS : L'orthèse de genou REACTION est conçue pour faciliter la réduction de la douleur en absorbant les chocs et en renvoyant l'énergie cinétique vers le genou. Les indications d'utilisation sont une douleur fémoro-patellaire ou une dérive de la rotule légère à modérée et une arthrose légère à modérée du genou.

CONTRE-INDICATIONS : Aucune

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS : En cas de douleur, de gonflement, de modification de la sensation ou de toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation de ce produit, consulter immédiatement un médecin.

INFORMATIONS D'APPLICATION :

1. Tirer sur le manchon jusqu'à ce qu'il soit confortable et la rotule centrée dans l'ouverture en forme de sablier. (Le port du manchon est facultatif.)
- 2a. Placer la toile au-dessus de l'articulation du genou, la centrer en alignant l'ouverture sur la rotule (figure 2b).
3. Faire passer les languette d'un côté du coussinet arrière dans les ouvertures intérieures de la toile et fixer les parties à velcro sur la face à boucles du coussinet arrière. (Remarque : le côté à matériau d'espacement du coussinet arrière doit être placé sur la jambe et le côté à boucles à l'écart de celle-ci. L'extérieur de la toile comporte le logo, l'intérieur est alvéolé.)
4. Faire passer les languette libres du coussinet arrière dans les ouvertures disponibles de la toile et fixer les languettes à velcro sur la surface à boucles du coussinet arrière.
- 5a. Une fois toutes les languettes attachées pour un réglage correct, soulever et tirer les deux languettes inférieures pour serrer.
- 5b. Répéter l'opération avec la paire de languettes supérieures, l'orthèse doit être serrée et confortable, sans serrer excessivement.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : Les pièces en plastique et les coussinets peuvent se laver à la main à l'eau tiède savonneuse. Rincer complètement les deux pièces. Les faire sécher séparément À L'AIR LIBRE.

À N'UTILISER QUE SUR UN SEUL PATIENT.

SANS LATEX

GARANTIE : DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.