



FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION / INDICATIONS

- Subluxation de la rotule légère à modérée, déplacement anormal, arthrite de la rotule et stabilité latérale et médiale.

CONTRE-INDICATIONS

- Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Les supports ne doivent pas être portés par des personnes avec susceptibilité connue aux dermatites ou aux allergies dues aux produits contenant du néoprène. En cas de douleur, enflure, modifications de la sensation ou toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation du produit, consulter un professionnel de la santé.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Remarque: Appliquer pendant que le patient est assis à l'extrémité d'une chaise, la jambe entièrement étendue, le talon au sol, l'orteil pointé vers le haut et les quadriceps détendus.

Étape 1:

Faire passer la jambe par la manche et la positionner sur la jambe de sorte que l'ouverture pour la rotule soit alignée décentrée par rapport au côté latéral (extérieur) du genou. Cela permettra au renfort de rentrer directement en contact avec le bord latéral de la rotule. (Fig. 1)

Étape 2:

S'assurer que le renfort est contre la peau et est aligné sur le bord latéral de la rotule, faire passer la bande inférieure autour du mollet en l'attachant avec les fermetures auto-agrippantes. Suivre la même procédure pour la bande supérieure. (Figures 2 et 3)

- Pour un serrage supplémentaire sur la rotule, tirer sur les deux sangles au même moment et attacher avec les fermetures auto-agrippantes.
- Il est possible de régler la force de serrage sur la rotule en ajustant la tension sur les bandes.
- Pour régler la longueur de la bande, relâcher l'extrémité de la bande sur l'arrière de celle-ci puis régler à la longueur souhaitée. (Fig. 4)
- Les charnières peuvent être retirées de l'étui en les faisant coulisser à travers la fente sur la partie supérieure interne de l'étui de la charnière. (Figures 5 et 6)

ENTRETIEN

Laver le renfort au savon et à l'eau pour rendre la sensation « adhésive » selon le besoin ou régulièrement.



FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.