



FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION / INDICATIONS

- Traitement symptomatique des dysfonctions fémoro-rotuliennes incluant déboîtement et/ou subluxation, mauvais alignement/ positionnement de la rotule (du terme anglais maltracking) et tendinite patellaire.

CONTRE-INDICATIONS

- Non indiqué pour la pratique de sports aquatiques.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Les supports en néoprène ne doivent pas être utilisés par des personnes ayant une prédisposition connue aux dermatites et aux allergies causées par les produits en néoprène. En cas de douleur, gonflement, modifications de la sensation ou toute autre réaction inhabituelle lors de l'utilisation de ce produit, consulter immédiatement un médecin.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- 1) Desserrer et détacher les brides. Tirer le manchon sur la jambe en utilisant les anneaux. Positionner le manchon sur la jambe de sorte que l'ouverture patellaire entoure la rotule.
- 2) Chaque bride a deux renforts : utiliser le renfort le plus confortable. Fixer le renfort sur l'intérieur du manchon autour de l'ouverture patellaire. Positionner correctement sur le côté médial ou latéral de l'ouverture patellaire en fonction du traitement.
- 3) Enrouler la bride inférieure autour du mollet et fixer l'extrémité de la bride sur le manchon en utilisant la fermeture de contact.
- 4) Enrouler la bride supérieure autour de la cuisse et fixer l'extrémité de la bride sur le manchon en utilisant la fermeture de contact. Régler la tension sur la rotule en serrant les brides de tension autour de la cuisse et du mollet.
- 5) Pour retirer les articulations : tenir la portion inférieure du renfort par l'articulation.
- 6) Tirer sur le matériau en haut du logement de l'articulation pour permettre à la partie supérieure de la barre d'articulation de sortir de la fente du couvercle d'articulation. Retirer l'articulation.
- 7) Pour insérer les articulations : s'assurer que l'articulation plie en direction du genou avant d'insérer. Ouvrir la fente dans le couvercle de l'articulation et insérer la barre de l'articulation.

ENTRETIEN

Retirer les articulations avant le nettoyage. Laver le manchon à la main et à l'eau chaude avec un savon doux et rincer abondamment. LAISSER SÉCHER À L'AIR. Remarque : si le produit est mal rincé, le savon résiduel est susceptible de provoquer des irritations et d'endommager le produit.



FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.