



FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION/INDICATIONS : Patients avec symptômes, découverte physique ou évidence radiographique d'une maladie dégénérative de l'articulation du genou unicompartimentale. Attelle utilisée pour soulager la douleur des symptômes susmentionnés.

CONTRE-INDICATIONS : Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS : L'attelle a été conçue en tant que complément d'une variété de traitements médicaux communs aux affections ci-dessus et doit être utilisée sous la supervision d'un professionnel de la médecine qui doit déterminer la fréquence et la durée d'utilisation. En cas de douleur, d'enflure, de modifications de la sensation, de problèmes de circulation ou de toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation de l'attelle, consulter immédiatement un professionnel de la médecine. L'attelle doit être portée directement contre la peau. L'attelle est destinée à une utilisation sur un seul patient et n'est pas conçue pour une utilisation dans les sports de contact. L'attelle est destinée à une utilisation sur un seul patient et n'est pas conçue pour une utilisation dans les sports de contact. Les attelles ne doivent pas être portées sur les jambes droite et gauche durant des activités présentant un risque de contact entre les attelles, au risque de perte de contrôle et de blessures. Consulter un professionnel de la médecine pour les limitations d'activités applicables. L'OA Nano, l'OA Adjuster et le 4Tititude OA Nano sont conçus pour offrir fonctionnalité, résistance, durabilité et confort ; il n'existe cependant aucune garantie que des blessures seront évitées par l'utilisation de cette attelle.

INFORMATIONS CONCERNANT L'UTILISATION :

AVANT L'APPLICATION (à n'effectuer que lors de la mise en place initiale) : Le patient debout, apposer le cadre de l'attelle sur la jambe sans appliquer les sangles. Régler l'alignement varus / valgus de l'attelle sur le contour de la jambe du patient en ajustant les vis situées immédiatement au-dessus et en dessous de l'articulation avec la clé Allen fournie (Fig. 1). Les vis doivent sembler lâches lorsqu'une position neutre de l'attelle est obtenue. Continuer à ajuster les vis pour atteindre la charge souhaitée.

APPLICATION :

- Assis sur le bord d'une chaise, fléchir le genou à 45° et passer l'attelle (Fig. 2).
- Centrer les articulations à 2,5 cm (1 in.) au-dessus de la rotule et légèrement derrière la ligne centrale de la jambe et attacher les sangles n° 1 et n° 2 (Fig. 3).
- Pousser les deux articulations vers l'arrière de la jambe puis attacher la sangle n° 3 (Fig. 4).
- Tirer légèrement les articulations vers l'avant mais pas au-delà de la ligne centrale de la jambe et attacher la bande anti-migration. Attacher ensuite les sangles n° 4 et n° 5 (Fig. 5). Pour l'OA Nano et le 4Tititude OA Nano, la bande anti-migration devra être appliquée. Elle se trouve dans la pochette d'accessoires. Se reporter à la notice d'application de la bande anti-migration.
- Les articulations doivent être centrées juste au-dessus de la rotule et légèrement derrière la ligne centrale de la jambe (Fig. 6).
- Une fois l'attelle en place, plier le genou plusieurs fois et marcher pour vérifier que l'ensemble est bien tenu (Fig. 7). Si nécessaire, serrer les sangles dans la séquence indiquée. Les longueurs de sangles peuvent être ajustées derrière le coussin de sangle (Fig. 8).

APPLICATION DE COUSSINS DE SANGLE (POUR L'AO NANO

UNIQUEMENT) : Pour plus de confort, quatre (4) coussins de sangle sont inclus dans la pochette d'accessoires. Ils sont placés sur l'intérieur de chaque sangle (à l'aide d'une fixation Velcro) pour un confort et un ajustement optimum.

APPLICATION DE LA BANDE ANTI-MIGRATION : La bande anti-migration sert à améliorer la suspension de l'attelle (si nécessaire). Pour les utilisateurs de l'OA Nano et du 4Tititude OA Nano, des instructions d'application distinctes sont jointes dans la pochette d'accessoires. La bande anti-migration est déjà en place sur toutes les versions de l'OA Adjuster. Si elle a été retirée, se reporter à la notice d'application pour la remettre en place.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA BUTÉE D'ARTICULATION :

Détacher les deux coussins de condyle. Insérer les butées d'extension de 10° à l'avant des deux articulations. Insérer et serrer les vis fournies dans les deux articulations (Fig. 9). Attacher de nouveau des deux coussins de condyle.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : Un nettoyage régulier du produit est recommandé. Un lubrifiant sec, tel que du Teflon™ en aérosol, peut être appliqué sur le mécanisme interne de l'articulation et est recommandé suite à une utilisation dans l'eau. Inspecter les vis d'articulation régulièrement et les serrer au besoin. Pour nettoyer les revêtements et les coussins de condyle, les laver à la main à l'eau froide (30 °C) avec un savon doux, rincer abondamment et laisser sécher à l'air. Les résidus de savon peuvent causer des irritations et détériorer le matériau.



GARANTIE : DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période, à partir de la date d'achat, de six mois pour les produits non durables et d'un an pour les cadres/charnières d'attelles.

COMPOSITION DES MATÉRIAUX :

Monture - Magnésium
Mécanisme de chargement - Aluminium et acier
Charnière - Aluminium et acier
Fixations des sangles - Aluminium et nylon
Parties souples - Nylon et copolymère d'acétate de vinyle-éthylène

**Destiné à être utilisé sur un seul patient.
Sur prescription médicale uniquement**