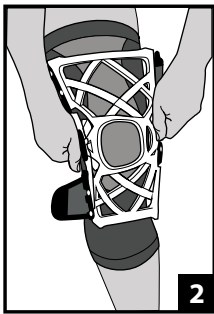
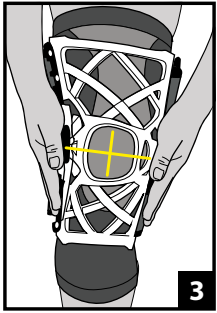
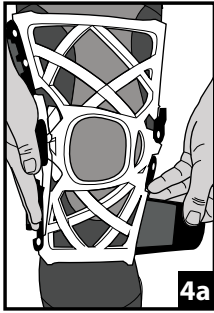
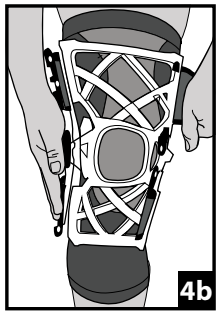
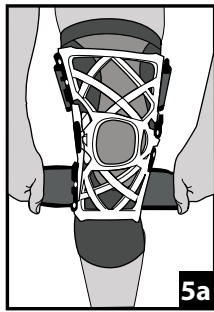
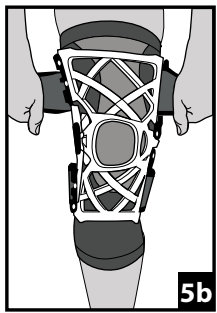
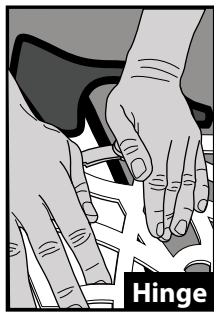
**1****2****3****4a****4b****5a****5b****Hinge**

## FRANÇAIS

**LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.**

**UTILISATION PRÉVUE / INDICATIONS :** L'orthèse de genou OA REACTION est conçue pour faciliter la réduction de la douleur liée à l'arthrose en soulageant le point touché de l'articulation. Ce dispositif est prévu pour les cas légers à modérés d'arthrose unicompartmentale du genou et de la rotule, ainsi que pour la rééducation post-opératoire.

**CONTRE-INDICATIONS :** aucune

**AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :** Consulter immédiatement un professionnel de santé en cas de douleur, de tuméfaction, de modification des sensations ou de toute autre réaction inhabituelle suite à l'utilisation de ce produit.

### INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE EN PLACE :

1. Tirer sur le manchon jusqu'à ce qu'il soit bien en place et que la rotule soit centrée dans l'ouverture en forme de sablier.  
**REMARQUE :** le port du manchon est facultatif.
2. Placer la toile au-dessus de l'articulation du genou et la centrer en alignant l'ouverture sur la rotule.  
**REMARQUE :** l'extérieur de la toile comporte le logo DonJoy, l'intérieur est alvéolé.
3. S'assurer que la charnière de soulagement (avec le coussinet en silicone) est placée au centre de l'articulation du genou.
- 4a. Passer les coussinets des sangles détachées à travers les fentes prévues à cet effet sur la partie opposée de la charnière de soulagement, au niveau du mollet. Puis fixer la languette à la boucle latérale noire du coussinet arrière.
- 4b. Répéter l'opération au niveau de la cuisse.  
**REMARQUE :** le côté gris du coussinet arrière doit être placé sur la peau et le côté à boucle noire ne doit pas toucher la jambe.
- 5a. Une fois toutes les sangles attachées, pour un réglage correct, soulever et tirer les deux sangles inférieures (sur le mollet) pour serrer.
- 5b. Répéter l'opération avec les sangles supérieures (sur la cuisse) sans serrer excessivement. L'orthèse doit être serrée et confortable.

**RÉGLAGE DE LA CHARNIÈRE DE SOULAGEMENT :** mettre la charnière de décharge de la douleur sur l'angle d'une table. Placer le mât de la cuisse contre l'angle de la table, à environ 2,5 cm au-dessus de la charnière. Puis exercer une pression vers le bas sur le mât du mollet pour plier le mât. Répéter l'opération sur la partie inférieure (du mollet) si nécessaire.  
**REMARQUE :** s'assurer que la pression exercée par la charnière de décharge de la douleur est confortable pour le patient.

**NETTOYAGE :** la toile, les pièces en plastique et le textile peuvent se laver à la main à l'eau tiède savonneuse. Rincer complètement les deux pièces. Faire sécher séparément À L'AIR LIBRE.

**GARANTIE :** DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou une partie de l'appareil et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

### DISPOSITIF À USAGE UNIQUE

### SUR PRESCRIPTION MÉDICALE UNIQUEMENT

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, CE DISPOSITIF NE CONSTITUE QU'UN ÉLÉMENT DU PROGRAMME DE TRAITEMENT GLOBAL ADMINISTRÉ PAR UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ. IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

AVERTISSEMENT : LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE (ÉTATS-UNIS) EXIGE QUE CET APPAREIL SOIT VENDU UNIQUEMENT PAR OU SUR L'ORDRE D'UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ AUTORISÉ.