


## NOTICE DE POSE DE L'ÉCHARPE ULTRASLING

Lire attentivement toutes les instructions suivantes avant l'application de l'orthèse.  
Une mise en place correcte est essentielle au fonctionnement adéquat de l'orthèse.


INDICATIONS: • Reconstructions postopératoires de la coiffe des rotateurs • Procédures Bankart postopératoires • Déplacements capsulaires • Luxation/subluxation gléno-humérale • Entorses/reconstructions des tissus mous

Ce produit a été conçu pour servir de complément à de nombreux traitements médicaux courants pour les traumatismes indiqués ci-dessus. La fréquence et la durée d'utilisation doivent être déterminées par le médecin traitant.

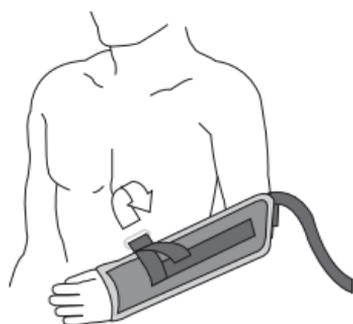

**A** Détacher la sangle de l'épaule et ouvrir le panneau avant. Placer le bras dans l'écharpe, avec le coude enfoncé aussi loin que possible. Attacher la sangle du panneau avant en la faisant passer dans l'anneau en forme de D le plus bas.


**B** Fixer les attaches le long du haut de l'écharpe pour maintenir le bras bien en place dans l'arceau.  
**Remarque :** Pour plus de confort, passer le pouce à travers la boucle à l'intérieur de l'écharpe.

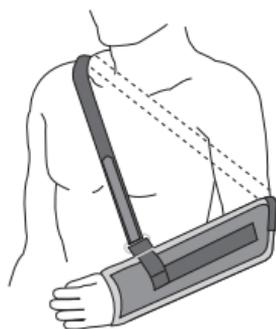

**C** Faire passer la sangle de l'épaule en travers du dos et sur l'épaule en bonne santé et l'attacher en la faisant passer par l'anneau en forme de D du milieu de l'écharpe. On peut ajuster la longueur de la sangle de l'épaule en retirant l'onglet du bout, en coupant la longueur désirée et en remettant l'onglet au bout de la sangle.

**D** Placer le coussin au niveau de la taille, avec l'extrémité la plus large orientée vers l'avant. Attacher l'écharpe au coussin en faisant correspondre le crochet et les boucles. Serrer la sangle de la taille en la faisant passer par l'anneau en forme de D de l'avant du coussin.

**Remarque :** La position du coussin doit permettre la rotation interne ou externe désirée en faisant glisser le coussin vers l'avant ou vers l'arrière, le long de la taille.

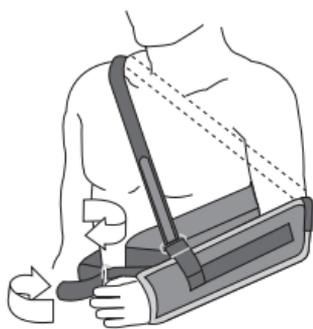

## UTILISATION ET ENTRETIEN

- La taie du coussin et l'écharpe peuvent se laver à l'eau froide, en utilisant un savon doux. Les laisser sécher à l'air libre.

Consulter le médecin traitant ou tout autre personnel médical qualifié avant de modifier l'orthèse de façon quelconque.

**GARANTIE:** DJO, LLC se chargeront de réparer ou de remplacer tout ou partie de l'appareillage et ses accessoires en cas de vice de matériau ou vice de fabrication, pendant une période de six mois à compter de la date de vente.

**AVERTISSEMENT:** CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE. IL N'EST PAS DESTINÉ À DES PATIENTS NON SUIVIS. EN CAS DE DOULEUR, ŒDÈME, MODIFICATIONS DE LA SENSIBILITÉ OU AUTRE RÉACTION INHABITUELLE LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, CONSULTER IMMÉDIATEMENT LE MÉDECIN TRAITANT.

AVIS: BIEN QUE TOUS LES PRECAUTIONS AIENT ÉTÉ PRISES POUR FABRIQUER DES ORTHÈSES DE QUALITÉ, EFFICACES ET CONFORTABLES, CE PRODUIT NE CONSTITUE QU'UN ÉLÉMENT DE L'ENSEMBLE DU TRAITEMENT PRÉSCRIT PAR LE MÉDECIN. L'UTILISATION DE CETTE ORTHÈSE NE GARANTIT PAS UNE PRÉVENTION TOTALE DES LÉSIONS LIGAMENTAIRES.

DE PAR LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE, CE DISPOSITIF NE PEUT ÊTRE VENDU QUE PAR UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ OU SUR SON ORDONNANCE.