



FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION / INDICATIONS

- Trauma des membres supérieurs (réparation postchirurgicale, lésions humérales) Neurologie : paralysie, hémiplegie.

CONTRE-INDICATIONS

- Assurez-vous que la sangle utilisée comme manchon est correctement positionnée. Évitez de la placer sur la colonne vertébrale.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

En cas de douleur, de gonflement, de changements au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Plusieurs options: voir les schémas.

A AVEC SANGLES DROITES

- 1) Manchon de bras.
- 2) Avec sangle thoracique.
- 3) Avec manchon de bras et sangle thoracique.

B AVEC SANGLE CROISÉE DANS LE DOS

- 4) Manchon de bras.
- 5) Vue de dos.
- 6) Avec sangle thoracique.

Utilisez la bande la plus longue comme manchon : à l'aide des attaches auto-agrippantes, faites une boucle à chaque extrémité pour maintenir le bras. Utilisez la bande courte comme sangle thoracique.

ENTRETIEN

Laver à l'eau froide. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

COMPOSITION

74% Polyamide - 26% Coton



SANS LATEX

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.