


Notice de montage et d'utilisation KIT BATTERIE

(compatibles sur tous les fauteuils INNOVSA)

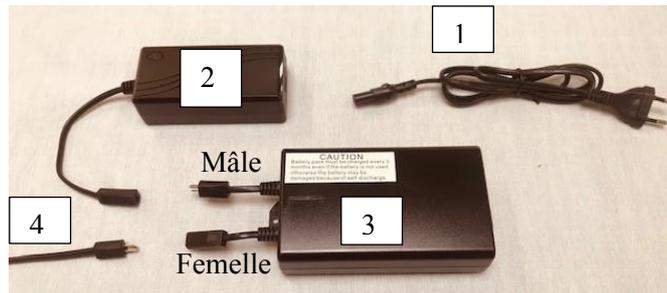

(1) Câble d'alimentation 220 V (déjà présent sur votre fauteuil) – **(2) Transformateur** (déjà présent sur votre fauteuil) – **(3) Batterie** - **(4) Câble d'alimentation du vérin** (déjà présent sur votre fauteuil)

Vous souhaitez passer votre fauteuil électrique INNOVSA en mode batterie.

- Débrancher le transformateur présent sur votre fauteuil de votre câble vérin (2)
- Brancher la fiche mâle de votre câble vérin (4) à la fiche femelle de votre batterie (3)

! Votre batterie dispose d'une autonomie d'environ 200 cycles.

Pour recharger votre batterie


- Débrancher votre batterie (3) de la fiche mâle de votre vérin (4)
- Brancher la fiche mâle de la batterie dans la fiche femelle du transformateur de votre fauteuil (2) sauf Gamme Dispositif Médicaux
- Brancher la fiche femelle de votre câble 220 v (1) sur la fiche mâle de votre transformateur
- Relier l'ensemble à une prise 220 V (3 + 2 + 1)

! Le temps de charge de votre batterie est d'environ 6h.

- **Voyant orange** : batterie est à recharger ou en cours de chargement
- **Voyant vert** : batterie rechargée

Fixation de votre batterie

- Pour les fauteuils COCOON, SWEETY et NOSTRESS
Fixer votre batterie sur le châssis du fauteuil grâce au velcro qui vous est fourni.

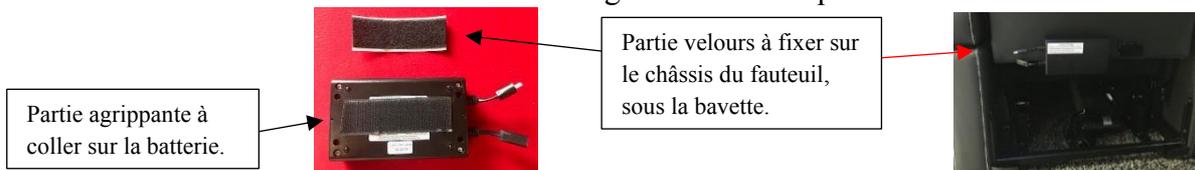

- Pour les fauteuils coquille ou fauteuils à pousser
Fixer le panier métallique qui vous est fourni sur la barre de poussée, comme montré ci-dessous en fonction du modèle de votre fauteuil et positionner votre batterie à l'intérieur



! **La batterie doit être chargée tous les jours pour éviter sa détérioration.**
La batterie doit être impérativement rechargée quand le voyant est orange.
La batterie ne doit pas être rangée dans une poche.
Votre batterie ne doit pas être stockée dans un endroit humide ou chaud.