



DONJOY[®]

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR À QUI LE DISPOSITIF S'ADRESSE:

Le dispositif s'adresse à un médecin autorisé, le patient, l'aide-soignant ou un membre de la famille qui prodigue les soins au patient. L'utilisateur doit être capable de :

- Lire, comprendre et être physiquement apte à respecter toutes les consignes, les avertissements et les précautions qui figurent dans le mode d'emploi.

UTILISATION / INDICATIONS

- Entorses acromio-claviculaires, Luxations.
- Fractures de la clavicule, de la tête humérale.
- Post-opératoire.
- Neurologie : paralysies, hémiplésies.
- Rhumatologie : périarthrite scapulo-humérale.

CONTRE-INDICATIONS

- Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

En cas de douleur, de gonflement, de changements au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- 1) Positionner le gilet en plaçant l'épaulette sur le membre à maintenir. Le gilet étant bilatéral, inverser le sens en fonction de l'épaule à traiter.
- 2) Une fois l'épaulette bien positionnée, ramener le plastron autour du tronc. Garder le bras opposé relevé, afin de bien apprêter le gilet. Passer le plastron sous le bras et l'agripper au dos, pour fermer le gilet.
- 3) Entourer l'avant-bras avec l'écharpe, remonter l'écharpe afin que l'avant-bras soit soutenu à la bonne hauteur et refermer l'écharpe en l'agrippant sur les attaches autoagrippantes supérieures prévues à cet effet sur le plastron. L'étiquette DonJoy devant être vers l'avant.
- 4) Agripper la bande postérieure sur l'écharpe, afin de bien plaquer le coude.

ENTRETIEN

Laver à l'eau tiède à l'aide d'un détergent doux. Ne pas utiliser d'agent blanchissant. Rincer abondamment. Sécher à l'air libre. Ne pas sécher au sèche-linge. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

COMPOSITION

Polyamide, Polyester, Polyuréthane, Résine Synthétique, Polypropylène, Caoutchouc Naturel



MISE EN GARDE : CE PRODUIT CONTIENT DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES RÉACTIONS ALLERGIQUES.

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.