



FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION / INDICATIONS :

Le PSA-2 est un coussin anatomique avec attelle de bras, bandoulière diagonale ajustable à l'épaule et ceinture à la taille. Toutes les parties sont rattachées au coussin.

INDICATIONS

- Guérison des lésions de la coiffe des rotateurs
- Bursite subacromiale
- Acromioplastie
- Arthroplastie de l'épaule
- Travail de mobilité suite à une épaule bloquée

CONTRE-INDICATIONS :

Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

Ce produit est destiné à l'usage sur un seul patient uniquement. En cas de douleur, de gonflement, de changements au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION :

La première application sur le patient devrait toujours être effectuée par un professionnel de la santé.

Le professionnel de la santé devra indiquer au patient s'il peut ôter le coussin, notamment pour se laver.

1. Détachez les deux sangles des fermetures à clip afin de les raccourcir à la longueur souhaitée. Pour ce faire, détachez simplement les bandes auto-agrippantes (dentelées) et coupez les sangles à la longueur souhaitée. Rattachez ensuite les sangles et insérez les sangles dans les fermetures jusqu'à entendre un clic. (Fig. 2).
2. Ouvrez l'attelle en détachant les bandes auto-agrippantes sur le dessus (Fig. 3). Le patient peut également ouvrir l'attelle plus tard sans devoir défaire tout l'immobilisateur afin de réajuster la position du bras dans l'attelle ouverte.
3. Si nécessaire, desserrez la troisième sangle de l'attelle au niveau de l'épaule.
4. Rattachez les trois sangles de l'attelle de bras et assurez-vous que la position de votre avant-bras est à la fois stable, sécurisée et confortable et ne provoque aucune douleur (Fig. 4).
5. Assurez-vous d'avoir une bonne antéimpulsion et réimpulsion de l'épaule en repositionnant le coussin si nécessaire.
6. Refermez la sangle de l'épaule et placez le rembourrage d'épaule sur le devant de votre épaule non blessée. Ajustez la longueur si nécessaire, puis serrez ou desserrez la sangle au niveau de la fermeture à clip. Passez la ceinture autour de votre taille et ajustez-la tel que décrit au point 5 (Fig. 1).

Remarque : le PSA-2 doit tenir fermement le bras mais ne doit pas être inconfortable. Pour éviter une réimpulsion non souhaitée, vérifiez l'ajustement du dispositif en position couchée.

ENTRETIEN :

Le revêtement du coussin et les sangles peuvent être lavés à 40 °C. Pour ce faire, fermez entièrement les bandes auto-agrippantes. Utilisez un cycle de lavage réservé aux vêtements délicats ou à la laine et n'utilisez pas d'adoucissant ni de détergent pour laine. Laver séparément. Sécher à l'air libre. La doublure en mousse n'est pas lavable.

COMPOSITION :

40 % coton, 30 % polyester, 30 % caoutchouc mousse.

GARANTIE :

DJO, LLC réparera ou remplacera l'ensemble ou une partie du produit ainsi que ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une durée de six mois à compter de la date de vente.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.