



**DONJOY**<sup>®</sup>

# FRANÇAIS

**LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.**

## UTILISATION / INDICATIONS

- Prévention et traitement des douleurs lombaires chroniques ou aiguës.
- Spécialement indiqué pour les patients nécessitant un support abdominal (patients en surpoids ou souffrant d'hernie abdominale ou de faiblesse musculaire).

## CONTRE-INDICATIONS

- Grossesse.
- S'assurer de choisir la taille correcte et régler les sangles latérales selon la compression requise.

## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Ce produit est destiné à l'usage d'un seul patient uniquement. En cas de douleur, de gonflement, de changements au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.

## INSTRUCTIONS D'APPLICATION

1. Relâcher les sangles latérales élastiques.
2. Positionner la ceinture autour de la taille, en la plaçant sur la partie sacro-lombaire du patient. Fermer la ceinture à l'aide de la fermeture auto-agrippante.
3. Tirer les sangles latérales élastiques au niveau de compression souhaitée et les apposer sur l'avant de la ceinture, à l'aide de la fermeture auto-agrippante.

## ENTRETIEN

Laver à l'eau tiède à l'aide d'un détergent doux. Ne pas utiliser d'agent blanchissant. Rincer abondamment. Sécher à l'air libre. Ne pas sécher au sèche linge. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

## COMPOSITION

Polyamide, Polyester, PVC, Gomme, Elasthan, Acier



**MISE EN GARDE : CE PRODUIT CONTIENT DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES RÉACTIONS ALLERGIQUES.**

## RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

**GARANTIE** DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

**AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.**