



**DONJOY**<sup>®</sup>

# FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

## UTILISATION / INDICATIONS

- Traitement et prévention des lombagos chroniques ou aigus. Assistance lors de travaux de force.

## CONTRE-INDICATIONS

- Aucune
- Pour une efficacité maximale, choisissez bien la bonne taille.

## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Ce produit est destiné à l'usage d'un seul patient uniquement. En cas de douleur, de gonflement, de changements au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.

## INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Positionnez la ceinture autour de la taille et fermez à l'aide des fermetures auto-agrippantes.

La ceinture lombaire est livrée avec un étui en tissu aéré amovible et un Pack de Chaud/Froid réutilisable.

### PACK DE CHAUD/FROID - INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Usage auquel le produit est destiné : ensemble thérapeutique à utiliser pour les douleurs générales, les enflures et les ecchymoses.

### DIRECTIVES D'UTILISATION POUR LE TRAITEMENT PAR LE FROID

1. Mettre la compresse de gel au congélateur pendant au moins 1 heure.
2. Retirer la compresse de gel du congélateur.
  - Placer la compresse dans l'étui textile amovible livré avec la ceinture lombaire.
  - Positionner l'étui textile contenant la compresse sur la partie interne de la ceinture, au niveau de la zone à traiter.
  - Fixer l'étui textile et la compresse grâce à la bande auto-agrippante située sur l'extérieur de l'étui textile.

Toujours se fier au niveau de confort personnel. Si la compresse est trop froide, la retirer et attendre jusqu'à ce que la température soit acceptable.

3. Après utilisation, entreposer les compresses de gel à la température ambiante.

### DIRECTIVES D'UTILISATION POUR LE TRAITEMENT PAR LA CHALEUR (BASÉES SUR UN FOUR À MICRO-ONDES DE 1 200 W)

#### NE PAS CHAUFFER L'ETUI TEXTILE DANS LE FOUR A MICRO-ONDES

1. La compresse de gel doit être à la température ambiante avant d'aller au four à micro-ondes.
2. Poser la compresse de gel à plat dans le four à micro-ondes. Chauffer à puissance maximale pendant 45 secondes.
3. Retirer du four à micro-ondes et vérifier la température. (La température continuera de monter légèrement).
4. Si une température plus élevée est voulue, remettre au four à micro-ondes et faire chauffer 10 secondes à la fois. Le chauffage excessif du sachet peut en provoquer la rupture et occasionner une fuite. Garder hors de portée des enfants.
5. • Retirer la compresse de gel du four à micro-ondes.
  - Placer la compresse dans l'étui textile amovible livré avec la ceinture lombaire.
  - Positionner l'étui textile contenant la compresse sur la partie interne de la ceinture, au niveau de la zone à traiter.
  - Fixer l'étui textile et la compresse grâce à la bande auto-agrippante située sur l'extérieur de l'étui textile.

Après 1 heure, les compresses de gel peuvent être réchauffées pendant 45 secondes.

## ATTENTION

Pour éviter les gelures, les séances de traitement par le froid ne devraient pas dépasser 20 minutes à la fois. Observer la compresse de gel lorsqu'elle chauffe. Si la compresse de gel commence à prendre de l'expansion, arrêter le four à micro-ondes. Ne pas appliquer la compresse de gel directement sur la peau. Utiliser uniquement selon le mode d'emploi. Les personnes souffrant de problèmes circulatoires doivent consulter un médecin avant d'utiliser ce produit. Ne pas utiliser ce produit avec des analgésiques ou des onguents topiques.

Ce produit est non toxique, mais il n'est pas destiné à être mangé. Si de la chaleur supplémentaire est nécessaire, attendre 1 heure avant de réchauffer le sachet à nouveau. Le chauffage excessif du sachet peut en provoquer la rupture et occasionner une fuite. Garder hors de portée des enfants.

## ENTRETIEN

Laver à l'eau tiède à l'aide d'un détergent doux. Ne pas utiliser d'agent blanchissant. Rincer abondamment. Sécher à l'air libre. Ne pas sécher au sèche linge. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

## COMPOSITION

Polyamide, Polyester, PVC, Elasthan, Acier



**SANS LATEX**

## RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

**GARANTIE** DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

**AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.**