



FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

USAGE/INDICATIONS : Limite la flexion, l'extension et la rotation de la colonne cervicale pour promouvoir la réhabilitation du patient.

CONTRE-INDICATIONS : Aucune

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS : En cas de douleur, gonflements, modifications de la sensation ou toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin.

INFORMATIONS CONCERNANT L'APPLICATION :

- 1) Après avoir choisi la taille correcte, appliquer la pièce **ARRIÈRE** du collier derrière le cou du patient. Le collier doit être centré et la flèche avant doit pointer vers le haut.
- 2) Appliquer la pièce **AVANT** du collier devant le cou du patient avec le menton bien calé dans le renforcement. Centrer le collier afin d'assurer un alignement neutre. La pièce **AVANT** du collier doit chevaucher la pièce **ARRIÈRE** du collier.
- 3) Pour attacher le collier, tirer les sangles de la pièce **ARRIÈRE** autour du cou jusqu'à la pièce **AVANT**. Pour améliorer l'immobilisation et le confort, effectuer de petits réglages bilatéraux sur les sangles.
- 4) Si nécessaire, un tricot tubulaire en coton est disponible pour une utilisation au niveau des panneaux **AVANT** et **ARRIÈRE** du collier pour plus de confort.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : Laver à la main à l'eau chaude avec un savon doux. Rincer abondamment. Faire sécher séparément À L'AIR.

RÉSERVÉ À L'USAGE SUR UN SEUL PATIENT.

SANS LATEX

GARANTIE : DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENDRA TOUTE BLESSURE.