



1



2

FRANÇAIS

AVANT D'APPLIQUER L'ORTHÈSE, LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS. UN BON POSITIONNEMENT EST ESSENTIEL AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ORTHÈSE.

UTILISATION/INDICATIONS : fournit un support au talon pour aider à éliminer les vibrations et les chocs. Réduit la pression au niveau de l'épine calcanéenne et de l'aponévrosite plantaire.

CONTRE-INDICATIONS : aucune

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS : en cas de douleur, gonflements, modifications de la sensation ou toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin. Le support doit être bien serré sans toutefois empêcher la circulation. Ne jamais porter le support sur une blessure ouverte.

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSITIONNEMENT :

- 1) Placer la talonnette dans le talon de la chaussure, côté plat vers la semelle de la chaussure.
- 2) La talonnette doit être placée autant que possible à l'arrière de la chaussure.
- 3) Mettre le pied dans la chaussure.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : laver à la main et à l'eau chaude avec un savon doux et rincer abondamment. LAISSER SÉCHER À L'AIR. Remarque : si le produit est mal rincé, le savon résiduel est susceptible de provoquer des irritations et d'endommager le produit.

GARANTIE: DJO LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ces accessoires pour tout défaut de matériel ou de façon pour une période de six mois à compter de la date de vente.

POUR UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT.

SANS LATEX

AVIS : LA FABRICATION DE CE PRODUIT A FAIT L'OBJET DE TOUS LES EFFORTS POSSIBLES ET DES TECHNOLOGIES LES PLUS AVANCÉES AFIN D'ASSURER UNE COMPATIBILITÉ, UNE ROBUSTESSE, UNE DURABILITÉ ET UN CONFORT DE PLUS HAUT NIVEAU. CE PRODUIT NE CONSTITUE QU'UN DES ÉLÉMENTS DU TRAITEMENT PRESCRIT PAR UN MÉDECIN. IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENDRA TOUTE BLESSURE.