



AVANT D'UTILISER CE DISPOSITIF, LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES DANS LEUR INTÉGRALITÉ. UNE APPLICATION ADEQUATE EST ESSENTIELLE AU BON USAGE DU PRODUIT.

PROFIL DE L'UTILISATEUR

- Le dispositif s'adresse à un médecin autorisé, le patient, l'aide soignant ou un membre de la famille qui prodigue les soins au patient. L'utilisateur doit être capable de :
- Lire, comprendre et être physiquement apte à respecter toutes les consignes, les avertissements et les précautions qui figurent dans le mode d'emploi.

UTILISATION/INDICATIONS

- Indications nécessitant support et stabilisation du genou, avec option cryothérapie et compression, telles que : instabilités légères à modérées des ligaments latéraux, lésions méniscales, lésions fémoropatellaires, ostéoarthrose, douleurs ou oedèmes, usage postopératoire pour chirurgie du genou.

CONTRE-INDICATIONS

Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Nous recommandons qu'un professionnel de santé supervise la première application.
- En cas de douleur, gonflements, modifications des sensations ou toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- 1) Placer le manchon de genou autour de la jambe avec l'ouverture centrée sur la rotule. La valve positionnée vers le haut du manchon.
- 2) Placer les articulations dans les pochettes prévues à cet effet et les positionner de chaque côté du manchon de genou, à l'aide des auto-agrippants. Aligner le centre des articulations avec le centre de la rotule. Aligner les 2 articulations au même niveau, de chaque côté du manchon de genou.
- 3) Fixer le manchon de genou en attachant les sangles de cuisse et de mollet à l'aide des fermetures auto-agrippantes.
- 4) Taille XL : Fixer les sangles d'extension aux sangles de cuisse et de mollet du manchon de genou. Enrouler les sangles autour du manchon de genou et des articulations, pour un maintien adéquat.

CRYOTHERAPIE ET COMPRESSION

Pour un traitement associant Cryothérapie et Compression, le manchon de genou contient 1 housse gonflable, 1 pompe manuelle et 2 packs de froid.

UTILISATION/INDICATIONS

- Application externe localisée de Cryothérapie et de Compression, à utiliser après blessure ou intervention chirurgicale type prothèse totale ou partielle de genou, pour aider à réduire l'inflammation, l'œdème et la douleur.

CONTRE-INDICATIONS - COMPRESSION ET FROID

NE PAS utiliser ce dispositif sur des patients souffrant des pathologies suivantes :

- Maladie de Raynaud ou autres maladies angioplastiques ; diabète ; drépanocytose, artériosclérose, cryoglobulinémie, trouble d'hypercoagulation ou autres maladies vasculaires périphériques causant une ischémie ou une faible circulation sanguine locale ; circulation sanguine locale compromise ; infection locale de tissu ; allergie au froid, hypersensibilité au froid, lésion antérieure due au froid.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION - COMPRESSION ET FROID

- Avant usage, détacher le pack de froid du manchon de genou et le placer au congélateur durant 4 heures minimum. (Température congélateur domestique entre -12°C & -20°C).
- 5) Une fois refroidi, fixer le pack de froid sur le manchon de genou, à l'aide des auto-agrippants. S'assurer que la température est adéquate avant usage.
- **AVERTISSEMENT !** S'assurer de placer un linge entre la peau et le pack de froid (voir AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE) La température ne doit pas être inférieure à 5°C (interface peau/Pack de Froid).
- Appliquer le manchon de genou et les articulations, selon les Instructions 1-4.
- 6) Visser la pompe sur le manchon de genou et positionner la valve sur ON. Confler la housse jusqu'au niveau de compression souhaité. Une fois le niveau de compression souhaité atteint, positionner la valve sur OFF et détacher la pompe.
- **AVERTISSEMENT !** NE PAS gonfler et serrer le manchon de genou de manière excessive. S'assurer que le niveau de compression n'est pas trop serré afin de ne pas bloquer le flux sanguin ou autres fluides corporels. (voir AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE)
- **AVERTISSEMENT !** Sur recommandation d'un Professionnel de Santé : Appliquer sur le membre affecté pour la durée recommandée par le Professionnel de Santé (périodes de 20 à 30 minutes maximum en alternance avec périodes de repos adéquates). Renouveler l'application si nécessaire avec le second pack de froid. Remettre le premier pack de froid au congélateur. Ne pas s'endormir avec le pack de froid.
- 7) Pour dégonfler, visser la pompe sur le manchon de genou, positionner la valve sur ON, et appuyer sur le bouton à la base de la pompe pour libérer l'air.

Voir AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE - Page 14-19

ENTRETIEN

- La housse peut être lavée à la main et séchée à l'air libre.
- Les packs de froid contenant le gel peuvent être lavés à l'eau, avec une serviette ou une éponge humide.

COMPOSITION

Manchon de Genou

Housse Gonflable: Polyester, nylon

Pompe : Silicone, polyéthylène, PVC, résine ABS, gomme synthétique, acier

Articulations : Aluminium, polyéthylène

Pack de Froid

Gel: Glycol propylène, carboxyméthylcellulose sodique, eau

Tissu: Coton, nylon

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE: DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou une partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : LA FABRICATION DE CE PRODUIT A FAIT L'OBJET DE TOUS LES EFFORTS POSSIBLES ET DES TECHNOLOGIES LES PLUS AVANCÉES AFIN D'ASSURER UNE COMPATIBILITÉ, UNE ROBUSTESSE, UNE DURABILITÉ ET UN CONFORT DE PLUS HAUT NIVEAU. CE PRODUIT NE CONSTITUE QU'UN DES ÉLÉMENTS DU TRAITEMENT PRESCRIT PAR UN MÉDECIN. IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENDRA TOUTE BLESSURE.