



**DONJOY**<sup>®</sup>

## FRANÇAIS

**LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.**

### PROFIL DE L'UTILISATEUR À QUI LE DISPOSITIF S'ADRESSE

Le dispositif s'adresse à un médecin autorisé, le patient, l'aide-soignant ou un membre de la famille qui prodigue les soins au patient. L'utilisateur doit être capable de :

- Lire, comprendre et être physiquement apte à respecter toutes les consignes, les avertissements et les précautions qui figurent dans le mode d'emploi.

### UTILISATION / INDICATIONS

- Immobilisation post-opératoire totale après des lésions ligamentaires ou d'autres lésions du genou

#### Toutes les pathologies nécessitant une immobilisation du genou :

- Lésions ligamentaires
- Lésions patellaires
- Immobilisation en urgence ou diagnostic différé
- Genou impossible à examiner et suspicion de lésions

### CONTRE-INDICATIONS

- Nous recommandons qu'un professionnel effectue la première pose.

### AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Ce produit est destiné à l'usage d'un seul patient uniquement. En cas de douleur, de gonflement, de changements au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.

**AVERTISSEMENT:** Cette attelle est destinée à l'immobilisation du membre inférieur d'un patient, en usage post-traumatique ou postopératoire. Elle n'est PAS destinée à supporter le poids corporel d'un patient debout ou durant la marche.

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Positionner les 3 volets de façon à couvrir au mieux la jambe du patient.

- 1) Patient couché, positionner l'attelle ouverte sous la jambe en extension. Ajuster la sangle antiglisse interne sous la rotule.
- 2) Enveloppez l'attelle autour de la jambe en prenant soin de positionner la rotule dans l'ouverture antérieure prévue à cet effet.
- 3) Fermer l'attelle et serrer les sangles de fermeture. Une fois en place, l'attelle peut être enlevée et remise simplement en défaisant les boucles de fermeture. Les sangles doivent être serrées en fonction de la circonférence de la cuisse et du mollet, ni trop serrées, ni trop lâches.

Les baleines postérieures et latérales peuvent être modelées en fonction des besoins du patient. Pour cela, il suffit des les sortir de leur gaine par le haut (ouvrir la fermeture auto-agrippante au niveau des gaines et retirer les baleines) et de les courber plus ou moins selon l'angle désiré, avant de les remettre en place.

### ENTRETIEN

Laver à l'eau tiède (30°C) à l'aide d'un détergent doux. Ne pas utiliser d'agent blanchissant. Rincer abondamment. Sécher à l'air libre. Ne pas sécher au sèche linge. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

### COMPOSITION

Polyester, Polyuréthane, Polyamide, Elastodiène, Polypropylène, Coton, Aluminium



**MISE EN GARDE : CE PRODUIT CONTIENT DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES RÉACTIONS ALLERGIQUES.**

### RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

**GARANTIE** DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

**AVIS :** BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.