



DONJOY[®]

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION / INDICATIONS

- Immobilisation totale post-opératoire après des lésions ligamentaires ou d'autres lésions du genou

CONTRE-INDICATIONS

- Nous recommandons qu'un professionnel effectue la première pose.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

En cas de douleur, de gonflement, de modification de la sensation ou de toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation de ce produit, consulter immédiatement un médecin.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- 1) Ouvrir les sangles de fermeture
- 2) Positionner les 3 volets de façon à couvrir au mieux la jambe du patient, en plaçant la rotule dans l'ouverture prévue à cet effet. Essayer l'attelle sur la jambe du patient.
- 3) Fermer l'attelle et serrer les sangles de fermeture. Les sangles doivent être serrées en fonction de la circonférence de la cuisse et du mollet, ni trop serrées, ni trop lâches.

Remarque: Conformer la baleine postérieure permet un meilleur maintien.

ENTRETIEN

Lavez à la main dans de l'eau froide avec un savon doux, puis rincez abondamment. Laissez sécher à l'air. Ne pas laver en machine et ne pas utiliser d'eau de Javel.

COMPOSITION

- Polyester, Polyamide, Polyuréthane, Polypropylène, Aluminium



FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.