



FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION / INDICATIONS : Immobilisation et amplitude de mouvement protégée associées à un traitement post-traumatique, à des interventions chirurgicales sur le LCA, le LCP, le LCL ou le LCM, à des réalignements rotuliens et à la réparation du ménisque ou d'autres articulations. Ce produit est destiné à servir d'appoint aux divers traitements médicaux généralement appliqués dans les cas ci-dessus. Les réglages de l'amplitude de mouvement ainsi que la fréquence et la durée d'utilisation doivent être déterminés par le professionnel de santé prescripteur.

CONTRE-INDICATIONS : Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS : Consulter immédiatement un professionnel de santé en cas de douleur, de tuméfaction, de modification des sensations ou de toute autre réaction inhabituelle suite à l'utilisation de ce produit.

INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE EN PLACE :

1. Détacher les extrémités des sangles, ouvrir l'attelle et la mettre à plat.
2. Placer la jambe sur l'attelle à plat. Le montant le plus court se place sur la cuisse.
3. Faire coulisser les manchons latéraux en appuyant sur le bouton-poussoir jusqu'à obtention de la longueur souhaitée. S'assurer que la longueur des deux côtés est identique.
4. Aligner le montant avec le revêtement en mousse attaché au côté médial de la jambe. Bien enrouler les coussinets en mousse de la cuisse, en laissant le montant opposé détaché, et attacher au niveau antérieur, comme illustré. Positionner et presser le montant restant en place. S'assurer que les hauteurs d'articulation médiale et latérale soient identiques.
5. Fixer les sangles grâce aux boucles en D. Serrer d'abord les deux sangles les plus proches du genou avant d'attacher les autres.
6. Pour un retrait facile en une seule fois, détacher les sangles et ouvrir les tampons en mousse. L'orthèse peut ensuite être retirée et réappliquée en seule pièce.

INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE DE L'ARTICULATION :

7A) Régler l'articulation en appuyant sur les boutons de flexion et d'extension vers l'intérieur et faire tourner la butée jusqu'à ce que l'angle souhaité s'aligne avec le centre des boutons. Relâcher le bouton-poussoir et veiller à ce qu'il soit entièrement rétracté en position d'extension.

7B) Utiliser la fonction de verrouillage rapide à 0, 15 ou 30 degrés, en faisant coulisser le bouton de verrouillage rapide rouge vers l'intérieur jusqu'à ce que le dispositif de verrouillage soit enclenché. Veiller à ce que les montants ne tournent pas. Si un autre réglage du dispositif de verrouillage est nécessaire, se reporter à l'étape 5A et veiller à ce que les boutons de flexion et d'extension soient réglés au même angle.

AUTRES RÉGLAGES :

Les barres d'articulation peuvent être courbées pour les adapter au varus ou au valgus de la jambe.

- Plier chaque barre en maintenant fermement la barre de la cuisse ou du mollet contre une surface dure et appuyer délicatement et de façon constante sur l'articulation dans la direction souhaitée.
- Plier chaque barre latérale uniformément au-dessus et en dessous de l'articulation.
- Pour faciliter au maximum l'utilisation post-opératoire, régler le renfort avant l'opération lorsque cela est possible.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

Laver les revêtements en mousse à la main dans de l'eau tiède (30 °C) en utilisant un détergent doux. Rincer abondamment.

FAIRE SÉCHER À L'AIR LIBRE uniquement, ne pas faire sécher à la chaleur.

Un nettoyage régulier de la genouillère est recommandé.

Toujours consulter un médecin ou un thérapeute avant de modifier l'attelle.

GARANTIE : DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou une partie de l'appareil et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

COMPOSITION : Polypropylène 30 %, aluminium 40 %, nylon 25 %, delrin 3 %, acier inoxydable 2 %.

DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉE SUR UN SEUL PATIENT.

SUR PRESCRIPTION MÉDICALE UNIQUEMENT

FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, CE DISPOSITIF NE CONSTITUE QU'UN ÉLÉMENT DU PROGRAMME DE TRAITEMENT GLOBAL ADMINISTRÉ PAR UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ. IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

AVERTISSEMENT : LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE (ÉTATS-UNIS) EXIGE QUE CET APPAREIL SOIT VENDU UNIQUEMENT PAR OU SUR L'ORDRE D'UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ AUTORISÉ.