

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION/INDICATIONS : Ostéoarthrite (arthrite dégénérative) légère à modérée du genou unicompartimentale (un seul compartiment) ou autre blessure/chirurgie du cartilage. Rééducation postopératoire.

PROFIL DE L'UTILISATEUR POUR LEQUEL L'ATTELLE A ÉTÉ CONÇUE : Ce dispositif est prévu pour les utilisateurs qui sont physiquement et mentalement capables de suivre les instructions décrites dans ce mode d'emploi.

CONTRE-INDICATIONS : Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS : En cas de douleur, d'enflure, d'altération de la sensation ou de toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin.

INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE EN PLACE :

1. Desserrer les sangles et les rabats de sorte que l'attelle soit complètement ouverte.
2. Aligner le centre de la charnière avec le centre du genou.

REMARQUE : La barre de la charnière doit être placée sur le côté du genou qui n'est pas affecté.

3. Pour attacher l'attelle, enrouler d'abord le rabat de cuisse puis le rabat de mollet. Régler pour obtenir un ajustement adapté.
4. Faire passer les sangles par les anneaux en D et serrer.

Réglage de la charnière :

5. Tourner les deux boutons de la charnière dans le sens horaire pour augmenter le support. S'assurer que les chiffres augmentent en tournant les boutons. Régler au besoin pour aider à soulager les symptômes de l'ostéoarthrite.

REMARQUE : S'assurer que la différence ne dépasse pas deux chiffres.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :



Laver à la main avec de l'eau savonneuse à 30 °C.



Ne pas utiliser d'eau de javel.



Ne pas repasser.

COMPOSITION DES MATÉRIAUX : Polyester, aluminium, nylon, PVC, carbone, polycarbonate, velours, silicone

GARANTIE : DJO, LLC réparera ou remplacera l'ensemble ou une partie du produit ainsi que ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une durée de six mois à compter de la date de vente.

SUR ORDONNANCE UNIQUEMENT.

POUR USAGE SUR UN SEUL PATIENT UNIQUEMENT.

FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

AVERTISSEMENT : LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINNE (ÉTATS-UNIS) EXIGE QUE CET APPAREIL SOIT VENDU UNIQUEMENT PAR OU SUR L'ORDRE D'UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ AUTORISÉ.

