

MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover  
Germany



DJO, LLC  
1430 Decision Street  
Vista CA 92081-8553  
USA  
T +1 760.727.1280  
F +1 760.734.4712  
www.DJOGlobal.com



**DONJOY**<sup>®</sup>

CARPAFORM<sup>™</sup>





## FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

### PROFIL DE L'UTILISATEUR

- Le dispositif s'adresse à un médecin autorisé, le patient, l'aide soignant ou un membre de la famille qui prodigue les soins au patient. L'utilisateur doit être capable de : Lire, comprendre et être physiquement apte à respecter toutes les consignes, les avertissements et les précautions qui figurent dans le mode d'emploi.

### UTILISATION/INDICATIONS

Syndrome Canal carpien  
Tendinopathies/Ténosynovites

### CONTRE-INDICATIONS

- Aucune

### AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Nous recommandons qu'un professionnel de santé supervise la première application.
- En cas de douleur, gonflements, modifications des sensations ou toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin.
- Si l'attelle est portée directement sur la peau, la peau ne doit pas être humide et ne doit pas présenter de plaies, ni de traces de pommade, lotion, gel ou de résidus gras similaires.

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Ouvrez les sangles et glissez votre main à l'intérieure de l'attelle de telle sorte que les sangles se trouvent à l'extérieur de la main
- Fermez la sangle du milieu autour du poignet puis la sangle du bas sur l'avant bras
- Pour finir, passez la sangle supérieure à travers l'attelle et venez l'attacher entre le pouce et l'index pour fermer. Ajustez la sangle pour un meilleur confort.
- Modelez l'attelle pour une adaptation et un confort optimal tout en faisant bien attention à laisser le canal carpien dans la partie évidée.

### ENTRETIEN

Laver à l'eau tiède à l'aide d'un détergent doux. Ne pas utiliser d'agent blanchissant. Rincer abondamment. Sécher à l'air libre. Ne pas sécher au sèche linge. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

### COMPOSITION

Aluminium, Polyamide, Polyuréthane, Polyéthersulfone  
Elasthanne, Polyester



FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

### RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

**GARANTIE** DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

Si les conditions de cette garantie sont incompatibles avec la réglementation locale, les dispositions des réglementations locales s'appliquent.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.