


MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany

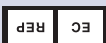

DJO, LLC
1430 Decision Street
Vista CA 92081-8553
USA
T +1 760.727.1280
F +1 760.734.4712
www.DJOGlobal.com



DONJOY[®]

DIGIFORM⁺[™]



1



2



3



4



5



6



7a



7b



7c



4 FINGERS

3 FINGERS

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR

Le dispositif s'adresse à un médecin autorisé, le patient, l'aide soignant ou un membre de la famille qui prodigue les soins au patient. L'utilisateur doit être capable de : Lire, comprendre et être physiquement apte à respecter toutes les consignes, les avertissements et les précautions qui figurent dans le mode d'emploi.

UTILISATION/INDICATIONS

Entorses et luxations de doigts, fractures (3 doigts et +). Immobilisation pré et post-opératoire du poignet.

CONTRE-INDICATIONS

• Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Nous recommandons qu'un professionnel de santé supervise la première application.
- En cas de douleur, gonflements, modifications des sensations ou toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin.
- Si l'attelle est portée directement sur la peau, la peau ne doit pas être humide et ne doit pas présenter de plaies, ni de traces de pommade, lotion, gel ou de résidus gras similaires.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- 1) Desserrer les sangles et glisser la main dans l'attelle
- 2) S'assurer que l'éclisse de doigts est réglée à la bonne hauteur (les doigts ne doivent pas dépasser de la base). Ajuster la hauteur de l'éclisse si nécessaire en s'assurant que son étui soit bien fixé au crochet de l'attelle.
- 3) Passer le pouce dans l'ouverture correspondante, en haut de l'attelle (gauche ou droite).

Remarque :

- a) La seconde ouverture doit rester vide.
 - b) La main et le poignet doivent être maintenus entre les deux éclisses.
 - c) Si besoin, repositionner l'éclisse dorsale pour assurer une position correcte.
 - d) Toutes les éclisses sont malléables et peuvent être modelées au profil de la main
- 4) Serrer d'abord la sangle du milieu, et la fixer à l'aide de l'auto agrippant.
 - 5) Serrer les deux autres sangles de fermeture.
 - 6) Puis serrer la sangle des doigts. La sangle est amovible, ajuster si nécessaire.
 - 7) Pour une immobilisation de 4 doigts, l'éclisse n'a pas besoin d'être ajustée. Pour une immobilisation de 3 doigts, replier l'éclisse du côté du doigt sain (la fente facilite le pliage).

ATTENTION, L'ÉCLISSE NE PEUT ÊTRE PLIÉE QU'UNE SEULE FOIS AU RISQUE DE LA FRAGILISER ET DE PROVOQUER SA RUPTURE.

ENTRETIEN

Laver à l'eau tiède à l'aide d'un détergent doux. Ne pas utiliser d'agent blanchissant. Rincer abondamment. Sécher à l'air libre. Ne pas sécher au sèche linge. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

COMPOSITION

Aluminium, Polyamide, Polyuréthane, PVC, Elasthanne, Polyester



FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

Si les conditions de cette garantie sont incompatibles avec la réglementation locale, les dispositions des réglementations locales s'appliquent.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

DONJOY®