

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION/INDICATIONS : Pour l'immobilisation des blessures des tissus mous, fractures et dislocation de l'articulation interphalangienne distale.

CONTRE-INDICATIONS : Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS : En cas de douleur, de gonflement, d'altération des sensations ou de toute réaction inhabituelle pendant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un professionnel de la santé. Ne jamais porter le support sur une plaie ouverte.

INFORMATIONS CONCERNANT L'APPLICATION :

- 1) Placer l'attelle sur le doigt dans la position souhaitée et fixer avec du ruban adhésif ou des sangles.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

Laver le revêtement à la main à l'eau tiède avec un savon doux et bien rincer. **LAISSER SÉCHER À L'AIR LIBRE. Remarque : Si le produit n'est pas bien rincé, le savon résiduel peut causer des irritations et endommager le matériau.**

GARANTIE: DJO LLC réparera ou remplacera tout ou partie du produit et de ces accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

À utiliser sur un seul patient.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.