



**Veillez lire tout le manuel d'instructions avant d'utiliser ce dispositif. Une application et un entretien adéquats sont essentiels au bon fonctionnement du produit.**

### UTILISATION PRÉVUE/INDICATIONS

L'attelle Exos Pouce II (Short Thumb Spica II, STS II) assure la stabilisation de la première articulation métacarpo-phalangienne (MCP) et peut être utilisée en période pré-opératoire, post-opératoire, post-traumatique ainsi qu'en cas de maladie dégénérative.

### CONTRE-INDICATIONS

Patients présentant des allergies connues aux mousses, adhésifs ou produits en plastique.

### ⚠ AVERTISSEMENTS et PRÉCAUTIONS

- ▶ L'attelle doit être placée par un professionnel des soins de santé qualifié.
- ▶ Ne pas faire chauffer l'attelle sur le corps du patient.
- ▶ S'assurer que l'attelle n'est pas trop chaude avant de la placer sur le patient.
- ▶ La taille de l'attelle doit être bien adaptée au patient pour assurer un bon maintien et un bon fonctionnement.
- ▶ Une précaution particulière est requise pour les patients à la peau délicate ou abîmée, particulièrement les personnes âgées. L'attelle ne doit pas être trop serrée, car elle POURRAIT appliquer trop de pression et cisailer les peaux fragiles. IL CONVIENT D'INFORMER LES PATIENTS SUR LA TENSION À APPLIQUER POUR L'ATTELLE PENDANT LES PÉRIODES D'UTILISATION CONTINUE. Une fausse manche ou un TRICOT peuvent être utilisés pour augmenter la protection.
- ▶ Ne pas faire chauffer les produits Exos™ à une température supérieure à 100 °C.
- ▶ POUR UN USAGE UNIQUE SUR UN SEUL PATIENT.

### CHAUFFE ET APPLICATION

- ▶ La bonne température est de 93 °C.
  - ▶ Chauffer l'attelle dans un four Exos™ pendant environ 3 minutes ou jusqu'à ce que l'attelle puisse être pliée. L'attelle ne doit pas être trop chaude. Il faut pouvoir la manier confortablement.
  - ▶ S'assurer que la peau est entièrement sèche avant application.
  - ▶ Placer l'attelle sur le patient. (Figure 1)
  - ▶ Fixer le crochet de fermeture sur le dos de la main. (Figure 2)
  - ▶ Fixer la sangle accessoire dans la position souhaitée. (Figure 3)
  - ▶ Mouler l'attelle dans la position souhaitée. (Figure 4)
- Avertissement : l'attelle ne doit pas être trop serrée. Cela pourrait appliquer une force mécanique excessive ou provoquer des cisaillements de la peau.**

### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

1. Desserrer ou retirer l'attelle.
2. Laver l'intérieur et l'extérieur de l'attelle ainsi que la peau au savon antibactérien et à l'eau (30 °C).
3. Rincer soigneusement à l'eau claire.
4. Utiliser un sèche-cheveux réglé sur un volume élevé et froid pour sécher soigneusement l'intérieur de l'attelle et la peau.
5. Resserrer l'attelle.



**Pour obtenir des astuces sur le placement de chaque dispositif Exos™ :**

Rendez-vous sur le centre réservé aux fournisseurs

Exos™ à l'adresse :

<http://exosmedical.com/provider/STSII> ou

scannez le QR code avec votre smartphone

### MATÉRIAUX UTILISÉS

Mousse EVA, élasthane, nylon, terpolymère, polyester

Traitement antimicrobien

### GARANTIE PRODUIT LIMITÉE

DJO, LLC réparera et remplacera tout ou une partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de 8 semaines à partir de la date d'achat.

Si les conditions de cette garantie sont incompatibles avec la réglementation locale, les dispositions des réglementations locales s'appliquent.