



1

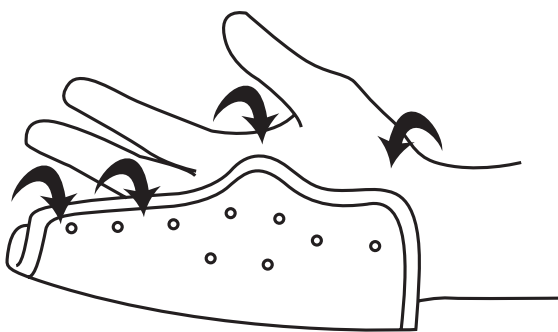

2

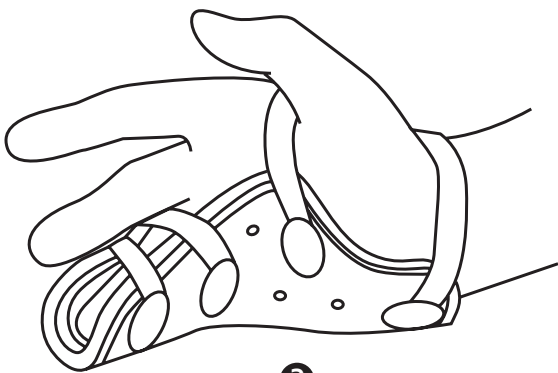

3

Veillez lire tout le manuel d'instructions avant d'utiliser ce dispositif. Une application et un entretien adéquats sont essentiels au bon usage du produit.

UTILISATION / INDICATIONS

L'Attelle de Main pour Fracture Cubitale (Hand Based Ulnar Gutter Brace, HB-UGB) permet de stabiliser les quatrièmes et cinquièmes métacarpes et articulations métacarpo-phalangiennes, ainsi que l'annulaire et l'auriculaire.

CONTRE-INDICATIONS

Patients présentant des allergies connues aux mousses, adhésifs ou produits en plastique.

⚠️ AVERTISSEMENTS et PRÉCAUTIONS

- ▶ L'attelle devrait être placée par un professionnel des soins de santé qualifié.
- ▶ Ne pas faire chauffer l'attelle sur le corps du patient.
- ▶ Assurez-vous que l'attelle n'est pas trop chaude avant de la placer sur le patient.
- ▶ La taille de l'attelle devrait être bien adaptée au patient pour assurer un bon maintien et un bon fonctionnement.
- ▶ Une précaution particulière est requise pour les patients à la peau délicate ou abîmée, particulièrement les personnes âgées. L'attelle ne devrait pas être trop serrée, car elle POURRAIT appliquer trop de pression et provoquer un cisaillement des peaux fragiles. IL CONVIENT D'INFORMER LES PATIENTS SUR LA TENSION À APPLIQUER POUR L'ATTELLE PENDANT LES PÉRIODES D'UTILISATION CONTINUE. Une fausse manche ou un TRICOT peuvent être utilisés pour augmenter la protection.
- ▶ Ne pas faire chauffer les produits Exos™ à une température supérieure à 100° C.
- ▶ À N'UTILISER QUE SUR UN SEUL PATIENT.

CHAUFFE ET APPLICATION

- ▶ La bonne température est de 93° C.
 - ▶ Chauffer l'attelle dans un four Exos™ pendant environ 5 minutes ou jusqu'à ce que l'attelle puisse être pliée. L'attelle ne devrait pas être trop chaude. Il faut pouvoir la manier confortablement.
 - ▶ S'assurer que la peau est entièrement sèche avant application.
 - ▶ Aligner l'attelle avec la paume afin que la courbe suive le pli du théнар. (Figure 1)
 - ▶ Attacher l'attelle autour de la main.
 - ▶ Fixer les bandes Velcro comme indiqué. Deux bandes courtes permettent de maintenir les doigts et deux bandes longues maintiennent l'écart du côté du pouce et du poignet, comme indiqué. (Figure 2)
 - ▶ Mouler l'attelle jusqu'à obtention de la position souhaitée. (Figure 3)
- Avertissement : l'attelle ne doit pas être trop serrée. Cela pourrait appliquer une force mécanique excessive ou provoquer des cisaillements de la peau.**

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

1. Desserrer ou retirer l'attelle.
2. Laver l'intérieur et l'extérieur de l'attelle ainsi que la peau à l'eau et au savon antibactérien (86°F / 30°C).
3. Rincer soigneusement à l'eau claire.
4. Utiliser un sèche-cheveux réglé sur un volume élevé et froid pour sécher soigneusement l'intérieur de l'attelle et la peau.
5. Resserrer l'attelle.



Pour obtenir des astuces sur le placement de chaque dispositif Exos™ :

rendez-vous sur le centre réservé aux fournisseurs Exos™ à l'adresse :

<http://exosmedical.com/provider/HB-UGB> ou

Scanner le code QR avec votre téléphone intelligent

MATÉRIAUX UTILISÉS

Coque : mousse en EVA, élasthanne, nylon, terpolymère, polyester
Traitement antimicrobien

GARANTIE PRODUIT LIMITÉE

DJO, LLC réparera et remplacera tout ou une partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de 8 semaines à partir de la date d'achat.

Si les conditions de cette garantie sont incompatibles avec la réglementation locale, les dispositions des réglementations locales s'appliquent.