



# FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

## UTILISATION / INDICATIONS

- Trauma des membres supérieurs. Neurologie : paralysie, hémiplégié.

## CONTRE-INDICATIONS

- Aucune

## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

En cas de douleur, de gonflement, de changements au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.

## INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- 1) Placez l'avant-bras dans le manchon avec l'étiquette à l'extérieur et les sangles vers le haut.
- 2) Passez les sangles sur les épaules.
- 3) Croisez les sangles dans le dos.
- 4) Ramenez les sangles en avant en les faisant passer sous le manchon. Fixez les sangles sur le manchon à l'aide des attaches en Velcro.
- 5) Pour immobiliser le bras contre le corps, fixez la sangle thoracique sur le manchon et enroulez-la autour du thorax.

## ENTRETIEN

Laver à l'eau froide. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

## COMPOSITION

61% Polyamide - 30% Coton - 5% Polyester - 4% Fibranne



**SANS LATEX**

## RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

**GARANTIE** DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.