

DONJOY®

Support Everest™ Ice II

Support Everest™ Ice II

Hinged knee brace with Cold Compression

Genouillère articulée avec Cryothérapie et Compression

Tutore per ginocchio con aste articolate con compressione a freddo

Rodillera articulada con compresión fría

Knieorthese mit Gelenk mit Kältekompression

Scharnierende Kniebrace met koude
compressie

Knæskinne med hængsler med kold
kompression

Ledad knäortos med kylkompression

Hengslet knestøtte med kuldekompresjon

Saranoitu polvituki ja kylmäkompressio

Joelheira articulada com compressão a frio





DJO®

SUPPORT EVEREST™ II



SUPPORT EVEREST™ ICE II

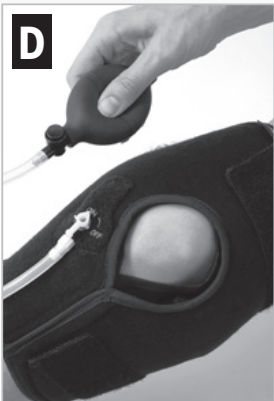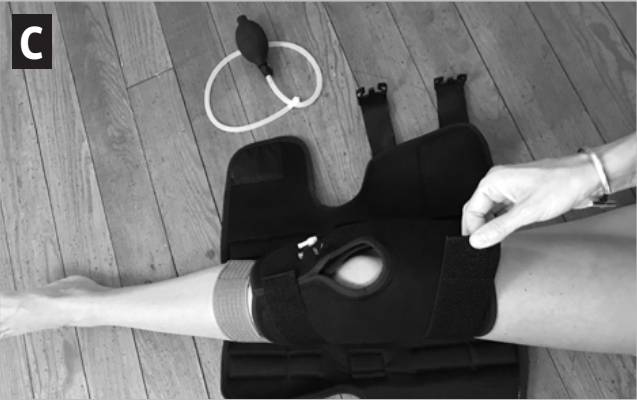

SUPPORT EVEREST™ II GENOUILÈRE ARTICULÉE

PROFIL DE L'UTILISATEUR À QUI LE DISPOSITIF S'ADRESSE

Le dispositif s'adresse à un médecin autorisé, le patient, l'aide-soignant ou un membre de la famille qui prodigue les soins au patient. L'utilisateur doit être capable de :

- Lire, comprendre et être physiquement apte à respecter toutes les consignes, les avertissements et les précautions qui figurent dans le mode d'emploi.

UTILISATION/INDICATIONS

- Utilisation post-traumatique, pré- ou post-opératoire, réadaptation fonctionnelle, reprise d'activité.
- Lésions modérées du LCA/LCP, lésions modérées à graves des ligaments latéraux (LLI, LLE), lésions méniscales, chirurgie du genou.

CONTRE-INDICATIONS

Aucune

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

L'attelle est munie de 2 articulations latérales bloquées en extension et d'une baleine postérieure amovible située au niveau du creux poplité. Cette baleine est préformée, mais peut aussi être modelée selon les besoins du patient, ou retirée.

Patient allongé sur le dos, ouvrir l'attelle.

- 1 - Positionner la jambe du patient sur l'attelle, le genou centré entre les 2 articulations latérales. Refermer la bande anti-glisement sur le mollet à l'aide des fermetures auto-agrippantes.
- 2 - Fermer l'attelle au niveau de la cuisse et du mollet à l'aide des fermetures auto-agrippantes.
- 3 - Ajuster les 4 sangles à la longueur désirée et les fermer à l'aide des boucles (clips) de fermeture. Ajuster le serrage en fonction du niveau de compression souhaité.

Articulations

- Pour régler la flexion/extension, ouvrir le couvercle de chacune des articulations, placer les plots à l'angle souhaité, puis refermer le couvercle de l'articulation.
- Pour éviter d'endommager les articulations les positions des plots de flexion et d'extension doivent être identiques sur les deux articulations.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Nous recommandons qu'un professionnel de santé supervise la première application.
- En cas de douleur, gonflements, modifications des sensations ou toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin.

ENTRETIEN

- Laver à la main à l'eau tiède (30 °C) à l'aide d'un détergent doux
- Laisser sécher à l'air libre (ne pas placer sur un radiateur ou une autre source de chaleur)
- Ne pas utiliser de javel ou de chlore, et ne pas repasser.

MANCHON DE GENOU

- La housse peut être lavée à la main et séchée à l'air libre. Les packs de froid contenant le gel peuvent être lavés à l'eau, avec une serviette ou une éponge humide.

COMPOSITION

Attelle: Aluminium, polyester, polyamide, mono filament, polyuréthane, coton, élastomère, résine caoutchouc, acetal (POM), polypropylène, polyéthylène

Manchon de Genou -

Housse Gonflable: Polyester, nylon

Pompe : Silicone, polyéthylène, PVC, résine ABS, gomme synthétique, acier

Pack de Froid - Gel: glycol propylène, carboxyméthylcellulose sodique, eau

Tissu: coton, nylon



MISE EN GARDE : CE PRODUIT CONTIENT DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES RÉACTIONS ALLERGIQUES.

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE: DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou une partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : LA FABRICATION DE CE PRODUIT A FAIT L'OBJET DE TOUS LES EFFORTS POSSIBLES ET DES TECHNOLOGIES LES PLUS AVANCÉES AFIN D'ASSURER UNE COMPATIBILITÉ, UNE ROBUSTESSE, UNE DURABILITÉ ET UN CONFORT DE PLUS HAUT NIVEAU. CE PRODUIT NE CONSTITUE QU'UN DES ÉLÉMENTS DU TRAITEMENT PRESCRIT PAR UN MÉDECIN. IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENDRA TOUTE BLESSURE.

SUPPORT EVEREST™ ICE II GENOILLÈRE ARTICULÉE AVEC CRYOTHÉRAPIE ET COMPRESSION

Pour un traitement associant Cryothérapie et Compression, l'attelle est livrée avec un MANCHON de GENOU comprenant 1 Housse Gonflable, 1 Pompe Manuelle et 2 Packs de Froid.

UTILISATION/INDICATIONS

- A utiliser UNIQUEMENT avec l'Attelle de Genou SUPPORT EVEREST.
- Application externe localisée de Cryothérapie et de Compression, à utiliser après blessure ou intervention chirurgicale, pour aider à réduire l'inflammation, l'œdème et la douleur.

CONTRE-INDICATIONS

NE PAS utiliser ce dispositif sur des patients souffrant des pathologies suivantes :

Maladie de Raynaud ou autres maladies angiospastiques ; diabète ; drépanocytose, artériosclérose, cryoglobulinémie, trouble d'hyper coagulation ou autres maladies vasculaires périphériques causant une ischémie ou une faible circulation sanguine locale ; circulation sanguine locale compromise; infection locale de tissu ; allergie au froid, hypersensibilité au froid, lésion antérieure due au froid.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Avant usage, détacher le Pack de Froid du Manchon de Genou et le placer au congélateur durant 4 heures minimum. (Température congélateur domestique entre -12°C & -20°C).

A - Une fois refroidi, fixer le Pack de Froid sur le Manchon de Genou, à l'aide des auto-agrippants.

S'assurer que la température est adéquate avant usage.

• **AVERTISSEMENT !** S'assurer de placer un linge entre la peau et le Pack de Froid (Voir "AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE"). La température ne doit pas être inférieure à 5°C (interface peau/Pack de Froid).

B - Placer le Manchon autour du genou avec l'ouverture centrée sur la rotule. Fixer le Manchon de Genou en attachant les sangles de Cuisse et de Mollet à l'aide des fermetures auto-agrippantes.

C - Mettre en place l'ATTELLE DE GENOU SUPPORT EVEREST par-dessus le Manchon de Genou. (Suivre les "INSTRUCTIONS D'APPLICATION" 1 à 3).

D - Visser la pompe sur le Manchon de Genou et positionner la valve sur ON. Gonfler la Housse jusqu'au niveau de compression souhaité.

Une fois le niveau de compression souhaité atteint, positionner la valve sur OFF et détacher la pompe.

• **AVERTISSEMENT !** NE PAS gonfler et serrer le Manchon de Genou de manière excessive. S'assurer que le niveau de compression n'est pas trop serré afin de ne pas bloquer le flux sanguin ou autres fluides corporels. (Voir "AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE").

• **AVERTISSEMENT !** recommandation d'un Professionnel de Santé : Appliquer sur le membre affecté pour la durée recommandée par le Professionnel de Santé (périodes de 20 à 30 minutes maximum en alternance avec périodes de repos adéquates).

Renouveler l'application si nécessaire avec le second Pack de Froid. Remettre le premier Pack de Froid au congélateur. Ne pas s'endormir avec le Pack de Froid.

E - Pour dégonfler, visser la pompe sur le Manchon de Genou, positionner la valve sur ON, et appuyer sur le bouton à la base de la pompe pour libérer l'air.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

AVERTISSEMENT ! LE FROID GÉNÉRÉ PAR CE DISPOSITIF EST SUFFISANT POUR PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES. LE RECOURS À CE DISPOSITIF PEUT AVOIR DES EFFETS INDÉSIRABLES GRAVES ET PRÉSENTER DES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ.

UTILISATION DU MANCHON DE GENOU AVEC HOUSSE GONFLABLE & PACK DE FROID :

- Un professionnel de santé agréé doit indiquer la durée et la fréquence d'utilisation du produit ainsi que les périodes de repos adéquates.
- Faire preuve d'extrême prudence lors de l'utilisation de tout système de cryothérapie. Tout produit froid peut causer des blessures, telles que par exemple des brûlures, des ampoules, des gelures, des gonflements, une décoloration ou la nécrose de la peau ou des tissus, s'il est incorrectement utilisé ou surveillé.
- **AVERTISSEMENT !** NE PAS gonfler et serrer le Manchon de Genou de manière excessive. S'assurer que le niveau de compression n'est pas trop serré afin de ne pas bloquer le flux sanguin ou autres fluides corporels.
- **AVERTISSEMENT !** Le froid généré par ce dispositif est suffisant pour provoquer des blessures graves, notamment la nécrose de tissus. Il est impératif de pouvoir souvent vérifier l'état de la peau sous le Pack de Froid (au moins une fois toutes les heures). NE PAS utiliser ce dispositif s'il n'est pas possible de vérifier souvent l'état de la peau (au moins une fois toutes les heures). Être attentif aux symptômes suivants : augmentation de la douleur, brûlure, engourdissement, picotement, rougeur accentuée, décoloration, démangeaisons, gonflement, boursouffures, irritation ou autres changements de l'état cutané sous le Pack de Froid ou autour du site de traitement. Si une de ces conditions survient, interrompre immédiatement l'utilisation de ce dispositif et appeler un médecin.
- **AVERTISSEMENT !** L'application de Packs de Froid directement sur la peau peut causer des blessures graves, notamment la nécrose de tissus. NE PAS laisser une quelconque partie du Pack de Froid toucher la peau. TOUJOURS utiliser avec une barrière entre la peau et le Pack de Froid.
- Maintenir le produit hors de portée des enfants.
- Tous les ingrédients des Packs de Froid sont non toxiques. Ils ne sont cependant pas destinés à être ingérés.
- Ne pas chauffer les packs de froid (micro-ondes, four, eau chaude, etc...)
- Ne pas utiliser en cas de plaies ouvertes et/ou lésions cutanées.
- Ne pas utiliser si le produit est endommagé ou défectueux.
- Ne pas utiliser le produit de quelque manière qui puisse endommager son usage.
- Ne pas s'asseoir ou s'allonger sur le Pack de Froid, ne pas s'endormir avec le Pack de Froid sur la peau.
- Si le contenu du Pack de Froid entre en contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau immédiatement.

LIMITATIONS RELATIVES À CERTAINES POPULATIONS DE PATIENTS

Limiter le recours à ce dispositif chez les patients inconscients, handicapés, présentant une altération de l'état mental ou de la perception de la douleur. Lors de l'utilisation de ce dispositif, une surveillance fréquente des patients ayant subi une intervention chirurgicale sous sédation, analgésie ou anesthésie, et des patients prenant des somnifères, des anxiolytiques ou des antidépresseurs, est obligatoire. Il est possible que ces patients ne soient pas en mesure de ressentir la douleur, la brûlure, l'engourdissement, le picotement ou la diminution de la sensation, au risque de subir des blessures. Interrompre immédiatement la cryothérapie dès les premiers signes de lésions dues au froid.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175
Hannover
Germany



DJO, LLC
1430 Decision Street
Vista CA 92081-8553
USA
www.DJOGlobal.com



DJO France SAS
3, rue de Bethar
64990
Mouguerre
FRANCE