



FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION / INDICATIONS

- Immobilisation et contention dans tous les cas nécessitant une mobilité réduite du membre supérieur (traumatismes de l'épaule ou du coude).

CONTRE-INDICATIONS

- Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

En cas de douleur, de gonflement, de changements au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Mettre le bras en suspension dans l'écharpe et positionnant la bretelle (A) en diagonale sur l'épaule opposée.

- 1) Positionner le coude dans le gilet, puis l'avant bras. Au niveau de la main, le pouce peut être engagé dans la boucle textile (B) prévue à cet effet, afin d'immobiliser la main en semi pronation.
- 2) Passer la sangle arrière dans la boucle prévue à cet effet, ajuster la longueur et la fixer à l'aide de l'attache auto-agrippante.
- 3) Passer la sangle d'épaule dans la boucle avant prévue à cet effet, ajuster la longueur et la fixer à l'aide de l'attache autoagrippante. Se faire aider par une tierce personne.

ENTRETIEN

Laver à l'eau tiède à l'aide d'un détergent doux. Ne pas utiliser d'agent blanchissant. Rincer abondamment. Sécher à l'air libre. Ne pas sécher au sèche-linge. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.



SANS LATEX

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.