

# Scandinavian Butler

Félicitations pour votre nouveau déambulateur !  
Nous avons tout mis en œuvre pour vous offrir un produit sûr et élégant, pour vous accompagner de nombreuses années.

## Guide d'assemblage

Le Scandinavian Butler est emballé avec les roues détachées. Cela réduit la taille de la boîte en carton, ce qui permet de réduire l'empreinte écologique du transport de presque 40%. Pour éviter de griffer le déambulateur pendant le montage, nous vous conseillons de le placer sur une surface douce.

### Attacher les roues arrières

1. Dévissez le boulon de fixation sur le côté de la roue.
2. Enlevez la protection à l'extrémité du câble de frein.
3. Placez l'extrémité sphérique du câble avec le crochet dans le pont d'accouplement. Tirez le câble et insérez la partie filetée dans le trou au bout du pont d'accouplement.
4. Assemblez le bout de protection avec la partie filetée et serrez contre le pont d'accouplement.
5. Poussez la roue dans le cadre en aidant avec précaution le câble à passer par le trou dans le cadre.
6. Attachez et serrez la vis de serrage par le trou dans le cadre. Réglez la tension du câble.

### Attacher les roues avant

1. Insérez la douille pivotante de la roue dans le cadre
2. Aligner la fonction de verrouillage de rotation avec la découpe sur le bord du tube de cadre.
3. Poussez la bague de pivotement plus loin dans le cadre jusqu'à ce que la fonction de verrouillage s'enclenche à travers le trou dans le cadre

## Instructions pour l'utilisation

### Régler la hauteur

1. Tournez les deux manettes en position ouverte, de sorte que les manettes soient perpendiculaires au tube.
2. Vous pouvez maintenant ajuster la poignée à la hauteur désirée. Il est conseillé de régler la hauteur à hauteur des poignets de l'utilisateur, lorsque l'utilisateur se

tient droit avec les bras le long du corp.

3. Bloquez la position de la poignée en tournant la manette d'un quart de tour pour que la manette soie parallèle au tube.
4. Assurez-vous que la poignée soient bien fixée avant d'employer le déambulateur

## Freins

En serrant la poignée, vous activerez les freins sur les deux roues arrières

1. Frein standard: tirer la poignée vers le haut pour freiner.
2. Frein parking: poussez la poignée de frein vers le bas jusqu'à ce que la poignée soie bloquée. Pour désactiver le frein parking, il suffit de débloquent la poignée de frein.

## Réglage des freins

1. Détacher le bouchon de sécurité
2. Réglez la tension du frein tenant la vis de réglage et en dévissant ou en vissant le bouchon de réglage selon la tension désirée.
3. Vérifiez que les roues roulent normalement quand les freins ne sont pas activés et actionnez le frein parking pour le tester. Répétez l'étape numéro 2 au cas où la tension est trop forte ou pas assez forte.
4. Serrez le bouchon de sécurité

## Déambulateur assemblé à la main, fabriqué en Europe

Poids de l'utilisateur: max 150 kg

Taille de l'utilisateur: 150-200 mm

Freins: freins unique qui actionne les deux roues arrière en même temps. Equipé d'un frein parking.

Cadre: Acier carbon revêtement poudré

Roues: 180 mm. Roues doubles avec revêtement TPE qui offre une bonne prise au sol et assure un freinage efficace, même sur surface glissante.

Poignée: poignée élégante et ergonomique. Facile à laver.

Poids: 8,5 kg

Largeur: 588 mm

Hauteur: 850-991 mm

Longueur: 633 mm

## Utilisation conseillée

Le Scandinavian Buttler a été conçu et certifié pour une utilisation à l'intérieur.

C'est pourquoi il est déconseillé de l'employer sur des surfaces accidentées ou pentues.

Le scandinavian Buttler offre un bonne solution pour des personnes souffrants de trouble de l'équilibre et qui ont des difficultés à marcher.

Le Scandinavian Buttler n'est pas une bonne solution pour des personnes ayant très peu de forces dans les bras et dans les mains ou souffrant de problèmes cognitifs majeurs.

Le Scandinavian Buttler ne doit pas être employé pour transporter des personnes ou pour transporter des objets lourds.

Il existe une gamme d'accessoires conçu pour le Scandinavian Buttler. Ne jamais charger le rollator avec plus de poids qu'indiqué sur la notice des accessoires utilisés.

## Entretien

Nettoyage: il est recommandé d'employer un détergents normal pour le nettoyage.

N'employez pas de détergents abrasifs ou corosifs. Le déambulateur peut être lavé à la vapeur ou à haute pression.

## Utilisation ergonomique et correcte du nouveau Scandinavian Buttler

Il est important de bien régler la hauteur de la poignée du déambulateur. Veuillez contacter votre personne soignante au cas où vous observez des difficultés à trouver la bonne hauteur de poignée pour votre déambulateur.

Il est important que vous poussiez le déambulateur devant vous afin d'obtenir le maximum de support et de sécurité.

Contrôlez les freins avant chaque utilisation.

N'utilisez pas le déambulateur sur des escaliers ou des escalators.

Sur des pentes descendantes, le déambulateur roule plus vite que vous ne marchiez, il y a donc un risque de chutes. Au cas où cela est nécessaire, utilisez les freins.

Sur des surfaces pentues sur le côté, ou si le déambulateur est soulevé d'un côté (plus de 5°), il risque de tomber. Pour cette même raison, il ne faut pas accrocher des choses à la poignée du déambulateur.

Veillez à ce que les enfants n'emploient pas le déambulateur comme jouet.

Si le déambulateur est exposé à des températures extrêmes, certains composants deviendront très chauds. Cela pourrait mettre votre sécurité en péril, et risque également de rendre la garantie non valide.

Distribué en France, aux Luxembourg et en Belgique par:

Fabriqué au Danmark par: